



Urinaire katheters

Ontworpen om te beantwoorden aan de noden van uw patiënten



Meer dan 60 jaar Coloplast geschiedenis betekent meer dan 60 jaar ervaring, kwaliteit en vooruitstrevende ontwikkeling zodat we u vandaag de oplossingen voor morgen kunnen bieden.

Deze brochure geeft u een overzicht van ons volledig gamma urinaire katheters. U vindt er informatie over verblijfskatheters, suprapubische katheters en intermitterende katheters.

Inhoudstafel

Urinaire katheters, waarvoor worden ze gebruikt?	4
Soorten katheters	5
Kathetertips, charrières en kleurcodes	6
Folysil: silicone verblijfskatheters	7
Cystodrain: suprapubische katheters	13
SpeediCath: intermitterende katheters	16
EasiCath: intermitterende katheters	21
Terugbetaling van katheters	22
Nuttige tips	23

Urinaire katheters, waarvoor worden ze gebruikt?

Een urinaire katheter is een dun, hol buisje dat via de urethra tot in de blaas wordt gebracht. De katheter kan gebruikt worden om:

- de urine te draineren
- een urinestaal te nemen voor onderzoek
- een blaasinstillatie uit te voeren
- te dilateren in geval van een urethrastrictuur
- urine te draineren na het aanleggen van een kunstmatige blaas of na blaaschirurgie met een darmsegment (continent urostoma)

Urinaire katheters worden dus **gebruikt bij blaasledigingsstoornissen**. Deze kunnen het gevolg zijn van een acute of chronische retentie (ingreep, prolaps, goedaardige prostaatvergroting,...) of neurogeen blaaslijden (MS, spina bifida, para- of tetraplegie).

Een blaas die zich niet voldoende ledigt, kan op korte termijn **neveneffecten** veroorzaken, zoals frequente urineweginfecties. Op lange termijn kan dit echter leiden tot schade aan de hogere urinewegen (blaas-of nierstenen, nierfalen).

Daarom is een vroege diagnose van urineretentie belangrijk.

Wanneer het natuurlijk ledigen van de blaas (gedeeltelijk of volledig) niet meer mogelijk is, worden urinaire katheters gebruikt als **therapeutisch hulpmiddel**.



Soorten katheters

De volgende soorten katheters komen aan bod: de transurethrale, de suprapubische en de intermitterende katheters.



Transurethrale katheters

De transurethrale katheter is voorzien van een ballon, die met behulp van een spuit gevuld wordt met steriel water. Afhankelijk van het type katheter kan hij maximaal 12 weken in het lichaam blijven. Eenmaal geplaatst, wordt hij aan een urinezak gekoppeld. Als alternatief kan een katheterventiel gebruikt worden. Dat is een soort kraantje dat op de katheter bevestigd wordt om de urine te laten

aflopen in het toilet of een urinezak (zie pag 9). Een katheterventiel mag alleen gebruikt worden op advies van een arts.

De transurethrale katheter wordt door een arts of verpleegkundige via de urinebuis in de blaas gebracht en blijft ter plaatse gedurende de periode die de arts voorschrijft. Deze katheter is ook gekend als foleykatheter, verblijfskatheter, ballonkatheter of 2-wegskatheter.

Suprapubische katheters

De suprapubische katheter is eveneens voorzien van een ballon en wordt via de voorste buikwand op chirurgische wijze in de blaas gebracht. Ook deze katheter kan gebruikt worden met een urinezak en/of een katheterventiel. De eerste plaatsing gebeurt door een uroloog. Daarna mag een (thuis)verpleegkundige hem vervangen.



Intermitterende katheters

De intermitterende katheter wordt via de urethra in de blaas gebracht en na de katheterisatie onmiddellijk verwijderd. Dit wordt uitgevoerd door een verpleegkundige of door de patiënt zelf. Indien de patiënt het uitvoert, dan spreken we over zelfkatheterisatie of autosondage. In dat geval wordt de techniek vooraf aangeleerd door de (in)-continentie-verpleegkundige.

Kathetertips, charrières en kleurcodes

Soorten kathetertips



Nelaton

Rechte tip


Folysil,
Cystodrain,
SpeediCath,
EasiCath



Tiemann

Gebogen tip


Folysil,
Cystodrain,
SpeediCath,
EasiCath

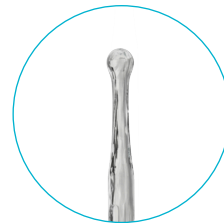

Flex

Flexibele tip

SpeediCath Flex

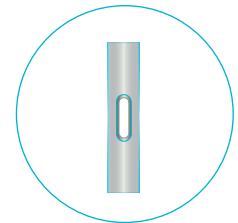

Open tip


Folysil

Charrières en kleurcodes

De diameter van de katheter staat steeds op de doos. Als maat wordt charrière (Ch) gebruikt: dat is de eenheid voor kleine diameters.

1 Ch = 1/3 mm, of 3 Ch = 1 mm

Je kan de diameter van een katheter ook herkennen aan de kleur die gebruikt wordt voor de connector. Bij intermitterende katheters is dat de kleur van het drainage-uiteinde. Bij verblijfskatheters is dat de kleur van het connectiestukje dat wordt gebruikt om de ballon te vullen met een spuit. De kleurcode is universeel en verwijst naar de charrière (Ch) van de katheter.

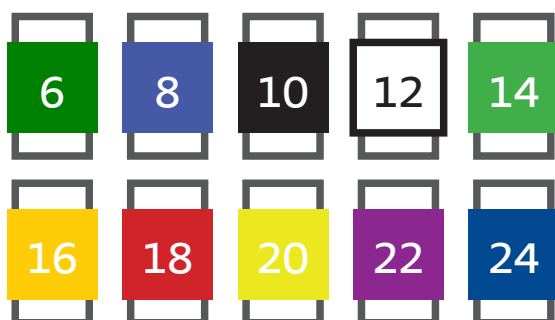

Folysil

Silicone verblijfskatheters



Verblijfskatheters

Folysil assortiment: Wat zijn de voordelen?

Een uitgebreid assortiment voor de noden van uw patiënten.

Verblijfsduur: korte termijn (tot 30 dagen)
& lange termijn (tot 90 dagen)


Korte termijn



Lange termijn



Katheterverpakkingen met voorgevulde
spuiten met aqua/glycerine

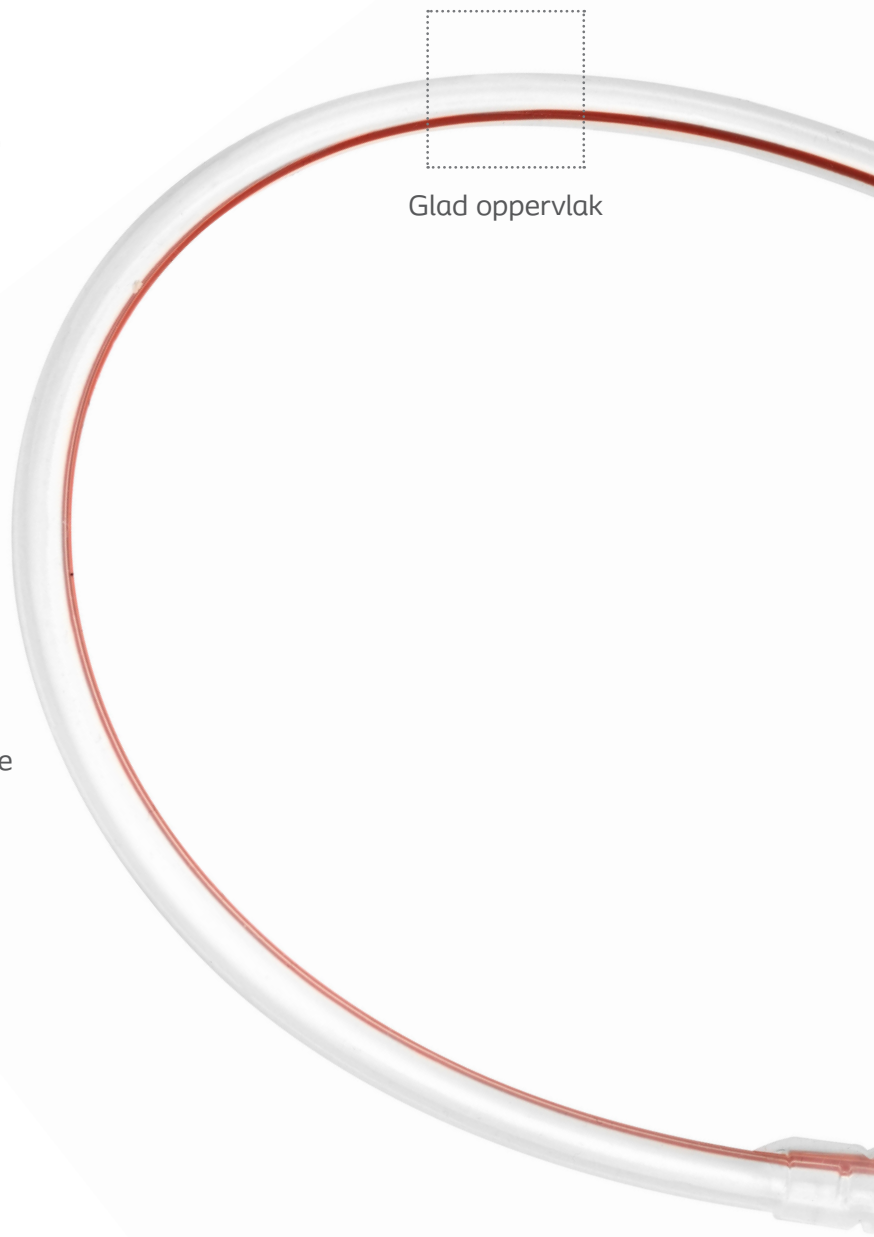

Glad oppervlak



Tiemann




Over voerdraad



Nelaton/recht


Een ruim assortiment van kathetertips

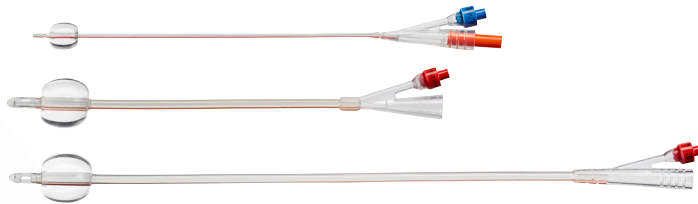

Katheters voor zowel kinderen, vrouwen als mannen



Verstevigde connectors

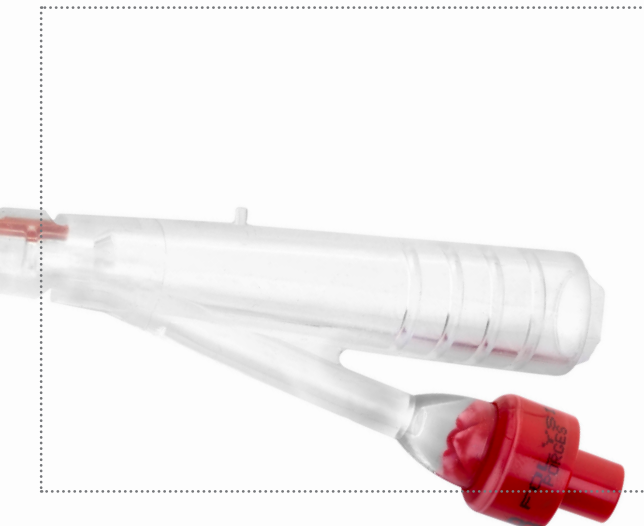

Katheterkraantje

Meer comfort voor uw actieve patiënt

Bedoeld om te worden aangesloten op een verblijfskatheter. Het kraantje wordt gebruikt om de urine direct af te voeren in het toilet of in een urinezak die op het kraantje is aangesloten.



Katheterkraantje	
REF	CV3808* 4181-269

Individueel verpakt. Steriel.

*De referenties in het **turquoise** zijn de productcodes van Coloplast, de referenties in het grijs zijn de CNK-codes


Folysil

Voor standaard katheterisatie

Nelaton



Over voerdraad

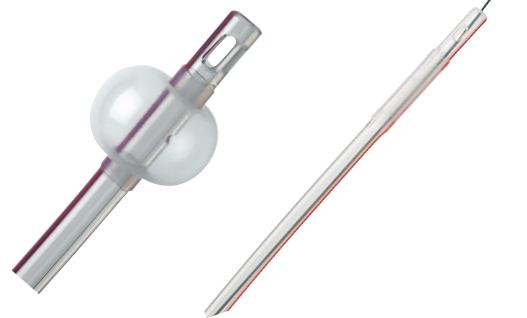

Volwassenen

- Doos van 5 • Steriel

Type	Ballon	Lengte	# Ogen	Ch						
				12	14	16	18	20	22	24
Man Nelaton	15 ml	41 cm	2	AA6112* 4180-519	AA6114* 4180-527	AA6116 4180-535	AA6118 4180-543	AA6120 4180-550	AA6122 4180-568	AA6124 4180-576
	30 ml			-	-	-	AA6C18 -	AA6C20 -	AA6C22 -	AA6C24 -
Vrouw Nelaton	15 ml	25 cm	2	AA6512* 4180-584	AA6514* 4180-592	AA6516 4180-600	AA6518 4180-618	AA6520 4180-626	AA6522 4180-634	AA6524 4180-642
Over voerdraad		40 cm	2 + Tip	AA6412* 4180-659	AA6414* 4180-667	AA6416 4180-675	AA6418 4180-683	AA6420 4180-691	AA6422 4180-709	AA6424 4180-717

*10ml ballon

Pediatriesch

- Doos van 5 • Steriel

	Ch		
	06	08	10
Lengte	30 cm	30 cm	34 cm
Ballon	1,5 ml	3 ml	3 ml
Nelaton	AA6106 4180-857	AA6108 4180-865	AA6110 4180-873
Over voerdraad	AA6406* 4180-881	AA6408* 4180-899	AA6410* 4180-907

*Geleverd zonder stylet



Folysil LT & X-tra

Voor lange termijn katheterisatie (90 dagen)

Folysil LT



Folysil X-tra met voorgevulde spuit



Folysil LT

- Doos van 5 • Steriel

Type	Ballon	Lengte	# Ogen	Ch					
				12	14	16	18	20	22
Man Nelaton	10 ml	41 cm	2	AA7112 4180-931	AA7114 4180-949	AA7116 4180-956	AA7118 4180-964	AA7120 4180-972	AA7122 4180-980
Vrouw Nelaton	10 ml	27 cm	2	AA7512 4180-998	AA7514 4181-004	AA7516 4181-012	AA7518 4181-020	-	-
Over voerdraad	10 ml	40 cm	2 + Tip	AA7412 4181-038	AA7414 4181-046	AA7416 4181-053	AA7418 4181-061	AA7420 4181-079	-

Folysil X-tra met voorgevulde spuit

- Individueel verpakt • Steriel

Type	Ballon	Lengte	# Ogen	Ch					
				12	14	16	18	20	22
X-Tra Man Nelaton	10 ml	41 cm	2	AA8112 4181-111	AA8114 4181-129	AA8116 4181-137	AA8118 4181-145	AA8120 4181-152	AA8122 4181-160
X-Tra Vrouw Nelaton	10 ml	27 cm	2	AA8512 4181-178	AA8514 4181-186	AA8516 4181-194	AA8518 4181-202	-	-

Folysil X-tra single pack; met voorgevulde spuit en lege spuit

- Individueel verpakt • Steriel

Type	Ballon	Lengte	# Ogen	Ch					
				12	14	16	18	20	22
X-Tra Man Nelaton	10 ml	41 cm	2	AA8A12 3189-263	AA8A14 3189-271	AA8A16 3189-289	AA8A18 3189-297	AA8A20 3189-305	AA8A22 3189-313
X-Tra Vrouw Nelaton	10 ml	27 cm	2	AA8B12 3189-321	AA8B14 3189-339	AA8B16 3189-347	AA8B18 3189-354	-	-
X-Tra Over voerdraad	10 ml	40 cm	2 + Tip	AA8C12 3189-370	AA8C14 3189-388	AA8C16 3189-396	AA8C18 3189-404	-	-

Pediatriesch


- Doos van 5 • Steriel

	Ch		
	06	08	10
Lengte	30 cm	30 cm	34 cm
Ballon	1,5 ml	3 ml	3 ml
Lange Termijn	AA7106 4181-087	AA7108 4181-095	AA7110 4181-103



Tiemann

Met Tiemann tip voor moeilijkere katheterisaties bij mannen

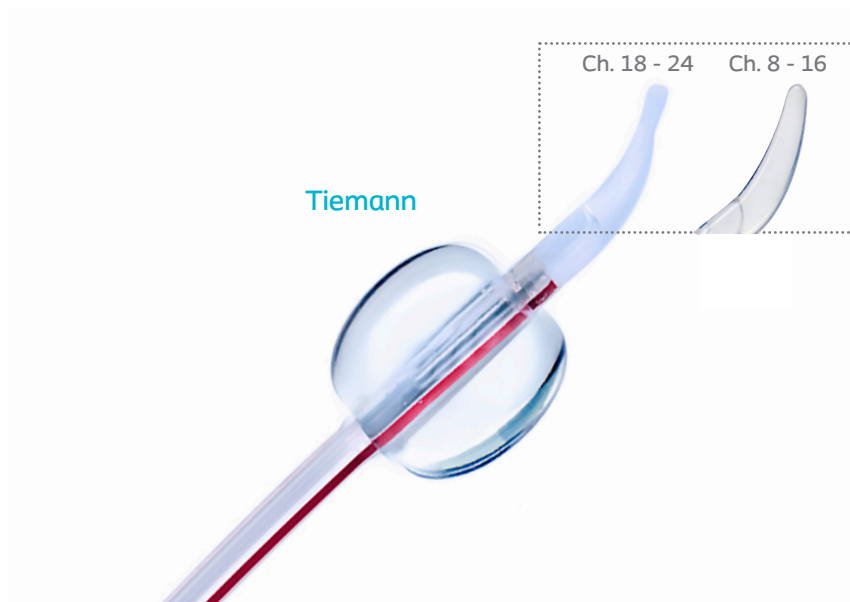

Volwassenen

- Doos van 5 • Steriel

Type	Ballon	Lengte	# Ogen	Ch						
				12	14	16	18	20	22	24
Man Tiemann	15 ml	40 cm	1	AA6312* 4180-725	AA6314* 4180-733	AA6316 4180-741	AA6318 4180-758	AA6320 4180-766	AA6322 4180-774	AA6324 4180-782

*10ml ballon

Cystodrain

Suprapubische katheters

Cystodrain Integral

Suprapubische katheter met geïntegreerde ballon voor gemakkelijke plaatsing/verwijdering

Vervangingsset

- Silicone Integral ballonkatheter
- Adhesive tape
- Spigot (afsluitdopje)

(het is ook mogelijk om te connecteren aan een katheterventiel - CV 3808)



Vervangingsset (zonder voerdraad)

- Individueel verpakt of per 5 • Steriel

Type	Ch				
	12	14	16	18	20
Individueel verpakt	CD1B12 3189-420	CD1B14 3189-438	CD1B16 3189-446	CD1B18 3189-453	CD1B20 3189-461
Doos van 5	CD1C12 4181-210	CD1C14 4181-228	CD1C16 4181-236	CD1C18 4181-244	CD1C20 4181-251

SpeediCath

Hydrofiële gebruiksklare katheters



Intermitterende katheters

SpeediCath katheters

Altijd innoverend

Veilig


Unieke Speedicath coating:

- Hydrofiel
- Gladde en uniforme coating, homogeen aangebracht over het hele katheteroppervlak voor verminderde wrijving bij inbrengen en verwijderen



Onmiddelijk gebruiksklaar

- Bewaard in een steriele zoutoplossing
- Water of glijmiddel moet niet worden toegevoegd
- Gemakkelijk te openen dankzij de trekring

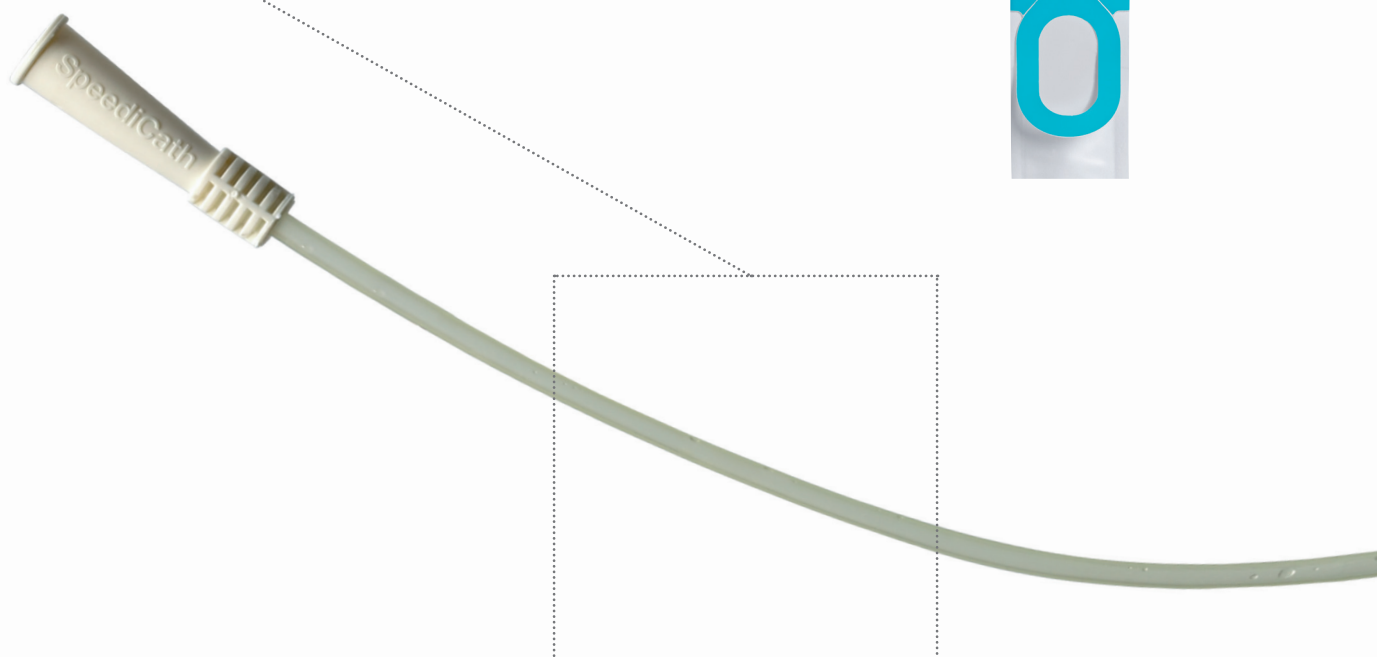


Milieuvriendelijk

- PVC- vrij voor minimale impact op het milieu
- Ftalaat-vrij
- Vervaardigd uit polyurethaan

Comfort voor de patiënt

SpeediCath gecoate oogjes met gepolijste randen

- Verminderen risico op urethraal trauma
- Verhogen het comfort van patiënt bij katheterisatie

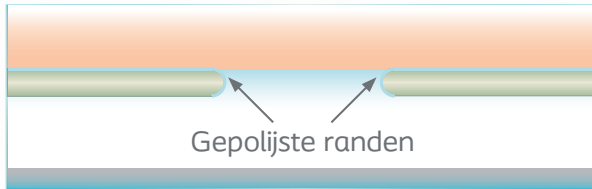

Profiel SpeediCath oogje



Betere levenskwaliteit wat intermitterende katheterisatie betreft*

Breed gamma

Beschikbaar in verschillende Ch. en lengtes, ook voor pediatrie

Volwassenen

Type	Lengte	Aantal	Ch					
			08	10	12	14	16	18
Mannen Tiemann	40 cm	30 st/doos	-	27490 1761-444	27492 1761-451	27494 1761-469	27496 3095-460	-
Mannen Nelaton	40 cm	30 st/doos	27408 2389-583	27410 1761-402	27412 1761-410	27414 1761-428	27416 1761-436	27418 2389-591
Vrouwen Nelaton	20 cm	30 st/doos	27508 2389-609	27510 1761-477	27512 1761-485	27514 1761-493	27516 1761-501	-

Pediatriesch

Type	Lengte	Aantal	Ch		
			06	08	10
Kinderen Nelaton	20 cm	30 st/doos	27706 2389-617	27708 2389-625	27710 2389-633



* Aangetoond voor SC Compact, Chartier - Kastler E. et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7

Katheters voor mannen

SpeediCath Compact Man

De meest compacte katheter voor mannen

Telescopisch design

Alhoewel de verpakking slechts 19 cm meet, wordt de katheter bij het openen 33 cm lang.

Hygiënisch

De katheter kan ingebracht worden zonder dat het gecoate deel hoeft aangeraakt te worden.

Discreet ontwerp (niet-medisch uitzicht)

Kan onopvallend meegenomen worden in een jas- of broekzak, dankzij zijn compact ontwerp.

Hersluitbaar

Makkelijk om mee te nemen en discreet weg te gooien.



SpeediCath Flex

De soepele katheter met droge beschermhoes

Discreet ontwerp

SpeediCath Flex is hersluitbaar zodat hij netjes, discreet en hygiënisch kan gebruikt en weggegooid worden.

Gemakkelijk

De vernieuwde en verbeterde verpakking heeft een eenvoudigere opening en sluiting. Ze bevat geen aluminium en is dus beter voor het milieu.

Droge beschermhoes

Om de katheter hygiënisch in te brengen zonder hem zelf aan te raken.

Flexibele tip

Om gemakkelijk en voorzichtig langs de rondingen en bochten van de urinebuis te sturen.

Praktische verpakking

Gemakkelijk te openen met een neutraal, niet-medisch uitzicht. Ook beschikbaar in pocket formaat.



Mannen (Nelaton)

Type	Lengte	Aantal	Ch/Fr				
			12/18	10	12	14	16
SpeediCath Compact	33 cm incl. connector	30 stuks / doos	28692 2749-554	-	-	-	-
SpeediCath Flex	44 cm incl. connector	30 stuks / doos	-	28920 3467-156	28922 3467-164	28924 3467-172	28916 3467-180
SpeediCath Flex Pocket	44 cm incl. connector	30 stuks / doos	-	28910 3923-554	28912 3923-539	28914 3923-547	-

Compacte katheters voor vrouwen

SpeediCath Compact Eve

Onze meest stijlvolle katheter voor vrouwen

Discreet ontwerp

De katheter heeft een niet-medisch uitzicht. Hij lijkt op een mascara.

Gebruiksgemak

In één stap te openen, te gebruiken en veilig af te sluiten.

Betere grip

Unieke driehoekige vorm voor meer gebruiksgemak en een betere grip.

Connectie

Kan rechtstreeks op een urinezak aangesloten worden.



SpeediCath Compact

De meest compacte katheter voor vrouwen en meisjes

Beschikbaar

in verschillende charrières en lengtes, ook in zeer kleine charrières.

Discreet ontwerp

De katheter is niet groter dan een lippenstift.



Vrouwen (Nelaton)

Type	Lengte	Aantal	Ch		Ch		
			06	08	10	12	14
SpeediCath Compact Eve	9 cm	30 stuks / doos	-	-	28110 3235-868	28112 3235-892	28114 3235-876
SpeediCath Compact Vrouw	7 cm	30 stuks / doos	28576 4295-606	28578 2180-123	28580 2180-131	28582 2180-149	28584 2180-156
SpeediCath Compact Plus Vrouw	9 cm	30 stuks / doos	-	-	28810 2658-227	28812 2658-235	28814 2658-243

Intermitterende katheters

SpeediCath Compact Set


De eerste alles-in-een compacte katheterset

Inhoud urinezak:
750 ml



Lengte katheter incl connector: 15 cm

15,5 cm

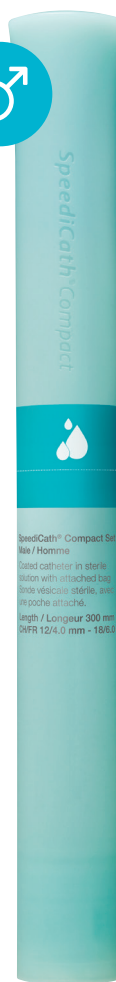

Lengte katheter incl connector: 36 cm

21 cm

Compact ontwerp

Gemakkelijk mee te nemen met geïntegreerde urinezak.

Hersluitbaar

Kan opnieuw gesloten worden na gebruik om daarna discreet weg te gooien.

Altijd en overal

Handig wanneer er geen WC is.

SpeediCath Compact Set (Nelaton)

Type	Lengte	Urinezak	Aantal	Ch			
				12/18	10	12	14
SpeediCath Compact Set Man	36 cm incl. connector	750 ml	20 stuks / doos	28422 3147-899	-	-	-
SpeediCath Compact Set Vrouw	15 cm incl. connector	750 ml	20 stuks / doos	-	28520 3164-324	28522 3147-907	28524 3164-316

EasiCath & Easicath Set

De allereerste generatie hydrofiele katheters van Coloplast

EasiCath - voorgelubriceerde hydrofiele katheter


Water moet worden toegevoegd om de coating te activeren. 30 sec wachttijd.

EasiCath LuerLock

Kan dankzij de LuerLock-aansluiting gebruikt worden voor blaasinstillatie.

EasiCath Set - katheterset

Bevat een urinezak van 700 ml en een flacon met steriele zoutoplossing.
Handig wanneer er geen WC in de buurt is.

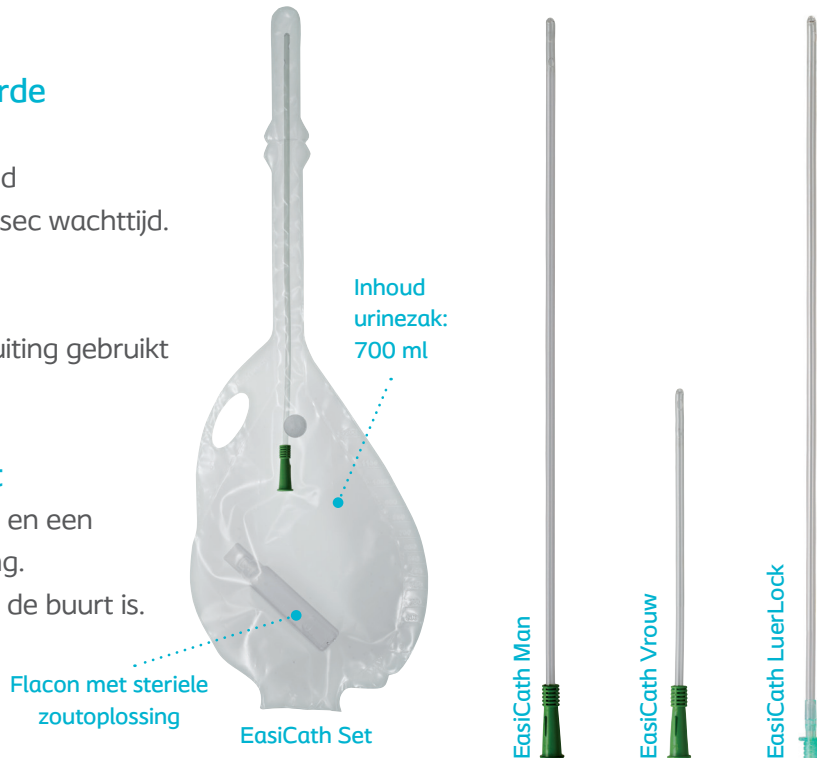

EasiCath katheters

Type	Lengte	Aantal	Ch							
			08	10	12	14	16	18	20	22
Man Tiemann	40 cm	60 stuks / doos	-	5380 1761-576	5382 1761-584	5384 1761-592	5386 1761-600	5388 1761-618	-	-
Man Nelaton	40 cm	60 stuks / doos	5348 1761-519	5350 1761-527	5352 1761-535	5354 1761-543	5356 1761-550	5358 1761-568	5360 * 1265-743	5362 * 1265-735
Vrouw Nelaton	20 cm	60 stuks / doos	5368 1761-626	5370 1761-634	5372 1761-642	5374 1761-659	5376 1761-667	-	-	-

* 25 stuks / doos

EasiCath LuerLock (Nelaton)

Type	Lengte	Aantal	Ch				
			08	10	12	14	16
Man	40 cm	10 stuks / doos	5288 2180-024	5290 2180-032	5292 2180-040	5294 2180-057	5296 2180-065
Vrouw	20 cm	10 stuks / doos	5268 2180-073	5270 2180-081	5272 2180-099	5274 2180-107	-

EasiCath Set (Nelaton)

Type	Inhoud	Lengte	Aantal	Ch			
				10	12	14	16
Man	700 ml	40 cm	20 stuks / doos	28006 2490-050	28007 2490-068	28008 2490-076	28009 2490-084
Vrouw	700 ml	20 cm	20 stuks / doos	28002 2490-126	28003 2490-126	28004 2490-134	28014 2490-142

Intermitterende katheters

Terugbetaling van katheters

Suprapubische en verblijfskatheters

- Dit type katheter wordt niet vergoed bij aankoop in de apotheek.
- Rusthuizen hebben het recht om de katheter te factureren aan hun bewoners.
- Bij opname in het ziekenhuis zijn er andere regels. Spreek erover met uw zorgverlener.

Intermitterende katheters

Aanvraag tot vergoeding, eerste voorschrift

- Enkel voor de indicaties gespecificeerd in het koninklijk besluit*
- Enkel door de arts-specialist in de volgende domeinen:
urologie, neurologie, neuropediatrie, fysische geneeskunde, revalidatie
- Moet verzonden worden naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit van de patiënt;
- Is 1 jaar geldig.

Voorschrift

- 1e voorschrift door arts-specialist;
- Aanvullende voorschriften door behandelend geneesheer

Verlenging van de aanvraag tot vergoeding

- Enkel op aanvraag van arts-specialist;
- Verlenging voor 5 jaar en in uitzonderlijke gevallen (wanneer er een goedkeuring is voor 6 tot 8 katheters per dag) voor telkens 1 jaar.

Terugbetaling van katheters

- Op vertoon van de machtiging van de mutualiteit en een geldig voorschrift geldt de derdebetalersregeling.
- Enkel terugbetaling van de katheters die zijn ingeschreven op de RIZIV-lijst.

Belangrijke voorwaarden

- Rechthebbende moet zichzelf katheteriseren of gekatheteriseerd worden door iemand uit zijn directe omgeving (partner, familie) die daartoe opgeleid is.
- De terugbetaling geldt enkel voor de rechthebbende thuis.

* Zie KB 18 april 2017 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis

Nuttige tips

Hulp bij onvolledig voorschrift

Indien het een nieuwe patiënt is:

Dit zijn de vragen die u moet stellen om het product te kennen



Indien uw patiënt al een katheter draagt:

Vraag hem hoe de katheter eruit ziet

- Doorschijnend kunststof; dan is het waarschijnlijk een silicone katheter.
- Lichtbruine kleur wijst op een latex katheter.
- Vraag hem naar de kleur van het drainage uiteinde, zo weet u de charrière.
- Vraag hem of de tip open, gebogen of recht is. Voor mannen wordt er vaak een Tiemann verblijfskatheter voorgeschreven.

Mijn patiënt heeft een suprapubische katheter en ervaart blaaskrampen

- Ga na of uw patiënt een suprapubische of verblijfskatheter in zijn blaas heeft. Verblijfskatheters kunnen in sommige gevallen blaaskrampen veroorzaken.

Wie mag een suprapubische katheter vervangen?

- De eerste keer moet een suprapubische katheter vervangen worden door de uroloog. Vervolgens mag dit gedaan worden door een verpleegkundige. De eerste keer is het best om de suprapubische set met voerdraad te bestellen.

Mag ik stalen bij Coloplast aanvragen?

- U kunt stalen van intermitterende katheters aanvragen via onze website (www.coloplast.be) of via telefoon op 02 334 35 35. Laat ons enkel weten welke ch, welke tip en of het om een mannelijke of vrouwelijk patiënt gaat.
- Wij sturen geen stalen op van suprapubische of verblijfskatheters.

Ons bedrijf weerspiegelt de passie, ambitie en inzet van de mensen die het opgericht hebben. Elise Sørensen, een verpleegkundige, vond het eerste zelfklevende wegwerpstomazakje uit, omdat ze vastbesloten was om haar zus uit haar isolement te halen. Aage Louis-Hansen en zijn vrouw Johanne zetten hun technische vaardigheden en ondernemerschap in, en dankzij hun grote betrokkenheid en doorzettingsvermogen richtten zij in 1957 Coloplast op.

Ook vandaag leven mensen met een intieme medische aandoening nog vaak geïsoleerd.

Wij zetten ons in om dat te veranderen.

340N2CATNL - PM-15858

Ostomy Care / Contenance Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2021-03. Alle rechten voorbehouden. V.U.: Erina Binnemans
Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel/Huizingen. www.coloplast.be

