

Conveen G-Strap

- Sangle avec bande auto-agrippante
- Pour utilisation avec étuis péniens et sondes à demeure

Conveen®

Disponible
en
50 cm
et 90 cm



Conveen G-strap

Maintien renforcé

Disponible
en
50 et 90 cm

Pourquoi utiliser une sangle Conveen G-strap?


Le Conveen G-strap permet de fixer le tube de la poche à urine ou de la sonde à demeure le long de la jambe pour éviter toute traction et permettre un bon écoulement de l'urine.

Avantages:


- La bande de silicone (fine bande blanche) sur la face intérieure permet d'éviter que le Conveen G-strap ne glisse de votre jambe.
- La bande de caoutchouc permet de maintenir le tube.
- La fermeture velcro permet de fixer le Conveen G-strap.
- Ne contient pas de latex
- Lavable

Conveen® G-strap


Description	Emballage	Référence	Code APB
50 cm	vendu à l'unité	383001	2890-994
90 cm	vendu à l'unité	383003	4137-154

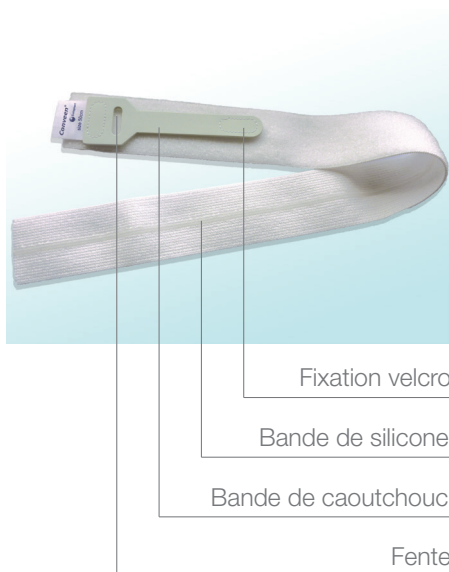

Comment utiliser le Conveen G-strap ?

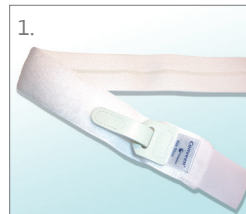

1. Fixer le Conveen G-strap sur la cuisse en plaçant sur votre peau le côté muni d'une fine bande adhésive (bande de silicone).

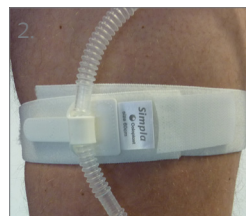

2. Veiller à ce que la sangle soit suffisamment serrée de façon à éviter qu'elle ne glisse lorsque vous bougez. La sangle ne doit toutefois pas être trop serrée pour ne pas entraver la circulation sanguine. Vous pouvez ajuster la longueur en coupant une partie de la sangle.



3. Placer le tube sous la bande de caoutchouc.



4. Enrouler la bande de caoutchouc autour du tube, tirer et glisser l'extrémité de la bande dans la fente. Tirer de nouveau jusqu'à ce que le tube soit bien fixé.



5. Appliquer la bande velcro sur le Conveen G-strap. Attention ! Veiller à ce que le tube ne soit pas trop étroitement serré pour ne pas bloquer l'écoulement de l'urine.