

Conveen G-Strap

- Beenriem met klittenband
- Voor gebruik met condoomkatheters en verblijfsondes

Conveen[®]

Beschikbaar
in
50 en 90 cm



Conveen G-strap

Extra fixatie

Beschikbaar
in
50 en 90 cm

Waarom een Conveen G-strap gebruiken ?


De Conveen G-strap voorkomt het loskomen van de condoomkatheter of de verblijfsonde en garandeert een goede afloop van de urine.

Voordelen:

- De siliconen strook (de witte kleefstrook) op de achterkant voorkomt dat de Conveen G-strap van uw been afglijdt.
- Het rubberen bandje zorgt ervoor dat de tube niet beweegt.
- De klittenband zorgt ervoor dat de Conveen G-strap niet losraakt.
- Bevat geen latex
- Wasbaar

Conveen® G-strap


Beschrijving	Verpakking	Referentie	APB-code
50 cm	per stuk	383001	2890-994
90 cm	per stuk	383003	4137-154

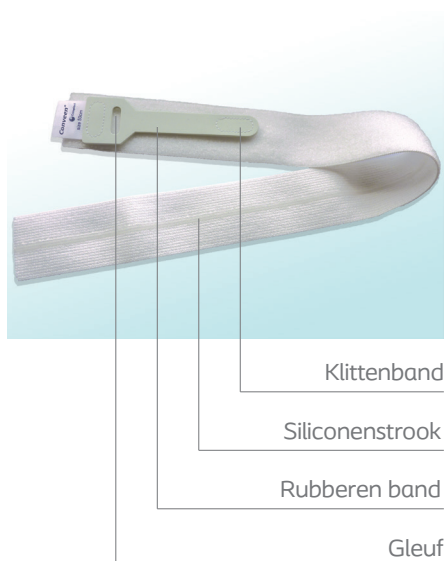


Hoe breng ik de Conveen G-strap aan ?




1. Bevestig de Conveen G-strap op uw bovenbeen met de witte kleefstrook (siliconenstrook) op uw huid.

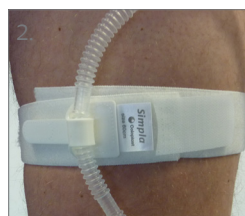

2. Zorg dat het bandje net genoeg spant zodat het niet naar beneden glijdt wanneer u beweegt. Anderzijds mag het niet teveel spannen zodat uw bloedsomloop niet wordt afgesneden. Indien nodig kunt u de lengte aanpassen door met een schaar een stukje af te knippen van de strook.

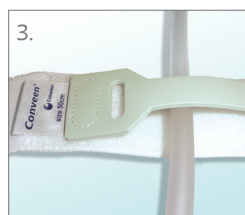

3. Plaats de tube onder het rubberen bandje.

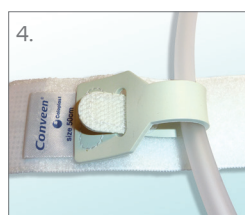

4. Wikkel de korte rubberen band rond en onder de tube en trek het vrije uiteinde door de gleuf. Trek aan het rubberen bandje tot de tube goed vastzit.



5. Duw de klittenband vast op de Conveen G-strap. Opgelet! Zorg dat de tube niet te strak bevestigd is om de urinestroom niet te belemmeren.