

Mode d'emploi à destination
des utilisateurs

LujaTM

avec la Technologie de
Zone Micro-Perforée



Nouveau
cathéter
intermittent pour
hommes

Un nouveau standard pour la vidange de la vessie grâce à la Technologie de Zone Micro-Perforée

Luja™ est conçu pour réduire le risque d'infection des voies urinaires (IVU)* en veillant à ce que votre vessie soit complètement vidée** - car moins il y a d'urine résiduelle, mieux c'est.†



Les cathéters sont généralement munis de deux œils pour drainer la vessie

Avec 2 œils, le flux s'interrompt souvent et il faut repositionner le cathéter pendant le sondage pour relancer le flux d'urine afin de vider la vessie.



Luja est le premier et le seul cathéter à être doté de la Technologie de Zone Micro-Perforée


Les cathéters dotés de la seule et unique Technologie de Zone Micro-Perforée possèdent plus de 80 micro-perforations pour une vidange complète de la vessie, sans interruption du flux d'urine et sans qu'il soit nécessaire de repositionner le cathéter.



Pour quelle raison est-il important de vider complètement la vessie ? Regardez cette courte vidéo.


Coloplast présente le cathéter de la nouvelle génération

Luja est le premier et le seul cathéter doté de plus de 80 micro-perforations afin de vider complètement la vessie en un seul flux d'urine ininterrompu.**

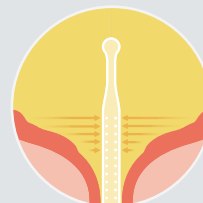


Un seul flux ininterrompu

Le flux d'urine ne s'arrête que lorsque la vessie est complètement vide**.

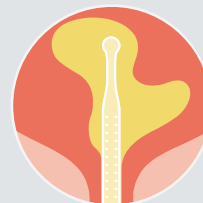

Pas de repositionnement

Comme il est inutile de repositionner le cathéter pendant la vidange, la technique est plus simple à maîtriser.††

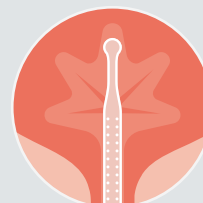

Moins de risques d'IVU

Conçu pour garantir que votre vessie soit vidée au maximum afin de réduire le risque d'IVU.*




** Selon le modèle des facteurs de risque d'IVU (Kennelly M., et al. (2019), 10.1155/2019/2757862).

** Luja ne connaît pratiquement pas d'interruptions du flux ; la vidange complète de la vessie est définie comme < 10 ml (CP353, NCT05485922).

† Averbeck MA, Kennelly M, Thiruchelvam N, et al. Les facteurs de risque d'infections urinaires rapportés par les patients sont associés à une qualité de vie moins bonne chez les utilisateurs de cathéters intermittents. 2022. Soumis.

†† Procédure plus simple avec une seule position par rapport à Hollister VaPro (IFU).

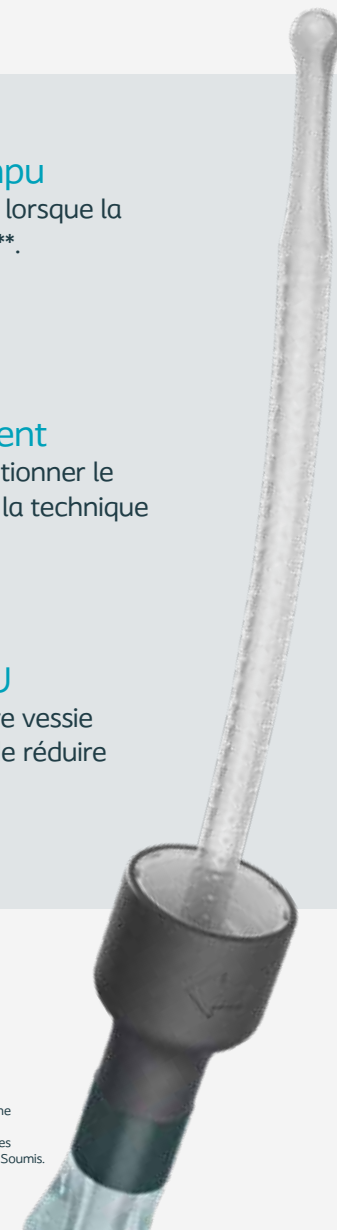

Instructions d'utilisation du cathéter Luja

Préparation



1. **Lavez-vous** les mains à l'eau et au savon et nettoyez délicatement la zone autour de votre méat urinaire. Ouvrez l'emballage et sortez le cathéter.



2. **Tournez pour ouvrir** et découvrez l'embout du cathéter. Veillez à tenir les deux extrémités du cathéter vers le haut, comme un sourire, afin d'éviter de renverser la solution aqueuse contenue dans la gaine. **Drainez** le liquide par le connecteur, en faisant glisser vos doigts vers le bas, le long de la gaine.



3. Pour faciliter l'insertion, redressez votre pénis à l'aide de votre main non dominante. Tout en le soutenant, utilisez votre main dominante pour guider délicatement l'embout du cathéter dans le méat urinaire.



Regardez la vidéo d'utilisation dans un fauteuil roulant



Regardez la vidéo d'utilisation en position debout

Insertion et vidange de la vessie



4. Une fois l'embout introduit, **tenez votre pénis et la poignée grise dans la même main**. Utilisez votre autre main pour **insérer le cathéter**. Pincez la gaine et faites avancer le cathéter petit à petit dans l'urètre. La poignée grise vous permet de maintenir le cathéter en position.



5. Faites progresser le cathéter jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler, puis un peu plus loin. **Lorsque l'urine s'arrête de couler, retirez le cathéter**.



6. Refermez le produit en rassemblant les deux poignées grises afin de le transporter et de l'éliminer aisément. Vous pouvez replacer le cathéter dans son emballage et utiliser l'étiquette au dos pour refermer celui-ci.

Aide personnalisée

Coloplast® Care est un programme de soutien conçu pour encourager et inspirer les personnes utilisant des cathéters à vivre une vie meilleure. Il offre des conseils simples, un soutien personnalisé grâce à une équipe d'infirmières et constitue une source d'inspiration. Via notre site web, des magazines et par e-mail. Ou par téléphone, où nos conseillers répondent aux questions et donnent des conseils sur les défis quotidiens.

Le bien-être, c'est ce que vous en faites

Coloplast Care est là pour vous soutenir - selon vos propres besoins.

Inscrivez-vous à Coloplast Care sur : www.catheter.coloplastcare.be



Avant utilisation, lisez toujours les « Instructions d'utilisation » fournies avec les produits.

Gaine de protection sèche pour une manipulation hygiénique sans contact et une bonne prise en main qui favorise le contrôle pendant le sondage.

La Technologie de Lubrification Triple Action pour une insertion aisée et moins de friction afin de protéger votre urètre et de réduire le risque d'IVU.*

La Technologie de Zone Micro-Perforée pour une vidange complète de la vessie en un flux ininterrompu.**

Embout flexible pour une insertion facile et douce.

* Par rapport aux cathéters non lubrifiés.

** Luja ne connaît pratiquement pas d'interruptions du flux ; la vidange complète de la vessie est définie comme < 10 ml (CP353, NCT05485922).

Stoma Care | Continence Care | Wound and Skin Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast Belgium NV/SA, G. Gezellestraat 121, 1654 Hulzingen. V.U.: E. Binnemans. www.coloplast.be PM-29654

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. © 2023-11. Tous droits réservés Coloplast A/S. Ref. 340N2LCSFR

 **Coloplast**