

Een productgids voor professionals
in de gezondheidszorg

LujaTM

met Micro-hole Zone-
technologie




Nieuwe

intermitterende
katheter voor
mannen


Luja™ met Micro-hole Zone-technologie verzekert een volledige blaaslediging in één vrije stroom*

Luja is de eerste en enige katheter met 80+ microgaatjes, met als gevolg:

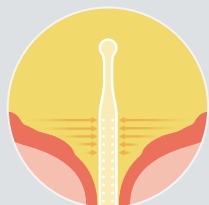


Eén vrije stroom

De urinestroom stopt pas als de blaas volledig geledigd is.*

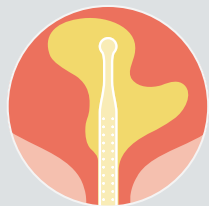

Geen verplaatsing nodig

De katheter hoeft niet verplaatst te worden omdat de aanzuiging door het slijmvlies sterk verminderd is.**

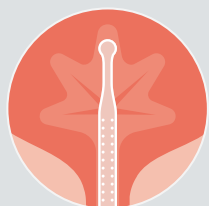

Minder risico op UWI's

Ontworpen om het risico op UWI's te beperken† via een vermindering van de residuele urine en van de microtrauma's in de blaas.**



* met Luja wordt de stroom amper of niet onderbroken en een volledige blaaslediging wordt gedefinieerd als <10 ml (NCT05485922, N=42). De individuele resultaten kunnen variëren.

** Getest in een preklinische setting (ex vivo).

† Residuele urine en microtrauma's zijn risicofactoren voor UWI's (Kennelly M., et al. (2019), 10.1155/2019/2757862)

†† In vergelijking met katheters zonder coating.

Luja bouwt voort op de belangrijke voordelen van SpeediCath®

Deze katheter pakt meer met katheterisatie samenhangende risicofactoren voor urineweginfecties (UWI's) aan dan ooit tevoren:

Micro-hole Zone-technologie voor een volledige blaaslediging in één vrije stroom om het risico op UWI's te verlagen†

Triple Action Coating Technology om de urethra te beschermen en het risico op UWI's te verlagen††

Flexibele tip voor een zachte inbrenging



Bekijk de video met het verhaal over de Luja-innovatie



Droge en beschermende huls voor een hygiënische inbrenging

Productkenmerken van Luja

	Lengte van de katheter	CH	Katheters per doos	Productcode	CNK-codes
Luja Man Pocket formaat	33 cm	CH08	30	20058	4744447
Luja Man Pocket formaat	33 cm	CH10	30	20061	4694071
Luja Man Pocket formaat	33 cm	CH12	30	20062	4694089
Luja Man Pocket formaat	33 cm	CH14	30	20064	4694097
Luja Man Standaard formaat	33 cm	CH10	30	20031	4693768
Luja Man Standaard formaat	33 cm	CH12	30	20032	4693776
Luja Man Standaard formaat	33 cm	CH14	30	20034	4693883
Luja Man Standaard formaat	33 cm	CH16	30	20036	4693750
Luja Man Standaard formaat	33 cm	CH18	30	20038	4744439

Instructies voor heterosondage door een zorgverlener

Vorbereiding



1. Was uw handen, doe een nieuw paar handschoenen aan en open de verpakking van de katheter.



2. Draai om te openen en de tip van de katheter vrij te maken. Let erop dat u beide uiteinden van de katheter naar boven houdt.



3. Laat de waterige oplossing wegllopen via het drainage-uiteinde door uw vingers over de huls te laten glijden.

Inbrenging en blaaslediging



4. Ondersteun de penis en schuif de tip van de katheter voorzichtig in de opening van de urethra.



5. Zodra de tip ingebracht is, houdt u met één hand de penis en het grijze handvat vast. Gebruik uw andere hand om de katheter in te brengen. Knijp op de huls en duw de katheter geleidelijk naar de penis toe. Blijf de katheter verder inbrengen tot de urine begint te stromen en breng hem dan nog wat verder in.



6. Verwijder de katheter als de urine traag begint te druppelen.



Raadpleeg voor het gebruik altijd de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met de producten.



Bekijk de video voor professionals in de gezondheidszorg over het gebruik van de Luja™-katheter

Coloplast® Care

Coloplast Care biedt uw patiënten ondersteuning en praktisch advies op maat.

Dit gratis programma is ontwikkeld om gebruikers te helpen hun medische aandoening zelf te verzorgen en vanuit een holistisch perspectief tegemoet te komen aan de behoeften van de gebruikers. Wij nemen proactief contact op met Care-leden om erop toe te zien

dat ze het product goed gebruiken, er staat een team verpleegkundigen paraat om hulp aan huis te verlenen, en we bieden hen ook inspiratie en advies van lotgenoten om optimaal te leven met intermitterende katheterisatie.

We willen erop wijzen dat we patiënten met klinische vragen altijd meteen terug naar hun zorgverlener verwijzen.

Hoe schrijft u uw patiënten in voor Coloplast Care?

U kunt uw patiënten inschrijven door ons inschrijvingsformulier voor zorgverleners in te vullen en terug te sturen, of uw patiënt kan zichzelf inschrijven:



Door te bellen naar onze Coloplast Care-adviseur: [0800-12888](tel:0800-12888)



Door naar onze website te surfen op www.katheter.coloplastcare.be

Een Coloplast Care-adviseur zal vervolgens contact opnemen met uw patiënt om de inschrijving te voltooien.

Opmerking: Vraag uw vertegenwoordiger om kopieën van de inschrijvingsformulieren voor zorgverleners.