

Filet de jambe Conveen

Pour un maintien sûr et confortable de la poche de jambe

- Réutilisable et lavable
- Disponibles en 3 tailles pour s'adapter au mieux à l'anatomie de chacun
- Sans latex ni autres substances toxiques

AquaSleeve[®]



Filet de jambe Conveen Aquasleeve

Pour un maintien sûr et confortable de la poche de jambe.

Placement du filet de jambe sur le mollet



1. Enfilez le filet du pied vers le mollet.

La partie supérieure du filet est reconnaissable grâce à sa bande de couleur.



2. Placez la poche de jambe à la moitié supérieure du filet et introduisez le tube du robinet de vidange dans l'ouverture du filet, située au milieu de la ligne rouge.



3. Rabattez la moitié inférieure du filet sur la poche de jambe.



4. La poche de jambe est maintenant fermement fixée.

Placement du filet de jambe sur la cuisse



1. Enfilez le filet du pied vers la cuisse.

La partie supérieure du filet est reconnaissable grâce à sa bande de couleur.



2. Placez la poche de jambe à la moitié supérieure du filet et introduisez le tube du robinet de vidange dans l'ouverture du filet, située au milieu de la ligne rouge.



3. Rabattez la moitié inférieure du filet sur la poche de jambe.



4. La poche de jambe est maintenant fermement fixée.

Références produit



Taille	Code couleur	Circonférence jambe	Référence	Code APB	Emballage
Standard	●	25 - 40 cm	783681	4419131	2 pièces/boîte
Medium	●	40 - 55 cm	783687	4419156	2 pièces/boîte
Large	●	55 - 70 cm	783695	4419149	2 pièces/boîte