

Conveen beenzakhouder

Voor een veilige en comfortabele ondersteuning van de beenzak

- Herbruikbaar en wasbaar
- Verkrijgbaar in 3 maten voor een optimale pasvorm
- Bevat geen latex of andere toxische stoffen

AquaSleeve®



Conveen Aquasleeve beenzakhouder

Voor een veilige en comfortabele ondersteuning van de beenzak.

Plaatsing van de beenzakhouder op de kuit



1. Steek uw voet door de beenzakhouder en trek hem aan als een sok - van de voet naar de kuit toe. Het bovenste deel van beenzakhouder is te herkennen aan de gekleurde band.



2. Plaats de beenzak in de bovenste helft van het netje en steek de slang van het aftapkraantje door de opening in het netje, in het midden van de rode lijn.



3. Vouw de onderste helft van het netje over de beenzak.



4. De beenzak is nu stevig bevestigd.

Plaatsing van de beenzakhouder op de dij



1. Steek je voet door de beenzakhouder en trek hem aan als een sok - van de voet naar de dij toe. Het bovenste deel van de beenzakhouder is te herkennen aan de gekleurde band.



2. Plaats de beenzak in de bovenste helft van het netje en steek de slang van het aftapkraantje door de opening in het netje, in het midden van de rode lijn.



3. Vouw de onderste helft van het netje over de beenzak.



4. De beenzak is nu stevig bevestigd.

Productreferenties



Maat	Kleurcode	Beenomtrek	Referentie	APB code	Verpakking
Standaard		25 - 40 cm	783681	4419131	2 stuks/doos
Medium		40 - 55 cm	783687	4419156	2 stuks/doos
Large		55 - 70 cm	783695	4419149	2 stuks/doos