

# Utiliser un étui pénien de manière optimale

Guide pour les professionnels de la santé

**Conveen® Optima**



**Conveen®**

Près de  
**40 ans** d'évolution technologique

des soignants...

Conveen Optima réduit  
la manutention des patients:  
**1 seul change par jour**

**Divise le temps  
de nursing par 4**  
vs protections  
absorbantes<sup>2</sup>

**Maîtrise  
des odeurs<sup>1</sup>**



**Plus hygiénique**  
que les protections  
absorbantes

**Simple à utiliser**  
au quotidien

# au bénéfice de *la qualité de vie...*

des patients et des aidants

**Absence de macération**  
et gestion des odeurs<sup>1</sup>

Gestion des  
pertes urinaires

**Une seule  
pose par jour**

Une **solution discrète**<sup>1</sup>  
qui apporte un confort de  
port\*

\* Poche avec un voile en non-tissé doux limitant le risque de transpiration

**Conveen Optima  
préféré aux  
protections  
absorbantes par 2  
hommes sur 3<sup>1</sup>**



Aide les patients  
à **retrouver  
confiance en eux**<sup>1</sup>

## Une solution complète pour les soins d'incontinence urinaire

L'étui pénien fait partie d'un système de recueil urinaire et offre une solution discrète et fiable à l'incontinence urinaire masculine.<sup>1</sup> Pour un résultat optimal, il doit être utilisé correctement.

Conveen® Optima est un étui pénien prêt à l'emploi, conçu pour améliorer la sécurité et la facilité d'emploi du dispositif par rapport aux plus anciennes versions. Cette brochure est un mode d'emploi pour une utilisation efficace des étuis péniers et systèmes collecteurs Conveen Optima. Vous trouverez également une rubrique avec les réponses aux questions les plus fréquentes.

1. Chartier-Kastler E. et al. Randomized, crossover study evaluating patient preference and the impact on quality of life of urisheaths vs. absorbent products in incontinent men. *BJU Int* 2011;108:241-247.

2. Kendek R et al., Etude comparative absorbant vs étuis péniers auto-adhésifs chez l'incontinent urinaire dans un service de neurologie. Congrès SIFUD, Mulhouse-1, 1995. 10 patients. Le nombre d'absorbants nécessaires étaient de 4/jour vs étui pénien/jour, soit un temps de nursing de 80 min/jour pour les absorbants vs 10 min/jour pour les étuis péniers.



# Le système collecteur Conveen® Optima

Conveen Optima a été conçu pour faciliter au maximum la vie des personnes incontinentes, dans un souci de confort et d'hygiène.

L'étui pénien Conveen Optima offre les avantages suivants :



## **Emballage pratique**

Emballage pratique et compact, facile à ouvrir et à emmener en toute discrétion.



## **Application facile**

Double languette de déroulement assurant une application facile et sûre.



## **Système anti-fuite**

Protection optimale contre les fuites grâce à la bague de connexion et au bulbe anti-coudage. La bague de connexion et l'embout strié assurent une fixation sûre et le bulbe anti-coudage prévient toute obstruction, assurant ainsi un écoulement constant de l'urine.



## **Port confortable**

Le PSX (composé silicóné) souple, perméable à l'air et respectueux de la peau garantit un confort optimal.



## **Adhésif équilibré**

L'adhésif GX équilibré assure un maintien optimal tout en respectant la peau.

## Choix de la taille de l'étui pénien

Pour garantir un ajustement sûr et confortable, Conveen® Optima est disponible en **six diamètres et deux longueurs différentes** : longueur standard (environ 8 cm) et une longueur plus courte (environ 5 cm).

### Longueur

Pour définir la longueur du pénis, mesurez celui-ci sur sa face inférieure. Vous pouvez pour cela utiliser la barre turquoise de la carte de mesure Conveen.

L'étui Conveen Optima de longueur standard ( $\geq 6$  cm) convient à la plupart des patients. Les patients avec un pénis plus court choisiront la longueur correspondante ( $< 6$  cm).




### Diamètre

Le pénis doit être mesuré **environ 1 cm à l'arrière du gland**. Si le pénis se situe entre deux diamètres de l'étui pénien, choisissez le plus petit.

Le **diamètre de l'étui pénien doit être défini pour chaque patient** à l'aide de la carte de mesure Conveen Optima (disponible sur simple demande).

**Définir la bonne taille de l'étui est essentiel pour le bon fonctionnement du système et le confort du patient.** Une taille inappropriée, trop grande ou trop petite, sera source de fuites et de gênes et générera également une charge supplémentaire de travail pour le soignant.

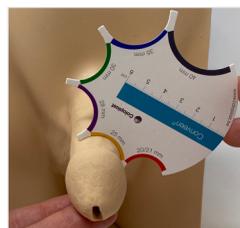

*Au début de l'utilisation d'étuis péniens chez un patient, il est conseillé d'assurer un suivi pendant 24 à 48h pour vérifier que la peau ne montre pas de réaction et que le patient ne rencontre pas d'autres problèmes.*

### Conveen Optima version standard

Diamètre	Référence	Code APB
25 mm	22025	2280-709
28 mm	22028	3314-242
30 mm	22030	2280-717
35 mm	22035	2280-725
40 mm	22040	2280-733



### Conveen Optima version courte

Diamètre	Référence	Code APB
21 mm	22121	2280-741
25 mm	22125	2280-758
30 mm	22130	2280-766
35 mm	22135	2280-774




État de la peau	Anatomie	Produit	
Normal	≥ 6 cm (standard)		Conveen® Optima
Normal	< 6 cm (court)		Conveen Optima version courte
Normal	< 6 cm (court)		Conveen Optima version courte & Conveen joint de fixation
Peau humide ou sèche	≥ 6 cm (standard)		Conveen Optima & Conveen Prep
Peau humide ou sèche	< 6 cm (court)		Conveen Optima version courte, Conveen Prep
Peau humide ou sèche	< 6 cm (court)		Conveen Optima version courte, Conveen Prep & Conveen joint de fixation

\***Conveen Prep** est une lingette imbibée d'un produit à appliquer sur la peau avant la pose de l'étui. Il permet d'en accroître l'adhésivité. Bien laisser sécher avant la pose de l'étui.



La carte de mesure  
Conveen,  
pour bien  
choisir la taille

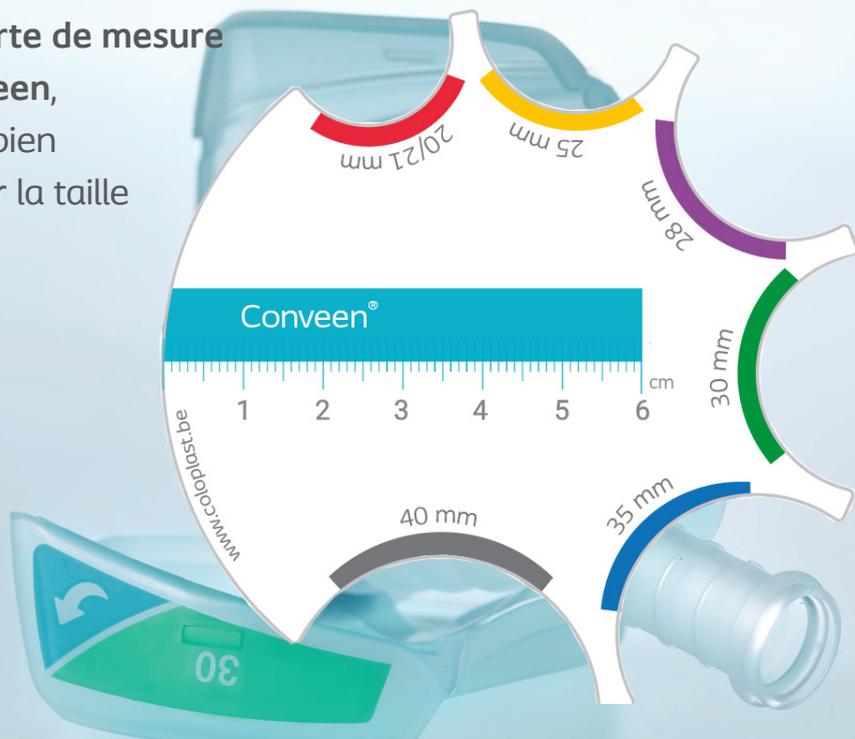

## Conseils d'utilisation

- **Conservation** : les étuis péniers Conveen Optima doivent être stockés à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- **Meilleure position pour déterminer la mesure** : le patient est de préférence assis, les jambes légèrement écartées, afin que le pénis et le scrotum se trouvent en position naturelle.
- **Meilleure position pour le placement** : tout dépend du type de patient. Suivez les directives applicables /bonnes pratiques locales.
- **Hommes non circoncis** : laissez le prépuce sur le gland. Maintenir la peau du prépuce en place à travers l'étui lors de son déroulement.
- **Poils pubiens** : coupez à l'aide d'une paire de ciseaux à pointes arrondies les poils à la base du pénis et si nécessaire les poils du scrotum ou tondez-les pour éviter qu'ils n'adhèrent à l'étui pénier. **Il est déconseillé de les raser car cela pourrait provoquer de petites lésions.**  
Vous pouvez également **faire écran avec une serviette ou un mouchoir en papier** :
  - > Découpez au centre du mouchoir un trou à travers lequel vous laissez passer le pénis
  - > Les poils pubiens peuvent être ainsi maintenus derrière le mouchoir
  - > Placez l'étui pénier et retirez le mouchoir.




- **Le patient peut vous aider** : même s'il n'est pas capable de placer seul l'étui pénien, il peut par exemple lui-même presser doucement l'étui pour s'assurer de sa bonne fixation.
- **Soin de la peau** : avant d'appliquer un nouvel étui pénien, il est conseillé d'effectuer une toilette intime une fois par jour avec un savon non gras. Si possible, laissez un peu respirer la peau avant de le placer.
- **Poches de recueil** : choisissez deux types de poches : une poche de petite capacité pour la journée et une poche de plus grande contenance avec un tube plus long pour la nuit (afin d'éviter de devoir vider la poche et limiter le risque de fuites).  
En cas d'utilisation avec une sonde à demeure, placez le connecteur de la poche de nuit dans le robinet de la poche de jour. Le système reste ainsi fermé et réduit le risque d'infection. Veillez à ce que le robinet de la poche de jour soit ouvert et que la poche de nuit se trouve plus bas pour un bon écoulement de l'urine.
- **Fixation de l'étui pénien** : au moment de fixer le tube de la poche de recueil à l'étui pénien, assurez-vous qu'il y ait un peu d'air dans la poche pour éviter tout effet de mise sous vide de la poche. Ceci pourrait provoquer un reflux d'urine et des fuites.

## *Décider qui fait quoi*



L'aide dont le patient a besoin pour placer et remplacer l'étui pénien varie d'une personne à l'autre. Certains patients sont rapidement autonomes et n'ont plus besoin d'aide après le choix de la mesure et quelques démonstrations. D'autres en revanche auront besoin d'une assistance complète. Il est important que vous adaptiez votre niveau d'aide aux capacités du patient et que vous le laissiez faire le plus possible par lui-même.


## Mode d'emploi

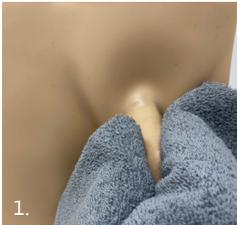

1. Avant le placement : lavez le pénis à l'eau et au savon neutre non gras. N'utilisez pas de talc ou de crèmes qui peuvent empêcher la bonne adhérence de l'étui pénien Conveen Optima.  
Si l'étui pénien Conveen Optima est posé par le conjoint ou le personnel soignant, ceux-ci peuvent porter des gants.



2. Séchez soigneusement le pénis. Si nécessaire, coupez les poils pubiens à l'aide d'une paire de ciseaux ou tondez-les. Il est déconseillé de les raser car cela pourrait provoquer de petites lésions.

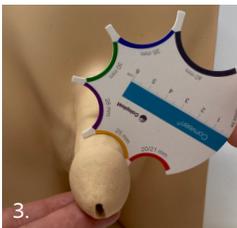

3. Si vous ne connaissez pas encore la bonne taille, mesurez le pénis en son milieu à l'aide du mesureur Conveen. Tant la prise de mesure que le placement se font avec le pénis au repos (donc pas en érection).  
Si le pénis a tendance à rentrer dans le ventre, placez-vous en position debout ou couchée et utilisez un étui pénien Conveen Optima version plus courte. Si vous hésitez entre deux tailles, essayez d'abord la plus petite.



4. Laissez le prépuce sur le gland. Placez l'étui pénien Conveen Optima sur le pénis et tenez-le d'une main. Laissez  $\pm$  1cm entre le gland et le système anti-coudage.



5. De l'autre main, déroulez délicatement la languette vers le pubis afin que l'étui pénien Conveen Optima soit positionné de manière uniforme. Si vous avez utilisé la bonne taille, il n'y aura pas de bulles ou de plis après avoir déroulé l'étui pénien Conveen Optima correctement. Exercez une pression délicate sur l'étui pénien Conveen Optima pour assurer une bonne adhérence à la peau. Chaque étui pénien Conveen Optima est à usage unique et doit être utilisé pendant maximum 24 heures.



6. Si vous avez toutefois besoin d'un plus grand pouvoir adhésif, vous pouvez utiliser les lingettes Conveen Prep. Appliquez Conveen Prep sur le pénis, attendez un peu jusqu'à ce que la couche de Conveen Prep soit sèche et placez ensuite l'étui pénien. Si votre peau est sèche ou sensible et doit être protégée, utilisez le Brava Skin Barrier Spray de la même manière.



7. Découpez le tube de la poche de jambe à l'aide d'une paire de ciseaux pour obtenir la longueur souhaitée. Vous éviterez ainsi la formation de coudes, le reflux de l'urine dans l'étui pénien Conveen Optima et le détachement de l'étui pénien. Fixez fermement le connecteur dans la partie non annelée du tube de la poche de jambe.



8. Connectez l'étui pénien Conveen Optima à la poche à urine (poche de jambe ou poche de nuit) en insérant fermement le connecteur de la poche à urine dans la tubulure de sortie de l'étui. L'extrémité du Conveen Optima est pourvue d'un « sure grip » (prise fixe) et d'une bague de connexion sur la tubulure afin de faciliter le raccordement de la tubulure de l'étui pénien Conveen Optima à la poche à urine. Pour une connexion étanche, veillez à enfoncer le connecteur de la poche à urine le plus loin possible dans la tubulure.



9. Les 2 boutons de l'attache de jambe la plus large sont fixés au-dessus dans les 2 ouvertures de la poche de jambe Conveen. De la même manière, fixez l'attache de jambe la plus étroite en-dessous de la poche de jambe avec les boutons vers l'extérieur. La longueur des attaches peut être adaptée au tour de jambe en les découpant à l'aide d'une paire de ciseaux. La poche de nuit est fixée sur le côté du lit au moyen d'une attache de lit (à hauteur des jambes).



10. Pour plus de sécurité et garantir un bon écoulement de l'urine, vous pouvez utiliser la sangle Conveen G-strap. Fixez la sangle sur votre cuisse, avec l'étiquette Coloplast vers l'extérieur, et placez le tube sur la bandelette en caoutchouc. Enroulez la bandelette autour et sous le tube et tirez l'extrémité libre dans la fente jusqu'à ce que le tube tienne bien en place. Pressez bien la fixation Velcro sur le Conveen G-strap.

Attention : le tube ne doit pas être trop serré pour ne pas gêner l'écoulement d'urine.



11. Pour retirer l'étui: déconnectez la poche à urine et enroulez délicatement l'étui pénien Conveen Optima. Si nécessaire, utilisez de l'eau tiède pour faciliter la manipulation ou encore le Brava Remover Spray. Vaporisez le Brava Remover Spray entre l'étui Conveen Optima et la peau, attendez un peu et l'étui pénien se décollera plus facilement.

Visionnez les modes d'emploi animés en scannant les codes QR ci-dessous:



# En cas de problèmes de fixation



Le joint de fixation Conveen est une bandelette élastique qui permet de renforcer la fixation des étuis péniens tout en protégeant la peau.

Le joint est particulièrement indiqué en cas de pénis rétracté ou en cas de fuites.



1. Au préalable, coupez ou tondez les poils de la zone pubienne pour éviter que ceux-ci n'adhèrent à l'étui ou au joint. Ouvrez l'emballage du joint et ôtez les deux films de protection.



2. Appliquez le joint à l'arrière du gland. Il n'est pas nécessaire de couper le joint sur mesure. Les extrémités du joint peuvent se chevaucher sans problème. Cela renforce encore son maintien.



3. Placez l'étui pévien sur le pénis en laissant un espace (1cm) entre le gland et le système anti-coudage (accordéon).



4. Déroulez doucement l'étui à l'aide de la languette pour le positionner de manière homogène sur le pénis et au-dessus du joint de fixation. Si vous utilisez la bonne taille, il n'y aura pas de plis. Serrez légèrement l'étui ainsi placé pour assurer sa bonne fixation. Connectez ensuite l'étui à une poche à urine.



5. Pour retirer l'étui, déconnectez-le de la poche à urine et enroulez-le délicatement sur lui-même. Le joint de fixation se détachera en même temps. Si nécessaire, utilisez de l'eau chaude pour faciliter le processus ou utilisez le spray Brava Adhesive Remover.

## Questions fréquentes

S'il est utilisé correctement, l'étui pénien Conveen® Optima est extrêmement fiable et pose rarement problème. Les éventuels problèmes sont faciles à résoudre en vérifiant si les instructions ont bien été exécutées comme décrites dans cette brochure.

Conveen Optima offre une solution discrète et efficace à l'incontinence urinaire masculine<sup>2</sup> et permet aux utilisateurs de poursuivre leurs activités quotidiennes. En suivant attentivement les instructions de placement et remplacement ou en aidant vos patients à y arriver, vous pouvez garantir le fonctionnement optimal de l'étui pénien et le confort du patient.

2. Chartier-Kastler E. et al. Randomized, crossover study evaluating patient preference and the impact on quality of life of urisheaths vs. absorbent products in incontinent men. *BJU Int* 2011;108:241-247



Problème	Solution
L'urine ne s'écoule pas correctement dans la poche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que le pénis soit trop près de la sortie de l'étui pénien, gênant le bon écoulement de l'urine. Veillez à laisser 1 à 2 cm entre le pénis et l'extrémité de l'étui.</li> <li>• Vérifiez que la taille de l'étui pénien ne soit pas trop étroite. Cela pourrait comprimer l'urètre et entraver l'écoulement de l'urine.</li> <li>• Fixez le tube en ligne droite sur la jambe pour éviter tout cou dage du tube de la poche d'urine.</li> </ul>
Reflux de l'urine et/ou accidents	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veillez à ce qu'il y ait un peu d'air dans la poche au moment de fixer l'étui pénien au tube de la poche de recueil ; cela empêche un vide d'air qui provoquerait reflux et fuites.</li> <li>• La poche de recueil doit être régulièrement vidée: dès qu'elle est à moitié pleine.</li> </ul>
Devoir se lever la nuit pour vider la poche aux toilettes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour la nuit, optez pour une poche de nuit de plus grande capacité (2 L) et munie d'un plus long tube pour davantage de confort et de tranquillité.</li> </ul>
Difficultés à détacher l'étui pénien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enroulez quelques instants un gant de toilette chaud et humide autour du pénis avant de détacher l'étui pénien.</li> <li>• Soulevez et tirez délicatement le bord de l'étui en direction du ventre pour introduire de l'air sous l'adhésif. L'étui se détachera ainsi progressivement. Vous pouvez également utiliser le Brava Remover Spray.</li> </ul>
L'étui pénien se plisse quand on le déroule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez une plus petite taille d'étui pénien.</li> </ul>
L'étui pénien descend quand le patient se déplace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déroulez complètement l'étui pénien pendant la pose, pour que la bande adhésive adhère bien.</li> <li>• Vérifiez que la bonne taille soit utilisée.</li> <li>• La peau était peut-être humide lorsque l'étui pénien a été placé. L'utilisation d'un film protecteur comme Conveen® Prep peut contribuer à garder la peau sèche.</li> </ul>
Les poils pubiens adhérent à l'étui pénien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tondez ou coupez les poils à la base du pénis à l'aide d'une paire de ciseaux à pointes arrondies ou faites 'écran' avec une serviette ou un mouchoir en papier pour écarter les poils.</li> </ul>
Infection des voies urinaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veillez à une bonne hygiène ; informez le patient des causes d'infections urinaires et comment les prévenir.</li> <li>• Vérifiez que le patient boive suffisamment.</li> <li>• Vérifiez que l'étui pénien soit remplacé toutes les 24 heures.</li> </ul>

## Poches à urine de jour

Les poches à urine permettent de recueillir l'urine collectée via un étui pénien, une sonde à demeure, une sonde suprapubique ou une sonde pour néphrostomie.

Toutes nos poches sont munies d'un connecteur.



### Conveen Security+

Tubulure anti-coudage, fermeture par clapet, valve anti-reflux, voile non-tissé



Capacité	Tube	Version	Emballage	Réf.	Code APB
350 ml	50 cm	non stérile	20 pièces/boîte	5165	1434-448
500 ml	50 cm	non stérile	20 pièces/boîte	5161	1193-259
750 ml	50 cm	non stérile	20 pièces/boîte	5167	1434-455
500 ml	50 cm	stérile	10 pièces/boîte	5163	3565-884

### Conveen Contour

Poche multi-compartiments, fermeture par clapet, valve anti-reflux, voile non-tissé



Capacité	Tube	Version	Emballage	Réf.	Code APB
600 ml	45 cm	non stérile	20 pièces/boîte	5170	0680-389
800 ml	45 cm	non stérile	20 pièces/boîte	5174	0680-397
800 ml	65 cm	non stérile	20 pièces/boîte	5176	1182-245

### Conveen Active

Poche avec attache intégrée



Capacité	Tube	Version	Emballage	Réf.	Code APB
250 ml	7 cm	non stérile	10 pièces/boîte	25501	2745-628

### Conveen Standard

Tube de 90 cm non découpable, fermeture par clapet, valve anti-reflux, voile non-tissé et port de prélèvement.



Capacité	Tube	Version	Emballage	Réf.	Code APB
1500 ml	90 cm	stérile	10 pièces/boîte	5063	4271-888

# Poches à urine de nuit



## Conveen Basic

Tube de 100 cm non découpable, robinet en croix, valve anti-reflux.



Capacité	Tube	Version	Emballage	Réf.	Code APB
2000 ml	100 cm	non stérile	10 pièces/boîte	218040	2745-636

## Conveen Security+

Tube anti-coudage de 140 cm découpable, robinet coulissant, valve anti-reflux.



Capacité	Tube	Version	Emballage	Réf.	Code APB
2000 ml	140 cm	non stérile	20 pièces/boîte	21346	1591-734

## Conveen Standard

Tube de 90 cm découpable, fermeture par clapet, valve anti-reflux.



Capacité	Tube	Version	Emballage	Réf.	Code APB
1500 ml	90 cm	non stérile	20 pièces/boîte	5062	0680-371

## Accessoires



### Protection de la peau Skin Barrier Spray Brava

Film protecteur pour les peaux sensibles. Sans alcool.  
Réf. 12020 – 50 ml - Code APB: 2765-956



### Adhésion renforcée Conveen Prep

Pour une adhérence accrue et une meilleure protection cutanée (ne pas utiliser en cas de peau sensible ou irritée).  
Ref. 62042 – 54 pièces/boîte – Code APB: 2775-914



### Fixation renforcée (pénis rétracté ou fuites) Joint de fixation Conveen

Pour renforcer la fixation des étuis péniers tout en protégeant la peau. Très souple, absorbe l'humidité, matériau hypoallergénique.  
Réf. 5100 – 20 pièces/sachet - Code APB: 4179-636



### Fixation du tube sur la cuisse Conveen G-strap

Fixe le tube de la poche à urine ou de la sonde à demeure le long de la jambe.  
Réf. 383001 – 50 cm - Code APB: 2890-994  
Réf. 383003 - 90 cm - Code APB: 4137-154



### Fixation de la poche sur la jambe Conveen Aquasleeve

Pour un maintien sûr et confortable de la poche de jambe.  
Réf. 783681– Standard - Code APB: 4419-131  
Réf. 783687 - Medium - Code APB: 4419-156  
Réf. 783695 - Large - Code APB: 4419-149



### Retrait indolore Adhesive Remover Spray Brava

Facilite le retrait de l'étui pénien.  
Réf. 12010 – 50 ml - Code APB: 2765-998

# Pack Conveen Optima

## Le Pack qui comprend tout

Tous les produits d'une **dotation de 3 mois pour l'incontinence urinaire masculine et des produits gratuits en plus.**

### Dotation de base pour 3 mois:

- 90 étuis péniens Conveen Optima
- 20 poches à urine de jambe: Conveen Security+ 500 ml
- 20 poches à urine de nuit avec attache de lit: Conveen Security+ Nightbag 2 l
- 1 forfait de protection de la peau: 2 x 54 lingettes Conveen Prep



### Contenu du Pack Conveen:

	Etuis péniens Conveen Optima	90 + 6 gratuits
	Poches à urine de jambe Conveen Security+ 500 ml	20 pièces
	Poches à urine de nuit <b>Conveen Security+ Night Bag 2000 ml</b>	20 pièces
	Lingettes Conveen Prep	108 pièces
	Attache de lit Conveen	1 pièce
	Sangle Conveen G-strap	1 pièce gratuite

Plus d'information sur la page:


[www.packconveenoptima.be](http://www.packconveenoptima.be)



# Conveen® Optima

## Choisir le système collecteur Conveen\* adapté à votre patient

1) Déterminer la morphologie du patient en définissant la longueur et le diamètre à l'aide de la carte de mesure

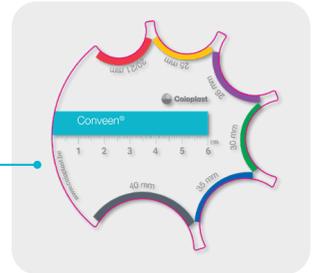

2) Choisir l'étui Conveen Optima

90 éuits péniens / 3 mois\*

Version	Longueur	Diamètre
Version standard 8 cm		● 25 ● 28 ● 30 ● 35 ● 40

Version	Longueur	Diamètre
Version courte 5 cm		● 21 ● 25 ● 30 ● 35

### Poche de jour Conveen



**Légère à modérée** ●  
(<250 ml)  
Conveen Active




**Sévère** ●●●  
(>600 ml)  
Conveen Security+  
ou Conveen Contour



**Modérée** ●●  
(350 à 600 ml)  
Conveen Sec+ ou  
Conveen Contour

20 poches de jour / 3 mois\*

### Poche de nuit Conveen

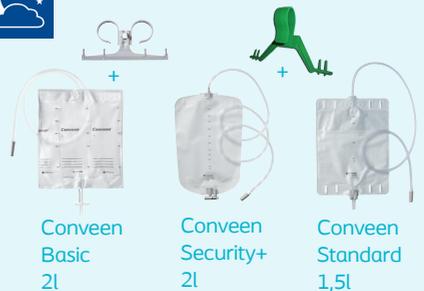

Conveen  
Basic  
2l

Conveen  
Security+  
2l

Conveen  
Standard  
1,5l

20 poches de nuit / 3 mois\*

\* Système repris sur la liste des produits admis au remboursement en matière d'incontinence (art. 27, nomenclature bandagisterie).

1. Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Randomized, crossover study evaluating patient preference and the impact on quality of life of urisheaths vs absorbent products in incontinent men. 58 hommes incontinents urinaires. Critère principal: qualité de vie.  
2. Kendek R et al., Etude comparative absorbant vs étuis péniens auto-adhésifs chez l'incontinent urinaire dans un service de neurologie. Congrès SIFUD, Mulhouse-1, 1995. 10 patients. Le nombre d'absorbants nécessaires étaient de 4/jour vs étui péniens/jour, soit un temps de nursing de 80 min/jour pour les absorbants vs 10 min/jour pour les étuis péniens