

Een condoomkatheter optimaal gebruiken

Handleiding voor professionals

Conveen® Optima



Conveen®

Meer dan 40 jaar technologische evolutie

...van de zorgverleners

Conveen vermindert het
aantal verzorgingen:
slechts 1 wissel per dag

**Tot 4x minder
tijd nodig**

voor de verzorging in
vergelijking met
absorberende
hulpmiddelen²

**Minder
geurtjes¹**



Hygiënischer
dan absorberende
verbanden

**Eenvoudig
in gebruik**
elke dag opnieuw

voor een betere *levenskwaliteit*...

...van patiënten en mantelzorgers

Geen maceratie
en minder geurtjes¹

Urinelekken
onder controle

Slechts **één**
keer per dag
aan te brengen



Conveen Optima wordt
verkozen
**boven absorberende
verbanden**
door 2 op 3 mannen¹

Een **discrete**¹ oplossing
aangenaam om te dragen*

Helpt patiënten hun
zelfvertrouwen
terug te winnen¹

* Zak met een niet-geweven bekleding die het risico op transpiratie beperkt

De beste incontinentiezorg bieden

De condoomkatheter is een onderdeel van een urineopvangsysteem en vormt een discrete en betrouwbare oplossing bij mannelijke urine-incontinentie.¹ Voor een optimaal resultaat moet hij echter correct gebruikt worden.

Conveen® Optima is een eendelige condoomkatheter die ontworpen is om de veiligheid en het gebruiksgemak te vergroten in vergelijking met oudere types van condoomkatheters. Deze brochure is een handleiding over het efficiënte gebruik van de Conveen Optima condoomkatheters en opvangsystemen. Daarnaast bevat ze diverse tips om eventuele problemen snel op te lossen.

1. Chartier-Kastler E. et al. Randomized, crossover study evaluating patient preference and the impact on quality of life of urisheaths vs. absorbent products in incontinent men. *BJU Int* 2011;108:241-247.

2. Kendek R et al.,. Vergelijkende studie tussen absorberende hulpmiddelen en zelfklevende condoomkatheters bij urine-incontinentie op een neurologische afdeling. SIFUD-congres, Mulhouse-1, 1995. 10 patiënten. Per dag waren 4 absorberende verbanden nodig versus 1 condoomkatheter. Dit betekent een verpleegtijd van 80 minuten per dag voor de inlegverbanden tegen 10 minuten per dag voor de condoomkatheters



Het Conveen[®] Optima opvangsysteem

Conveen Optima is ontworpen om het leven met incontinentie zo vlot mogelijk te laten verlopen door de waardigheid, de mannelijkheid en het gevoel van controle van uw patiënten te ondersteunen.

De Conveen Optima condoomkatheter biedt de volgende voordelen:



Smart pack

De Conveen Optima condoomkatheter is verpakt in een compact, discreet doosje.



Eenvoudig aanbrengen

De dubbele afrolstrip zorgt voor een eenvoudige en soepele aanbrenging.



Anti-leksysteem

Anti-lek oplossingen zoals het anti-knikreservoir gaan blokkering tegen.



Draagcomfort

De elastische en ademende silicone garandeert een perfecte pasvorm.



Evenwichtige kleefstof

Conveen Optima gebruikt een evenwichtige kleefstof die betrouwbaar en huidvriendelijk is.


Initiële maatbepaling

Om een comfortabele en veilige pasvorm te verzekeren, is Conveen® Optima verkrijgbaar in **zes verschillende maten** en **twee verschillende lengtes**: een standaardlengte (ongeveer 7 cm) en een kortere lengte (ongeveer 4 cm).

Lengte

Om de juiste lengte van de penis te kennen, meet u de penis het best aan de onderkant. Hiervoor kan u de blauwe balk op het maatkaartje gebruiken.


De Conveen Optima met standaardlengte (≥ 6 cm) is geschikt voor de meeste patiënten met een niet-ingetrokken penis; patiënten met een ingetrokken penis nemen de kortere lengte (< 6 cm).

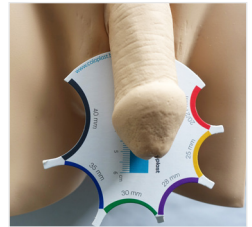

Maat

De penisschacht moet ongeveer 1 cm achter de eikel gemeten worden. Als de penis tussen twee maten van de condoomkatheter in zit, moet de kleinere maat gekozen worden.

De juiste maat van de condoomkatheter moet voor elke patiënt met behulp van het Conveen meetkaartje bepaald worden.

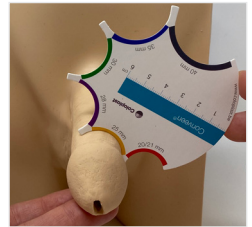

De maat bij benadering bepalen of dezelfde maat kiezen als van het merk dat de patiënt vroeger gebruikte, is niet nauwkeurig. Een slechte maat kan immers leiden tot ongemak en lekkage.

Na de initiële maatbepaling moet de patiënt binnen 24-48 uur een follow-up krijgen om te verifiëren dat de huid niet rood wordt en er geen andere problemen optreden.

Conveen Optima standaardlengte







Diameter	Referentie	APB-code
25 mm	22025	2280-709
28 mm	22028	3314-242
30 mm	22030	2280-717
35 mm	22035	2280-725
40 mm	22040	2280-733



Conveen Optima kortere lengte

Diameter	Referentie	APB-code
21 mm	22121	2280-741
25 mm	22125	2280-758
30 mm	22130	2280-766
35 mm	22135	2280-774




Toestand van de huid	Lengte penis	Product	
Normaal	≥ 6 cm (standaard)		Conveen® Optima
Normaal	≥ 6 cm (kort)		Conveen Optima kortere lengte
Normaal	< 6 cm (kort)		Conveen Optima kortere lengte & Conveen fixeersstrip
Vochtige of droge huid	≥ 6 cm (standaard)		Conveen Optima & Conveen Prep*
Vochtige of droge huid	< 6 cm (kort)		Conveen Optima kortere lengte, Conveen Prep*
Vochtige of droge huid	< 6 cm (kort)		Conveen Optima kortere lengte, Conveen Prep* & Conveen fixeersstrip

*Conveen Prep is een beschermende film. Breng voor extra veiligheid de Conveen Prep beschermende film aan op de basis van de penis alvorens de condoomkatheter aan te brengen.



Het *Conveen meetkaartje*, onmisbaar bij het bepalen van de juiste maat

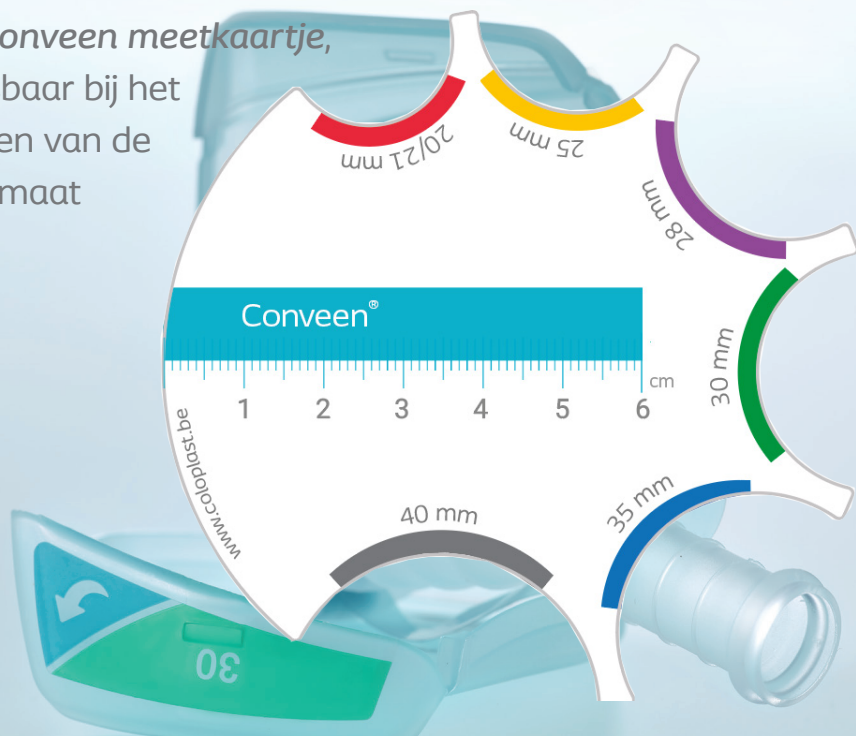

Tips voor een optimaal resultaat

- **Bewaren:** bewaar Conveen® Optima koel, beschermd tegen de zon.
- **Beste positie voor het bepalen van de maat:** de patiënt gaat het best zitten met de benen lichtjes uit elkaar, zodat de penis en het scrotum zich in een natuurlijke positie bevinden.
- **Beste positie voor het aanbrengen:** dat hangt af van het type patiënt. Volg de plaatselijke richtlijnen.
- **Onbesneden mannen:** zorg ervoor dat de voorhuid over de eikel zit. Dat voorkomt verkleving of trekken van losse huid.
- **Schaamhaar:** knip met een schaar met ronde punten het haar aan de basis van de penis bij om te voorkomen dat het in de condoomkatheter kleeft (scheer het niet weg, want als het teruggroeit, kan dat irritatie veroorzaken). U kunt ook een 'scherm' maken met een papieren doekje of tissue:
 - > Plooi het doekje of de tissue in twee en maak een klein scheurtje in het middelpunt.
 - > Vouw het doekje open en haal de penis door het gat in het midden. Duw het schaamhaar daarbij achteruit.
 - > Verwijder het doekje als de condoomkatheter aangebracht is.




- **Moedig de patiënt aan tot actie:** zelfs als de patiënt niet in staat is om de condoomkatheter alleen aan te brengen, zijn er bepaalde dingen waarbij hij kan helpen, zoals met één hand zachtjes de zelfklevende band aandrukken, zodat de condoomkatheter goed aansluit.
- **Huidverzorging:** laat de huid indien mogelijk een tijdje ademen alvorens een nieuwe condoomkatheter aan te brengen.
- **Opvangzakken:** kies verschillende opvangzakken voor overdag en 's nachts: met een kleinere inhoud voor overdag, en een grotere inhoud en een langere slang voor 's nachts (om te vermijden dat de zak 's nachts geledigd moet worden en om het risico op ongelukjes te beperken). Indien uw patiënt momenteel een verblijfsonde heeft, kunt u de dagzak doorkoppelen aan de nachtzak. (Connector van de nachtzak in de opening onderaan van de dagzak steken). Zo blijft het systeem gesloten en is het infectiegevaar kleiner. Zorg dat de nachtzak zich lager bevindt zodat de urine goed kan aflopen.
Volg hier de richtlijnen van de arts
- **Bevestiging van de condoomkatheter:** bij het bevestigen van de condoomkatheter aan de slang van de opvangzak, moet er een beetje lucht in de zak zitten (dit voorkomt een vacuüm, dat terugvloeiën van urine en lekken kan veroorzaken).

Beslissen wie wat doet



Hoeveel hulp de patiënt nodig heeft om de condoomkatheter aan te brengen en te vervangen, is voor iedereen verschillend. Sommige patiënten hebben geen hulp nodig na de initiële maatbepaling/aanbrenging, andere hebben volledige bijstand nodig. Het is belangrijk dat u de mate van hulp aanpast aan het vermogen van de patiënt en dat u hem altijd zo veel mogelijk zelf laat doen.


Gebruiksaanwijzing

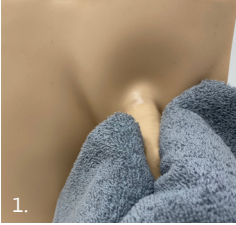


1. Vóór het aanbrengen: reinig de penis met water en een neutrale, niet vette zeep. Gebruik geen talk of crèmes, die kunnen er immers voor zorgen dat de Conveen Optima condoomkatheter niet goed kleeft. Indien de Conveen Optima condoomkatheter door een partner of verzorger wordt aangebracht, kan deze handschoenen dragen.



2. Droog de penis nadien goed af. Knip indien nodig de schaamhaartjes wat bij. Scheren kan kleine wondjes veroorzaken en is dus niet aangeraden.

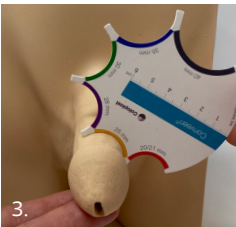

3. Indien u de juiste maat nog niet kent, neem dan de maat in het midden en zijdelings van de penis met behulp van het Conveen meetkaartje. Zowel de maat nemen als het aanbrengen, gebeurt met de penis in rusttoestand (dus geen erectie). Als de penis in de buik trekt – ga dan rechtstaan of liggen bij het aanbrengen en gebruik een Conveen Optima condoomkatheter met een verkorte schacht. Indien u twijfelt tussen twee maten, probeert u eerst de kleinste maat.

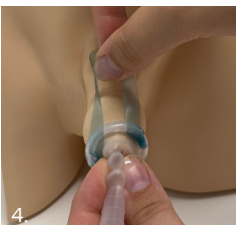


4. Zorg ervoor dat de voorhuid over de eikel zit. Plaats de Conveen Optima condoomkatheter op de penis en houd hem met een hand vast. Laat ± 1 cm ruimte tussen de eikel en het anti-kniksysteem.



5. Trek met uw andere hand langzaam de strip naar u toe, zodat de Conveen Optima condoomkatheter gelijkmatig afrolt. Als u de correcte maat heeft gebruikt, zijn er na het afrollen van de Conveen Optima condoomkatheter geen ribbels of plooien. Druk kort en zachtjes op de Conveen Optima condoomkatheter zodat deze goed kleeft op de huid. Een Conveen Optima condoomkatheter kan maximaal 24u gebruikt worden en kan niet herbruikt worden.



6. Indien u toch nog extra kleefkracht nodig heeft, kunt u Conveen Prep gebruiken. Breng de Conveen Prep aan op de huid van de penis, wacht even tot de huid gedroogd is en breng dan de condoomkatheter aan. Indien u een gevoelige of droge huid heeft, die u extra wil beschermen, kunt u de Brava Skin Barrier Spray op dezelfde manier gebruiken.

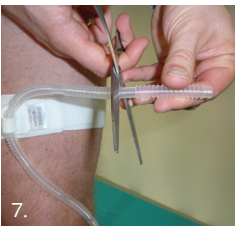


7. De slang van de dagzak wordt met een schaar ingekort om de gewenste lengte te verkrijgen. Zo vermijdt u knikvorming van de slang, het terugvloeien van de urine naar de Conveen Optima condoomkatheter en het loskomen van de condoomkatheter. Steek de connector stevig in het niet-geribbelde gedeelte van de slang van de urinebeenzak.



8. Bevestig een urineopvangzak (been- of nachtzak) aan de Conveen Optima condoomkatheter door de urinezakconnector in de tip van de Conveen Optima condoomkatheter te duwen. Het uiteinde van de Conveen Optima heeft een "sure grip" (vaste greep) en een aansluiting op de tip zodanig dat u de tip van de Conveen Optima condoomkatheter gemakkelijker kunt vasthouden bij het bevestigen aan de urinezak. Duw het verbindingstukje van de urineopvangzak ver genoeg in de tip van de condoomkatheter om een goede verbinding te verzekeren en zo lekkage te voorkomen.



9. De 2 knopen van het breedste beenriempje worden bovenaan in de 2 openingen van de beenzak aangebracht. Op dezelfde manier wordt het smalle beenriempje onderaan de beenzak aangebracht. De lengte van de beenriempjes wordt op maat van de omtrek van het been geknipt. De nachtzak wordt door middel van een bedhaak aan de zijkant van het bed gehangen (ter hoogte van de onderbenen).

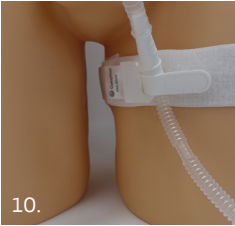

10. Voor extra veiligheid en om een goede afloop van de urine te garanderen, kunt u de Conveen G-strap gebruiken. Bevestig de G-strap op uw bovenbeen met het Coloplast etiket naar de buitenkant en plaats de tube op het rubberen bandje. Wikkel het bandje rond en onder de tube en trek het vrije uiteinde door de gleuf tot de tube goed vastzit. Druk de velcrobevestiging vast op de Conveen G-strap (Opgelet - de tube mag niet té strak bevestigd worden om de urinestroom niet te belemmeren).



11. Om te verwijderen: koppel de urinezak los en rol de Conveen Optima condoomkatheter voorzichtig terug. Indien nodig kan lauw water gebruikt worden om dit te vergemakkelijken of u kunt gebruik maken van de Brava Remover Spray. Spuit de Brava Remover Spray tussen de Conveen Optima en de huid, even wachten en de condoomkatheter komt los.


Bekijk de instructiefilmpjes door de QR-code te scannen:



Voor extra fixatie



De **Conveen fixeerstrip** is een huidvriendelijk elastisch bandje, dat zorgt voor een betere hechting van de condoomkatheter aan de penis. De fixeerstrip is vooral geschikt voor mannen die een **ingetrokken penis** hebben of mannen die al een condoomkatheter gebruiken en toch **last hebben van lekken**.

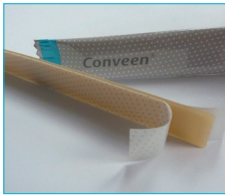

1. Vooreerst: knip met een schaar met ronde punten het haar aan de basis van de penis bij om te voorkomen dat het in de condoomkatheter of in de fixeerstrip kleeft. Open de verpakking van de fixeerstrip en verwijder de twee beschermfilms.




2. Breng de fixeerstrip aan achter de eikel. Het is niet nodig om de fixeerstrip in te korten, de uiteinden kunnen op elkaar gekleefd worden, dit versterkt de hechting.



3. Plaats de condoomkatheter op de penis en laat 1 cm tussen de eikel en het anti-kniksysteem van de condoomkatheter (accordeon-achtig gedeelte).



4. Rol de condoomkatheter zachtjes af met behulp van de afrolstrip zodat hij op een gelijkmatige manier op de penis bevestigd wordt. Indien u de juiste maat gebruikt, zullen er geen plooien zijn. Druk de condoomkatheter nog even licht aan om een goede hechting te bekomen. Connecteer de condoomkatheter dan aan de urinezak.

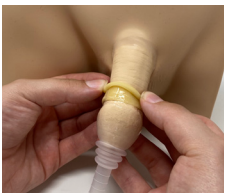

5. Om de condoomkatheter te verwijderen, verwijder eerst de urinezak en rol de condoomkatheter op. De fixeerstrip zal vanzelf meekomen. Om de condoomkatheter gemakkelijker te verwijderen, kunt u warm water of de Brava Adhesive Remover gebruiken.

Problemen oplossen

Bij correct gebruik is de Conveen® Optima condoomkatheter uiterst betrouwbaar en doen er zich zelden problemen voor. Eventuele problemen zijn makkelijk op te lossen door na te kijken of de instructies goed uitgevoerd werden en/of door de stappen op de volgende bladzijde te volgen.

Conveen Optima biedt een discrete en doeltreffende oplossing voor mannelijke urine-incontinentie² en stelt gebruikers in staat om hun gewone dagelijkse activiteiten met minimale hinder voort te zetten. Door de richtlijnen voor het aanbrengen en het vervangen zorgvuldig te volgen, of uw patiënten te helpen om dat te doen, haalt uw patiënt maximaal voordeel uit deze doeltreffende incontinentieoplossing.

2. Chartier-Kastler E. et al. Randomized, crossover study evaluating patient preference and the impact on quality of life of urisheaths vs. absorbent products in incontinent men. BJU Int 2011;108:241-247



Probleem	Oplossing
De urine loopt niet gelijkmatig in de urineopvangzak	<ul style="list-style-type: none"> • Mogelijk zit het smalle uitgangsbuisje van de condoomkatheter te dicht bij de penis, waardoor de urine niet goed afvloeit. Zorg voor een ruimte van 1 tot 2 cm tussen het uiteinde van de penis en de afvoeropening van de condoomkatheter. • Controleer of de condoomkatheter niet te nauw is, want dat kan de urinebuis samendrukken en de urinestroom belemmeren. • Bevestig/kleef de slang in een rechte lijn op het been zodat er geen knikken in de slang van de urineopvangzak zitten. • Kies een opvangzak met een antiknikslang, zodat de urine gelijkmatig kan stromen.
Terugvloeien van urine en/of ongelukjes	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat er een beetje lucht in de zak zit bij het bevestigen van de condoomkatheter aan de slang van de opvangzak; dit voorkomt een vacuüm, dat terugvloeien van urine en lekken kan veroorzaken. • De beenopvangzak moet regelmatig worden geledigd, wanneer hij iets meer dan halfvol is.
's Nachts moeten opstaan om de zak te ledigen in het toilet	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik 's nachts een zak met een grotere inhoud (2L) en een langere slang (een nachtzak voor bevestiging aan het bed).
Moeilijkheden om de condoomkatheter los te maken	<ul style="list-style-type: none"> • Wikkel enkele ogenblikken een warm, vochtig washandje rond de penis alvorens de condoomkatheter af te rollen. • Trek de condoomkatheter naar het lichaam toe om lucht onder de kleefstof te brengen. Doe dit beetje bij beetje rond de penis en de kleefstof zal loskomen. U kunt ook de Brava Remover Spray gebruiken.
De condoomkatheter rimpelt bij het aanbrengen	<ul style="list-style-type: none"> • Probeer een kleinere maat condoomkatheter.
De condoomkatheter zakt af als de patiënt rondloopt	<ul style="list-style-type: none"> • Rol de condoomkatheter tijdens het aanbrengen volledig af, zodat de kleefband goed kan hechten. • Controleer of de juiste maat condoomkatheter wordt gebruikt. • Misschien was de huid vochtig toen de condoomkatheter werd aangebracht. Een beschermende film zoals Conveen® Prep gebruiken kan helpen om de huid droog te houden.
Schaamhaar kleeft in de condoomkatheter	<ul style="list-style-type: none"> • Knip het haar aan de basis van de penis bij met een schaar met ronde punten of maak een 'scherm' met een papieren doekje of tissue om het haar opzij te houden.
Urineweginfectie	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg voor een goede hygiëne; licht de patiënt in over de oorzaken van urineweginfecties en hoe ze te voorkomen. • Controleer of de patiënt voldoende drinkt. • Controleer of de condoomkatheter minstens om de 24 uur vervangen wordt.

Dagopvangzakken

De urinezakken vangen de urine op via een condoomkatheter, een verblijfsonde, een suprapubische sonde of een nefrostomiesonde.

Al onze urinezakken worden geleverd met connectiestukken en een paar beenriempjes.



Conveen Security+

Urineopvangzak met afknijpbare anti-knik tube, klikkraan, anti-terugvloeingsklep, niet-geweven bekleding



Inhoud	Tube	Versie	Verpakking	Ref.	APB-code
350 ml	50 cm	niet steriel	20 stuks/doos	5165	1434-448
500 ml	50 cm	niet steriel	20 stuks/doos	5161	1193-259
750 ml	50 cm	niet steriel	20 stuks/doos	5167	1434-455
500 ml	50 cm	steriel	10 stuks/doos	5163	3565-884

Conveen Contour

Multichamber urineopvangzak met afknijpbare gladde tube, klikkraan, anti-terugvloeingsklep, niet-geweven bekleding



Inhoud	Tube	Versie	Verpakking	Ref.	APB-code
600 ml	45 cm	niet steriel	20 stuks/doos	5170	0680-389
800 ml	45 cm	niet steriel	20 stuks/doos	5174	0680-397
800 ml	65 cm	niet steriel	20 stuks/doos	5176	1182-245

Conveen Active

Urinezak met geïntegreerde fixatie



Inhoud	Tube	Versie	Verpakking	Ref.	APB-code
250 ml	7 cm	niet steriel	10 stuks/doos	25501	2745-628

Conveen Standard

Urineopvangzak van 1,5 liter, niet afknijpbare gladde tube, anti-terugvloeingsklep, aanprikpunt voor staalafname en niet-geweven bekleding.



Inhoud	Tube	Versie	Verpakking	Ref.	APB-code
1500 ml	90 cm	steriel	10 stuks/doos	5063	4271-888

Nachtopvangzakken



Conveen Basic

Urineopvangzak met niet afknipbare gladde tube van 100 cm, kruiskraan en anti-terugvloeingsklep.



Inhoud	Tube	Versie	Verpakking	Ref.	APB-code
2000 ml	100 cm	niet steriel	10 stuks/doos	218040	2745-636

Conveen Security+

Urineopvangzak met afknipbare anti-knik tube van 140 cm, schuifkraan en anti-terugvloeingsklep.



Inhoud	Tube	Versie	Verpakking	Ref.	APB-code
2000 ml	140 cm	niet steriel	20 stuks/doos	21346	1591-734

Conveen Standard

Urineopvangzak van 1,5 liter met afknipbare gladde tube, anti-terugvloeingsklep, en niet-geweven bekleding.



Inhoud	Tube	Versie	Verpakking	Ref.	APB-code
1500 ml	90 cm	niet steriel	20 stuks/doos	5062	0680-371

Toebehoren



Extra bescherming

Brava Skin Barrier Spray

Extra bescherming voor de gevoelige huid. Bevat geen alcohol.
50 ml - Ref. 12020 - APB-code: 2765-956



Extra kleefkracht

Conveen Prep

Extra kleefkracht en bescherming (niet te gebruiken bij gevoelig of geïrriteerde huid). Bevat alcohol.

Ref. 62042 - 54 stuks/doos - APB-code: 2775-914



Extra fixatie (bij ingetrokken penis of lekken)

Conveen fixeerstrip

Voor een betere hechting van de condoomkatheter aan de penis. Hypoallergeen materiaal, zeer soepel, absorbeert vocht.

Ref. 5100 - 20 stuks/zakje - APB-code: 4179-636



Fixatie van de tube op de dij

Conveen G-strap

Bevestigt de tube langs het been.

Ref. 383001 - 50 cm - APB-code: 2890-994

Ref. 383003 - 90 cm - APB-code: 4137-154



Fixatie van de urinezak op de been

Conveen Aquasleeve

Voor een veilige en comfortabele ondersteuning van de beenzak.

Ref. 783681 - Standaard - APB-code: 4419-131

Ref. 783687 - Medium - APB-code: 4419-156

Ref. 783695 - Large - APB-code: 4419-149



Pijnloze verwijdering

Brava Remover Spray

Vergemakkelijkt het verwijderen van de condoomkatheter.

Ref. 12010 - 50 ml - APB-code: 2765-998

Conveen Optima Pack

Het handige alles-in-één pak

Het Conveen Optima Pack bevat **alle producten van de basisdotatie** voor mannelijke urine-incontinentieproducten voor 3 maanden en **een paar extra's**.

Basisdotatie voor 3 maanden:

- 90 condoomkatheters Conveen Optima
- 20 beenzakken met een paar beenriempjes: Conveen Security+ 500 ml
- 20 nachtzakken met een bedhaak: Conveen Security+ Nightbag 2 l
- 1 forfait voor huidbescherming: 2 x 54 Conveen Prep doekjes



Inhoud van het Conveen Pack:

	Conveen Optima condoomkatheters	90 + 6 gratis
	Conveen Security+ dagopvangzakken 500 ml	20 stuks
	Conveen Security+ Night Bag nachtopvangzakken 2000 ml	20 stuks
	Conveen Prep doekjes	108 stuks
	Conveen bedhaak	1 stuk
	Conveen G-strap riempje	1 stuk gratis

Bezoek onze website:


www.conveenoptimapack.be



Conveen® Optima

Kies het juiste Conveen opvangsysteem* voor uw patiënt

1) Bepaal de juiste maat (lengte en diameter van de penis) met behulp van het Conveen maatkaartje

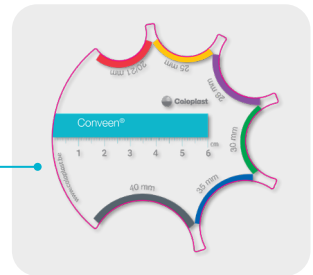

2) Kies de overeenstemmende Conveen Optima

90 condoomkatheters / 3 maand*

Versie	Lengte	Diameter	Versie	Lengte	Diameter
Standaard versie 8 cm		● 25 ● 28 ● 30 ● 35 ● 40	Korte versie 5 cm		● 21 ● 25 ● 28 ● 30 ● 35

3) Kies de urinezak en het bevestigingssysteem (dag- en nachtopvangzak)

Conveen dagopvangzak

Licht tot matig (<250 ml)
Conveen Active

Grote hoeveelheid (>600 ml)
Conveen Security+ of Conveen Contour

Matig (350 tot 600 ml)
Conveen Sec+ of Conveen Contour
500 ml of 600 ml

20 dagzakken / 3 maand*

Conveen nachtopvangzak

Conveen Basic
2l

Conveen Security+
2l

Conveen Standard
1,5l

20 nachtzakken / 3 maand*

* Het Conveen opvangsysteem is opgenomen in de lijst van terugbetaalde producten voor incontinentie (art. 27 nomenclatuur bandagisterie).

1. Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Gerandomiseerde, cross-overstudie. Conveen Optima condoomkatheters vs. absorberende bescherming. 58 mannen met urine-incontinentie. Belangrijkste criterium: Levenskwaliteit.

2. Kendek R et al., Vergelijkende studie tussen absorberende hulpmiddelen en zelfklevende condoomkatheters bij urine-incontinentie op een neurologische afdeling. SIFUD-congres, Mulhouse-1, 1995. 10 patiënten. Per dag waren 4 absorberende verbanden nodig versus 1 condoomkatheter. Dit betekent een verpleegtijd van 80 minuten per dag voor de inlegverbanden tegen 10 minuten per dag voor de condoomkatheters.