

# EasiCath en EasiCath Set

Veilig en gemakkelijk in gebruik

**EasiCath<sup>®</sup>**



# EasiCath®

## EasiCath is een traditionele katheter met hydrofiele coating

Met EasiCath kunt u de blaas op een veilige manier legen. Zowel de katheter zelf als het afgeronde uiteinde en de gepolijste katheterogen zijn voorzien van een speciale coating. Als de katheter dertig seconden in aanraking is geweest met water, verandert deze coating in een zeer zacht en glad glijmiddel.

Hierdoor kan de katheter moeiteloos ingebracht worden en is de kans op beschadiging van de urinebuis uiterst gering.

## De voordelen van EasiCath



### Gemakkelijk te gebruiken

Voeg water toe aan de verpakking en wacht 30 seconden, de katheter is nu gebruiksklaar. Steriel water is niet noodzakelijk, kraantjeswater volstaat.

### Veilig

De EasiCath katheter vermindert het risico op urineweg-infecties\* in vergelijking met droge katheters.

### Meer comfort

Hydrofiele katheters kunnen de wrijving verminderen\*\* en verhogen op die manier het comfort bij het inbrengen en het verwijderen. De oogjes van de katheter zijn zacht, afgerond en gecoat.

### Op maat

EasiCath is beschikbaar in verschillende maten, om tegemoet te komen aan de noden van de gebruiker.

## EasiCath® Set

### Waar en wanneer u wilt

EasiCath Set beschikt over dezelfde voordelen als EasiCath, maar komt in een pak met een geïntegreerde urinezak.

EasiCath Set bestaat uit een hydrofiele katheter met een nelatontip (rechte tip), een ampul met een steriele zoutoplossing en een urinezak van 700 ml.

Hij bestaat in verschillende diameters (Ch) voor mannen en vrouwen.

\* Cindolo L, Palmieri EA, Autorino R, Sazano L, Atieri V, (2004) Urol Int 2004; 73: 19-222

\*\* Fader M, Moore, Cottenden AM, Petterson L, Brooks R, Malone-Lee J. (2001) Coated catheters for intermittent catheterization: Smooth or sticky? BJU Int 2001;88(4):373-377 KN

# EasiCath gebruiksaanwijzing voor mannen


## De voorbereiding

Leg alle benodigdheden klaar.

Was uw handen goed met water en zeep.

EasiCath is gemakkelijk voor te bereiden. U vult de verpakking tot aan de connector met kraantjeswater en wacht 30 seconden om de coating te activeren.

## Open de verpakking

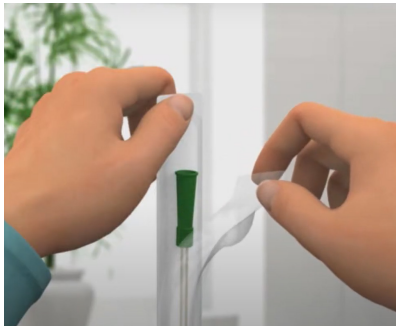

## Vul met kraantjeswater



## Wacht 30 sec



Schuif de voorhuid terug indien u niet besneden bent.

Was de opening van de plasbuis. Houd de penis omhoog, vlak tegen de buik aan. Houd hem niet te stevig vast, zodat u de urinebuis niet dichtknijpt.

Breng de katheter voorzichtig voor de helft in de urinebuis in.

Duw daarna de penis naar beneden en schuif de katheter verder tot de urine begint te stromen. Buig de katheter iets vooraleer de urinestroom op gang komt. Om de urinestroom te controleren, kunt u het uiteinde van de katheter lichtjes buigen met uw vingers en dan loslaten op het juiste moment.



## Verwijder de katheter

Wanneer de urinestroom stopt, kunt u de katheter voorzichtig een stukje terugtrekken. Indien de urine opnieuw begint te stromen, wacht dan enkele seconden, en trek de sonde 1 à 2 cm verder uit. Herhaal deze handeling, zodat er geen urine in de blaas achterblijft.

Herhaal dit, zodat er geen urine in de blaas achterblijft.

## Was nogmaals uw handen

Als er geen toilet in de buurt is, kunt u EasiCath op een urine-opvangzak aansluiten. Zorg er in dit geval voor dat u een flesje water bij u heeft om de coating te activeren. Gooi de katheter nadien met de lege verpakking (zonder vloeistof) weg. U kunt uiteraard ook gebruik maken van de EasiCath Set - de katheter met geïntegreerde urinezak.

# EasiCath gebruiksaanwijzing voor vrouwen


## De voorbereiding

Leg alle benodigdheden klaar.

Was uw handen goed met water en zeep.

EasiCath is gemakkelijk voor te bereiden. U vult de verpakking tot aan de connector met kraantjeswater en wacht 30 seconden om de coating te activeren.

## Open de verpakking

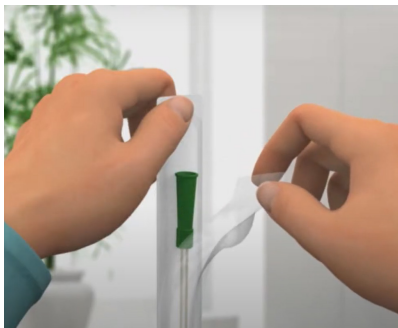

## Vul met kraantjeswater



## Wacht 30 sec




Spreid de schaamlippen en reinig het gebied rondom de plasopening. Doe dit in een achterwaartse richting, naar de anus toe, omdat bacteriën van het gebied rond de anus anders in de buurt van de plasopening komen en bij katheterisatie een blaasontsteking kunnen veroorzaken.

Zoek met uw vingers - eventueel met behulp van een spiegel - de plasopening en breng de katheter in. Schuif hem op tot er urine uit de katheter komt. Om de urinestroom te controleren, kunt u het uiteinde van de katheter lichtjes buigen met uw vingers en dan loslaten op het juiste moment.

## Verwijder de katheter

Wanneer de urinestroom stopt, kunt u de katheter voorzichtig een stukje terugtrekken. Indien de urine opnieuw begint te stromen, wacht dan enkele seconden, en trek de sonde 1 à 2 cm verder uit. Herhaal deze handeling, zodat er geen urine in de blaas achterblijft.

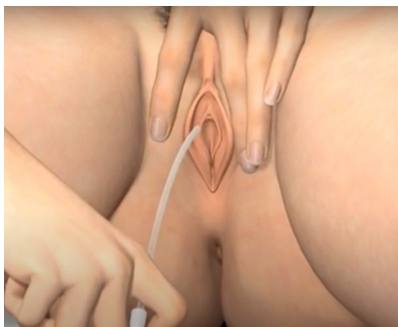

## Was nogmaals uw handen

Als er geen toilet in de buurt is, kunt u EasiCath op een urine-opvangzak aansluiten. Zorg er in dit geval voor dat u een flesje water bij u heeft om de coating te activeren. Gooi de katheter nadien met de lege verpakking (zonder vloeistof) weg. U kunt uiteraard ook gebruik maken van de EasiCath Set - de katheter met geïntegreerde urinezak.

## EasiCath Set gebruiksaanwijzing

### De voorbereiding

1. Was uw handen goed met water en zeep.
2. Haal de opvangzak uit de verpakking en breek de sluiting van de ampul. Hierdoor loopt het steriele water in de zak. De zak met de katheter naar beneden houden.
3. Wacht 30 seconden. In die tijd neemt de hydrofiële coating van de katheter het water op en wordt de katheter zacht en glad.

### Mannen: was de penis



4. Schuif de voorhuid terug indien u niet besneden bent. Was de opening van de plasbuis.

### Vrouwen: was de genitale zone



4. Spreid de schaamlippen en reinig het gebied rondom de plasopening. Doe dit in een achterwaartse richting, naar de anus toe, omdat bacteriën van het gebied rond de anus anders in de buurt van de plasopening komen en bij katheterisatie een blaasontsteking kunnen veroorzaken.
5. Draai de zak om en open de zak door het bovenste stukje eraf te scheuren.

### Breng de katheter in

6. Breng de katheter in de urinebuis door de katheter voorzichtig uit de zak te schuiven.



Het inbrengen gaat vervolgens op dezelfde manier als het inbrengen van een gewone katheter.

Het uiteinde van de katheter blijft in de opvangzak en de urine wordt hierin opgevangen.

### Verwijder de katheter

7. Wanneer de urinestroom stopt, kunt u de katheter voorzichtig een stukje terugtrekken. Herhaal dit zodat er geen urine in de blaas achterblijft. Verwijder de katheter voorzichtig als de blaas leeg is en schuif de katheter terug in de opvangzak.
8. Knoop het eind van de opvangzak dicht en gooi de zak in de prullenbak. U kunt de zak ook aan de onderkant leeg laten lopen.

### Was nogmaals uw handen

## EasiCath: steriele hydrofiele katheter

Beschrijving	Referentie	CH	Lengte	Stuks/doos	APB-code
EasiCath Vrouw Nelaton	5368	08	20 cm	60	1761-626
EasiCath Vrouw Nelaton	5370	10	20 cm	60	1761-634
EasiCath Vrouw Nelaton	5372	12	20 cm	60	1761-642
EasiCath Vrouw Nelaton	5374	14	20 cm	60	1761-659
EasiCath Vrouw Nelaton	5376	16	20 cm	60	1761-667
EasiCath Man Nelaton	5348	08	40 cm	60	1761-519
EasiCath Man Nelaton	5350	10	40 cm	60	1761-527
EasiCath Man Nelaton	5352	12	40 cm	60	1761-535
EasiCath Man Nelaton	5354	14	40 cm	60	1761-543
EasiCath Man Nelaton	5356	16	40 cm	60	1761-550
EasiCath Man Nelaton	5358	18	40 cm	60	1761-568
EasiCath Man Nelaton	5360	20	40 cm	25	1265-743
EasiCath Man Nelaton	5362	22	40 cm	25	1265-735
EasiCath Man Tiemann	5380	10	40 cm	60	1761-576
EasiCath Man Tiemann	5382	12	40 cm	60	1761-584
EasiCath Man Tiemann	5384	14	40 cm	60	1761-592
EasiCath Man Tiemann	5386	16	40 cm	60	1761-600
EasiCath Man Tiemann	5388	18	40 cm	60	1761-618

## EasiCath Luerlock (Nel.): steriele hydrofiele katheter voor blaasinstillatie

Beschrijving	Referentie	CH	Lengte	Stuks/doos	APB-code
EasiCath LuerLock - Vrouw	5268	8	20 cm	10	2180-073
EasiCath LuerLock - Vrouw	5270	10	20 cm	10	2180-081
EasiCath LuerLock - Vrouw	5272	12	20 cm	10	2180-099
EasiCath LuerLock - Vrouw	5274	14	20 cm	10	2180-107
EasiCath LuerLock - Man	5288	8	40 cm	10	2180-024
EasiCath LuerLock - Man	5290	10	40 cm	10	2180-032
EasiCath LuerLock - Man	5292	12	40 cm	10	2180-040
EasiCath LuerLock - Man	5294	14	40 cm	10	2180-057

## EasiCath Set: steriele katheterset met geïntegreerde urinezak

Beschrijving	Referentie	CH	Lengte	Stuks/doos	APB-code
EasiCath Set Vrouw Nelaton	28002	10	20 cm	20	2490-118
EasiCath Set Vrouw Nelaton	28003	12	20 cm	20	2490-126
EasiCath Set Vrouw Nelaton	28004	14	20 cm	20	2490-134
EasiCath Set Vrouw Nelaton	28014	16	20 cm	20	2490-142
EasiCath Set Man Nelaton	28006	10	40 cm	20	2490-050
EasiCath Set Man Nelaton	28007	12	40 cm	20	2490-068
EasiCath Set Man Nelaton	28008	14	40 cm	20	2490-076
EasiCath Set Man Nelaton	28009	16	40 cm	20	2490-084