


Luja™ Vrouw

Met Micro-hole Zone
Technologie

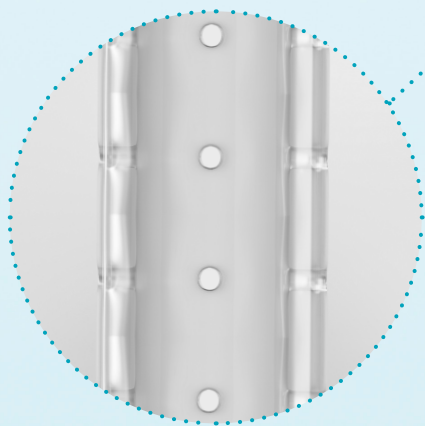

Nieuw

Compacte
intermitterende
katheter voor
vrouwen


Een nieuwe standaard voor het ledigen van de blaas met Micro-hole Zone Technologie

Luja™ is ontworpen om het risico op urineweginfecties te verminderen.² Luja™ maakt het mogelijk de blaas in één keer volledig te ledigen.¹



Traditionele katheters hebben gewoonlijk twee katheteroogjes om de blaas te ledigen

Bij traditionele oogjes stopt de urine tussentijds met stromen. De katheter moet tijdens het katheteriseren geherpositioneerd worden om de urinestroom weer op gang te brengen om zo de blaas verder te ledigen.

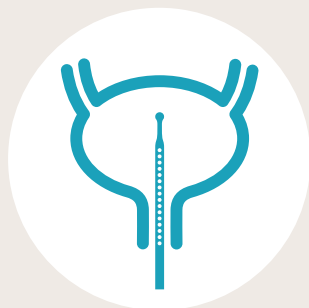

Luja is de eerste en enige katheter met Micro-hole Zone Technologie

De nieuwe en unieke Micro-hole Zone Technologie bestaat uit meer dan 50+ micro-oogjes die volledige blaaslediging in één keer mogelijk maakt zonder de katheter te herpositioneren.¹

1. Luja Vrouw zorgde voor één ononderbroken urinestroom bij 87% van de katheterisaties en < 10 ml residu bij de eerste stop in de urinestroom bij 83% van de katheterisaties. (Thiruchelvam N. et al. BJN 2024, Vol 33, No 17. Doi: 10.12968/bjon.2024.0212) Individuele resultaten kunnen verschillen.
2. Risico's op urineweginfecties zoals gedefinieerd door Kennelly, M., Thiruchelvam, N., Averbek, M.A., Adult Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction and Intermittent Catheterisation in a Community Setting: Risk Factors Model for Urinary Tract Infections, Adv Urol., 2019; 2:2019-2757862.
3. Minimaal 50 micro-oogjes op Ch 10 - Ch 16.
4. Vergeleken met ongecoate katheters.
5. Luja Vrouw (Ch 10 - Ch 16) heeft een (effectieve) lengte van 9 cm en is langer dan SpeediCath® Compact Vrouw en SpeediCath® Compact Eve.
6. Vergeleken met SpeediCath® Compact Eve.
7. Gebaseerd op een extern beoordeelde koolstof footprint volgens ISO14067.
8. Getest in een pre-klinische setting (ex vivo). Coloplast Data-on-file, Glahn 2023.

Luja™ met Micro-hole Zone Technologie maakt **volledige blaaslediging** in één keer¹ mogelijk

Luja™ Vrouw is de eerste en enige compacte vrouwenkatheter met Micro-hole Zone Technologie, die de hoeveelheid residuele urine minimaliseert¹ voor minder risico op urineweginfecties.²



Eén ononderbroken stroom

De urinestroom stopt als de blaas volledig leeg is.¹



Geen herpositionering

Maakt het mogelijk om te katheteriseren zonder de katheter te herpositioneren², omdat de katheter veel minder aanzuigt aan de mucosa.⁸



Minder risico op urineweginfecties²

Ontworpen om het risico op urineweginfecties te verminderen door de hoeveelheid residuele urine te minimaliseren.¹



Micro-hole Zone
Technology™



Maak kennis met Luja™ Vrouw

Helpt meer katheter-gerelateerde risicofactoren op urineweginfecties² te verminderen dan ooit.

Meer dan 50+ micro-oogjes³

Micro-hole Zone Technologie maakt volledige blaaslediging in één ononderbroken stroom mogelijk.¹



Triple Action
Coating Technology™

Triple Action Coating Technology™ om de urethra te beschermen en het risico op urineweginfecties te verminderen.⁴


Triple Action Coating Technology.

Bekijk het filmpje.




Rolstabilisator

Zorgt ervoor dat de katheter niet wegrolt.

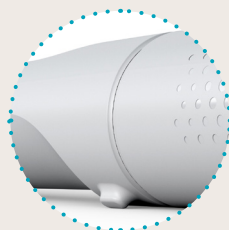

28% minder plastic in het product⁶ en 22% vermindering in CO2 uitstoot^{6,7}

Bekijk de
Luja™ Vrouw
video

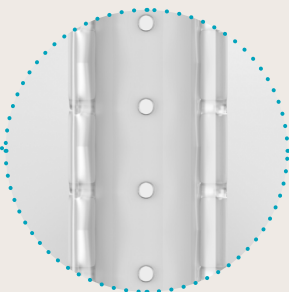

Langere⁵ katheterlengte

Speciaal micro-reliëf
Voor een goede grip.

Coloplast

Luja™ with Micro-hole Zone
Technology

Gebruiksaanwijzing voor zorgverleners

Vorbereiding



1. Was uw handen, trek een paar steriele handschoenen aan.



2. Spreid de labia en reinig voorzichtig het gebied rondom de opening van de urethra.




3. Houd de katheter rechtop, zodat het handvat (brede uiteinde) naar boven wijst. Open de katheter door het handvat in een willekeurige richting te draaien. Trek het handvat ongeveer 2 centimeter naar boven totdat u wat weerstand voelt.



Inbrengen en het ledigen van de blaas



4. In deze positie kan zo nodig een urine-opvangzak worden aangesloten. Trek de katheter uit de houder.

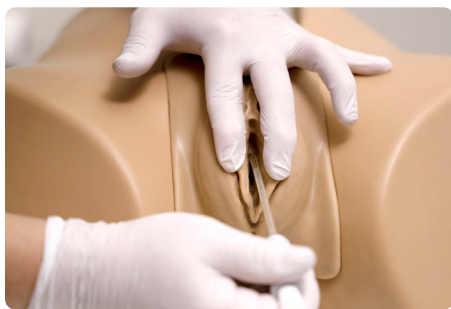

5. Spreid de labia met één hand zodat de opening van de urethra zichtbaar is. Breng de katheter met uw andere hand voorzichtig in de urinebuis. Ga door met het inbrengen van de katheter totdat de urine begint te stromen en ga dan nog iets verder om te zorgen voor een constante stroom. Wanneer de urine nog maar langzaam druppelt, verwijdert u de katheter.



6. De katheter moet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. De houder is recycleerbaar en kan als de katheter niet terug gestopt is in de houder worden weggegooid, in overeenstemming met de lokale richtlijnen voor recycleerbaar afval.

Bekijk de diverse Luja™ Vrouw instructievideo's



Zorgverleners



Gebruikers

Luja™


Met Micro-hole Zone Technologie
maakt volledige blaaslediging
in één keer mogelijk.¹

Luja™ is ontworpen om het risico op urineweginfecties te verminderen² door de hoeveelheid residuele urine te minimaliseren.



Assortiment

	Charrière	Verpakking	Lengte		Art.nr.	CNK
			Totaal*	Effectief**		
Luja Vrouw	Ch 10	30	14 cm	9 cm	20051	4832465
Luja Vrouw	Ch 12	30	14 cm	9 cm	20052	4832457
Luja Vrouw	Ch 14	30	14 cm	9 cm	20054	4832440
Luja Vrouw	Ch 16	30	14 cm	9 cm	20056	4832432

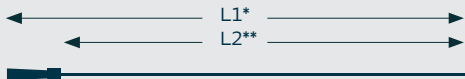

* Totale lengte: lengte van de katheter incl. connector.

** Effectieve lengte: lengte van de katheter die effectief kan worden ingebracht.

Ostomy Care | Contenance Care | Advanced Wound Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel/Huizingen. V.U.: E. Binnemans
www.coloplast.be Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2025-03.
Alle rechten voorbehouden. PM-36237