


Luja™ Femme


Doté de la Technologie
de Zone Micro-perforée

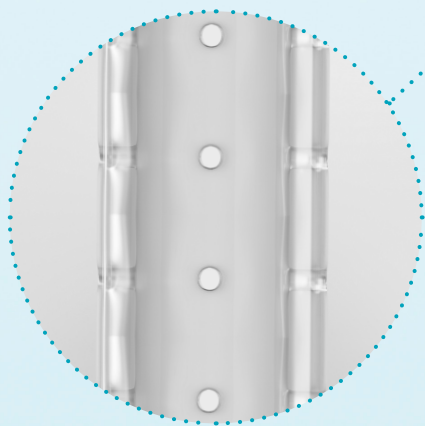

Nouveau
Sonde compacte
pour femmes


Une nouvelle norme pour la vidange de la vessie grâce à la Technologie de Zone Micro-perforée

Luja™ Femme est conçu pour réduire le risque d'infections des voies urinaires. Luja™ permet de vider complètement la vessie en une seule fois¹, car moins il y a d'urine résiduelle dans la vessie, mieux c'est.²

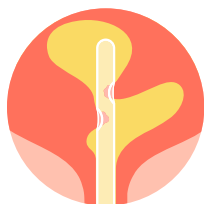

Les sondes traditionnelles ont généralement deux œils pour vider la vessie

Dans le cas d'une sonde avec 2 œils, l'urine s'arrête de couler durant la sondage. Elle doit donc être repositionnée pour relancer l'écoulement de l'urine et obtenir une vidange complète.

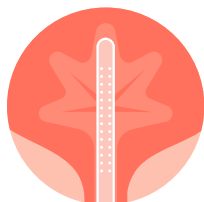

Luja est la première et la seule sonde compacte pour femmes dotée de la Technologie de Zone Micro-perforée

La nouvelle et unique Technologie de Zone Micro-perforée consiste en plus de 50 micro-perforations⁴ qui permettent de vider complètement la vessie en un seul flux ininterrompu sans repositionner la sonde.



Pourquoi est-il important de vider complètement la vessie ?
Regardez la vidéo.

1. Luja Femme assure un écoulement d'urine ininterrompu dans 87 % des sondages et un résidu de <10 ml au premier arrêt de l'écoulement d'urine dans 83 % des sondages. (Thiruchelvam et al. (2024), DOI: 10.12968/bjon.2024.0212). Les résultats individuels peuvent différer.

2. Kennelly M., et al. (2019), 10.1155/2019/2757862, Vasudeva P., et al. (2014), 10.1002/nau.22378, Vahr S., et al. (2013), <https://nurses.uroweb.org/guideline/catheterisation-urethral-intermittent-in-adults/>.

3. Coloplast Data-on-File, RCT, NCT05814211, n=82. 06/2024.

4. Au moins 50 micro-perforations sur les CH10 - CH16.

5. Par rapport aux cathéters traditionnels avec deux œils, car il n'est pas nécessaire de les repositionner.

6. Défini par le modèle des facteurs de risque d'infection urinaire.

7. Luja Femme (Ch 10 - Ch 16) a une longueur (effective) de 9 cm.

8. Comparé au SpeedCath Compact Eve.

9. Sur la base d'une évaluation externe de l'empreinte carbone conformément à la norme ISO14067.

Coloplast présente la nouvelle génération de sondes compactes pour femmes

Luja™ Femme est la première et la seule sonde compacte pour femmes dotée de plus de 50 micro-perforations⁴ qui permettent de vider la vessie en un seul flux ininterrompu.¹ Les utilisatrices déclarent ressentir moins d'inconfort pendant le sondage.³

Un seul flux ininterrompu

Le flux d'urine ne s'arrête que lorsque la vessie est complètement vide.¹ De cette façon, vous saurez immédiatement que vous avez terminé de vous sonder.

Pas de repositionnement nécessaire

Luja™ permet de vider complètement la vessie sans avoir à repositionner la sonde ni à la retirer par petites étapes. Cela facilite le sondage.⁵

Moins de risques d'infections urinaires⁶

Luja™ est conçue pour réduire le risque d'infections urinaires en minimisant la quantité d'urine résiduelle.¹



Micro-hole Zone
Technology™




Faites connaissance avec **Luja™** Femme

Technologie de
Lubrification
Triple Action.
Regardez la vidéo.




Plus de 50 micro-perforations⁴

La Technologie de Zone Micro-perforée permet de vider complètement la vessie en un seul flux ininterrompu.¹

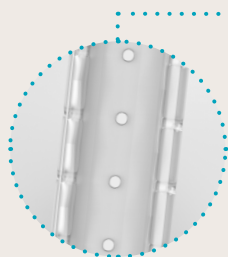

Long et compact⁷

Conçu pour les femmes.

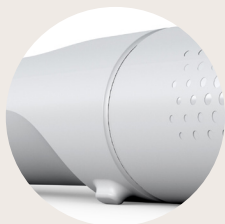

Stabilisateur

Permet à la sonde de ne pas rouler sur elle-même.

Technologie de Lubrification Triple Action™

Réduit les frictions lors de l'insertion et le retrait et aide à protéger l'urètre.



Triple Action
Coating Technology™

Micro-relief spécial

Pour une bonne prise en main.



28 % de plastique en moins dans le produit⁸ et 22 % de réduction des émissions de CO₂ ^{8,9}

Recommandé par les femmes

“Avec Luja Femme,
je m’inquiète moins
de savoir si j’ai
complètement vidé
ma vessie.”

Tanja |
utilise Luja Femme



“Avec Luja, je me sonde
facilement lorsque
je suis à la salle de
sport. C’est entrer et
sortir directement des
toilettes.”

Theresa |
utilise Luja Femme



Luja™ Femme

Mode d'emploi

Regardez
la vidéo



Préparation



1. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon et nettoyez délicatement la zone autour de l'ouverture de l'urètre. Il est important de ne pas transférer de bactéries de vos mains à la partie stérile. Assurez-vous que vous êtes tout à fait prête à commencer le sondage avant d'ouvrir l'emballage.



2. Tenez la sonde à la verticale de façon à ce que la poignée (extrémité large) soit orientée vers le haut. Ouvrez la sonde en tournant la poignée dans n'importe quelle direction. Tirez la poignée vers le haut sur environ 2 cm jusqu'à ce que vous sentiez une certaine résistance. Pour ouvrir complètement la sonde, continuez à tirer la poignée vers le haut jusqu'à ce que la sonde stérile soit entièrement révélée. Il est important de ne pas plier la sonde pendant l'ouverture. Videz l'étui. Vous êtes maintenant prête à effectuer le sondage.

Insertion et vidange de la vessie



3. Écartez les lèvres d'une main de façon à voir l'ouverture de l'urètre. Avec l'autre main, insérez doucement la sonde dans l'urètre par étapes d'environ 2 cm. Continuez à insérer la sonde jusqu'à ce que l'urine commence à couler, puis continuez un peu plus loin. Lorsque le flux d'urine ralentit, retirez la sonde.



4. La sonde peut être refermée pour être éliminée en l'insérant complètement dans l'étui. La sonde doit être jetée avec les ordures ménagères. L'étui peut être jeté avec les emballages recyclables pour autant que la sonde n'ait pas été remise dedans, conformément aux directives locales relatives aux déchets recyclables.



Avant toute utilisation, lisez le mode d'emploi détaillé que vous trouverez séparément dans la boîte. Vous y trouverez des informations sur les contre-indications et les avertissements.

Coloplast Care

Aide et information

L'autosondage ne doit pas perturber votre vie quotidienne. Les spécialistes de Coloplast Care sont disponibles pour un soutien pratique et des informations sur l'utilisation de nos sondes et peuvent vous aider à intégrer l'autosondage dans votre vie quotidienne.

Les avantages de Coloplast Care:

- ✓ Assistance téléphonique directe par des spécialistes.
- ✓ Possibilité d'une visite à domicile gratuite d'une infirmière pour plus de conseils.
- ✓ Trucs et astuces pour l'intégration de l'autosondage dans la vie quotidienne.

Coloplast Care vous donne confiance et vous aide à avancer, pour que vous puissiez vivre votre vie comme vous le souhaitez. Continuez à faire les choses que vous faisiez déjà !



www.catheter.coloplastcare.be




Luja™ Femme

Commande

Luja Femme peut être commandé dans vos points de vente habituels.
Vous aurez besoin des informations suivantes.

Gamme

	Charrière	Emballage	Longueur		Références	Codes APB
			Totale*	Effective**		
Luja Femme	Ch 10	30	14 cm	9 cm	20051	4832465
Luja Femme	Ch 12	30	14 cm	9 cm	20052	4832457
Luja Femme	Ch 14	30	14 cm	9 cm	20054	4832440
Luja Femme	Ch 16	30	14 cm	9 cm	20056	4832432

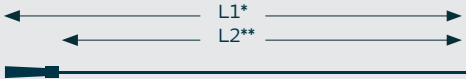

* Longueur totale : longueur de la sonde, connecteur inclus.

** Longueur effective : longueur de la sonde qui peut être insérée de façon effective.

Veuillez contacter Coloplast Care si vous avez des questions ou des commentaires.



0800 12 888



www.coloplast.be/fr-BE



cs@coloplast.com

Ostomy Care | Continence Care | Advanced Wound Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel/Huizingen. E.R.: Erina Binnemans www.coloplast.be
Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. © 2025-02. Tous droits réservés. PM-36239