


Luja™ Vrouw

Met Micro-hole Zone
Technologie

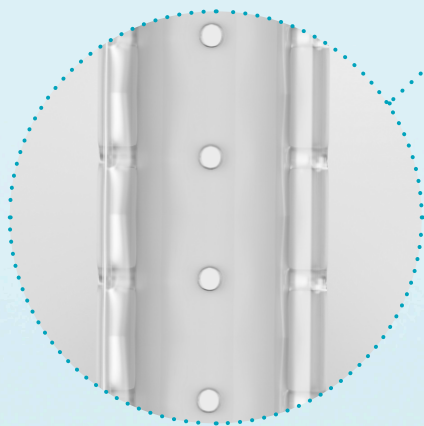


Nieuw

Compacte katheter
voor vrouwen


Een nieuwe standaard voor het ledigen van de blaas met Micro-hole Zone Technologie

Luja™ Vrouw is ontworpen om het risico op urineweginfecties te verkleinen. Luja™ maakt het mogelijk de blaas in één keer volledig te ledigen¹, want hoe minder residuele urine in de blaas hoe beter.²

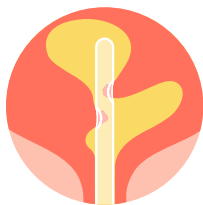

Traditionele katheters hebben gewoonlijk twee katheteroogjes om de blaas te ledigen

Bij traditionele oogjes stopt de urine tussentijds met stromen. De katheter moet tijdens het katheteriseren geherpositioneerd worden om de urinestroom weer op gang te brengen om zo de blaas verder te ledigen.

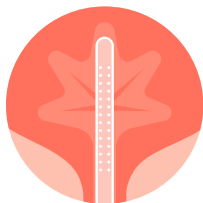

Luja is de eerste en enige compacte vrouwenkatheter met Micro-hole Zone Technologie

De nieuwe en unieke Micro-hole Zone Technologie bestaat uit 50+ micro-oogjes⁴ die het mogelijk maken om de blaas in één keer volledig te ledigen zonder de katheter te herpositioneren.¹



Waarom is het belangrijk om de blaas volledig te ledigen?
Bekijk het filmpje.

1. Luja Vrouw zorgde voor één ononderbroken urinestroom bij 87% van de katheterisaties en < 10 ml residu bij de eerste stop in de urinestroom bij 83% van de katheterisaties. (Thiruchelvam N, et al. BJN 2024, Vol 33, No 17. Doi: 10.12968/bjon.2024.0212) Individuele resultaten kunnen verschillen.

2. Kennelly M., et al. (2019), 10.1155/2019/2757862, Vasudeva P., et al. (2014), 10.1002/nau.22378, Vahr S., et al. (2013), <https://nurses.uroweb.org/guideline/catheterisation-urethral-intermittent-in-adults/>.

3. Coloplast Data-on-File, RCT, NCT05814211, n=82. 06/2024.

4. Minimaal 50 micro-oogjes op Ch 10 - Ch 16.

5. Vergeleken met traditionele katheters met twee katheteroogjes vanwege het niet hoeven herpositioneren.

6. Gedefinieerd door UTI risicofactoren model (Kennelly M., et al. (2019), 10.1155/2019/2757862).

7. Luja Vrouw (Ch 10 - Ch 16) heeft een (effectieve) lengte van 9 cm.

8. Vergeleken met SpeediCath Compact Eve.

9. Gebaseerd op een extern beoordeelde koolstof footprint volgens ISO14067.

Coloplast introduceert de nieuwe generatie compacte vrouwenkatheters

Luja™ Vrouw is de eerste en enige compacte vrouwenkatheter met 50+ micro-oogjes⁴ die het mogelijk maken om de blaas in één keer volledig te ledigen.¹ 96% van de gebruikers geven aan minder ongemak te ervaren tijdens het katheteriseren.³

Eén ononderbroken stroom

De urinestroom stopt als de blaas volledig geledigd is.¹ Zo weet je direct dat je klaar bent met katheteriseren.

Herpositioneren niet meer nodig

Maakt het mogelijk om de blaas volledig te ledigen zonder de katheter te herpositioneren en/of in kleine stapjes te verwijderen. Zo wordt het katheteriseren eenvoudiger.⁵

Minder risico op urineweginfecties⁶

Ontworpen om het risico op urineweginfecties te verkleinen door de hoeveelheid residuele urine te minimaliseren.¹



Micro-hole Zone
Technology™




Maak kennis met Luja™ Vrouw

Triple Action Coating
Technology.
Bekijk het filmpje.




50+ micro-oogjes⁴

Micro-hole Zone Technologie maakt het mogelijk om de blaas in één keer volledig te ledigen.¹

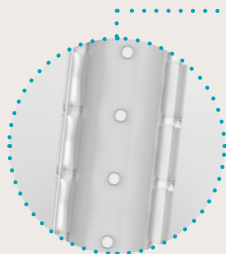

Lang en compact⁷

Ontworpen voor vrouwen.

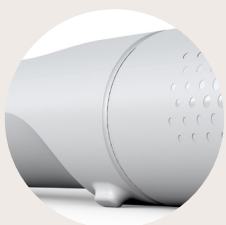

Rolstabilisator

Zorgt ervoor dat de katheter niet wegrolt.



28% minder plastic in het product⁸
en 22% vermindering in CO₂ uitstoot.^{8,9}

Triple Action Coating Technology™

Zorgt voor minder wrijving bij het inbrengen en verwijderen en helpt de urinebuis te beschermen.



Triple Action
Coating Technology™

Speciaal micro-reliëf

Voor een goede grip.

Aanbevolen door vrouwen

“Met Luja Vrouw maak ik me minder zorgen of ik mijn blaas volledig geledigd heb.”

Tanja |
gebruikt Luja Vrouw



“Met Luja is het gemakkelijk voor mij om te sonderen wanneer ik aan het sporten ben. Het is direct in en direct uit de toiletten.”

Theresa |
gebruikt Luja Vrouw



Luja™ Vrouw

Gebruiksaanwijzing

Bekijk de
instructie-
video



Vorbereiding



1. Was jouw handen met water en zeep en reinig voorzichtig het gebied rondom de opening van de urinebuis. Het is belangrijk dat je geen bacteriën van jouw handen op de katheter brengt. Zorg dat je helemaal klaar bent om met de katheterisatie te beginnen voordat je de verpakking openmaakt.



2. Houd de katheter rechtop, zodat het handvat (brede uiteinde) naar boven wijst. Open de katheter door het handvat in een willekeurige richting te draaien. Trek het handvat ongeveer 2 cm naar boven totdat je wat weerstand voelt. Om de katheter helemaal te openen, blijf je het handvat recht omhoog trekken, totdat de steriele katheter in zijn geheel wordt onthuld. Het is belangrijk dat de katheter niet wordt gebogen tijdens het openen. Leeg de houder. Je bent nu klaar om te katheteriseren.

Inbrengen en het ledigen van de blaas



3. Spreid de schaamlippen met één hand zodat je de opening van de urinebuis kunt zien. Breng de katheter met jouw andere hand voorzichtig in stapjes van ongeveer 2 cm in de urinebuis. Ga door met het inbrengen van de katheter totdat de urine begint te stromen en ga dan nog iets verder. Wanneer de urine nog maar langzaam druppelt, verwijder je de katheter.



4. De katheter kan voor het weer meenemen of weggooien worden gesloten door de katheter volledig in de houder te steken. De katheter moet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. De houder is recyclebaar en kan, als de katheter niet terug gestopt is in de houder, worden weggegooid in overeenstemming met de lokale richtlijnen voor recyclebaar afval.



Lees vóór gebruik de uitgebreide gebruiksaanwijzing, die je los aantreft in de doos. Hierin vind je informatie over contra-indicaties en waarschuwingen.

Coloplast Care

Ondersteuning en informatie

Katheteriseren hoeft je niet te belemmeren in jouw dagelijks leven. De specialisten van Coloplast Care zijn bereikbaar voor praktische ondersteuning en informatie over het gebruik van onze katheters en kunnen helpen bij het inpassen van zelfkatheterisatie in jouw dagelijks leven.

De voordelen van Coloplast Care:

- ✓ Directe telefonische ondersteuning van specialisten.
- ✓ Mogelijkheid tot een gratis huisbezoek van een verpleegkundige voor meer advies.
- ✓ Praktische tips en adviezen bij het inpassen van zelfkatheterisatie in het dagelijks leven.

Coloplast Care geeft je vertrouwen en helpt je op weg, zodat je het leven kan leiden zoals je wilt. Blijf de dingen doen die je al deed!



www.katheter.coloplastcare.be




Luja™ Vrouw

Bestellen

Luja Vrouw is te bestellen bij jouw gebruikelijke verkooppunten.
Je hebt de volgende informatie nodig.

Assortiment

	Charrière	Verpakking	Lengte		Art.nr.	CNK
			Totaal*	Effectief**		
Luja Vrouw	Ch 10	30	14 cm	9 cm	20051	4832465
Luja Vrouw	Ch 12	30	14 cm	9 cm	20052	4832457
Luja Vrouw	Ch 14	30	14 cm	9 cm	20054	4832440
Luja Vrouw	Ch 16	30	14 cm	9 cm	20056	4832432

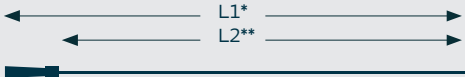

* Totale lengte: lengte van de katheter incl. connector.
** Effectieve lengte: lengte van de katheter die effectief kan worden ingebracht.

Neem contact op met Coloplast Care als je vragen of opmerkingen hebt:



0800 12 888



www.coloplast.be



cs@coloplast.com

Ostomy Care | Continence Care | Advanced Wound Care | Interventional Urology | Voice and Respiratory Care

Coloplast Belgium NV/SA, De Gijzeleer Industrial Park, Guido Gezellestraat 121, B-1654 Beersel/Huizingen. V.U.: E. Binnemans
www.coloplast.be Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2025-03.
Alle rechten voorbehouden. PM-36240