



NOUVEAU
sonde
souple


Découvrez le nouveau *SpeediCath*[®] *Soft* pour hommes

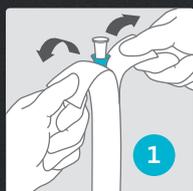

1 Tenir l'emballage droit lors de l'ouverture

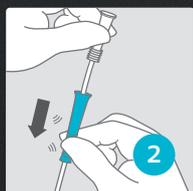

2 Relâcher le manchon d'insertion et pincer la section ondulée

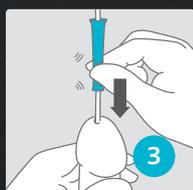

3 Utiliser une technique de pincement et de relâchement par étapes pour insérer



Aidez les patients à prendre un bon départ.
Pour des instructions plus détaillées, consultez le document 'mode d'emploi' livré avec les produits.

 Veuillez lire attentivement le mode d'emploi livré avec le produit avant utilisation.

En vérité

L'ensemble du processus devrait être rapide¹⁻²

Le confort est important pour les utilisateurs de sondes intermittentes. C'est pourquoi le nouveau SpeediCath® Soft est livré pré-lubrifié, il est donc immédiatement prêt à l'emploi.



Préparation rapide

Lors de l'ouverture de l'emballage, SpeediCath Soft est immédiatement prêt à l'emploi, car il est pré-lubrifié avec un revêtement hydrophile unique pour une insertion en douceur.


Sonde souple

SpeediCath Soft est facile à utiliser la première fois, et à chaque fois.



Prise en main assurée

Le manchon d'insertion est fabriqué à partir d'un matériau souple et flexible, et est conçu pour assurer une prise en main ferme de la sonde. Le manchon facilite l'insertion sans toucher la sonde, ni son embout.

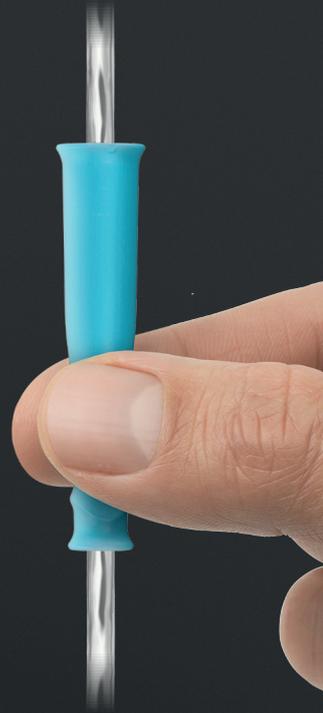

1. Pascoe G, Clovis S. Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterization. Br J Nurs 2001;10(5):325-9.

2. De Ridder DJ, Everaert K, Fernández LG, et al. Intermittent catheterisation with hydrophilic-coated catheters (SpeediCath®) reduces the risk of clinical urinary tract infection in spinal cord injured patients: a prospective randomised parallel comparative trial. Eur Urol 2005;48(6):991-5.

Détails du produit SpeediCath Soft

Longueur de la sonde	Disponible en CH	Sondes / emballage	Références	Codes APB
33 cm	10	30	27010	4570-925
33 cm	12	30	27012	4570-941
33 cm	14	30	27014	4571-006
33 cm	16	30	27016	4571-014