




La sécurité et le confort à l'hôpital et au domicile

Une solution adaptée pour chaque patient stomisé

Des solutions dès le *premier* *jour* et pour la suite

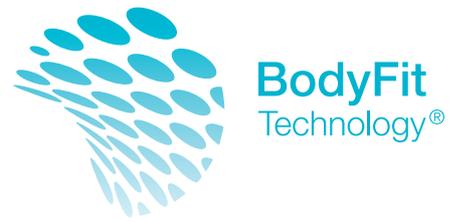

La vaste gamme SenSura® Mio vous permet d'offrir la solution appropriée à vos patients dès le tout premier jour. En effet, la gamme est à la fois vaste et complète depuis l'ajout des familles SenSura® Mio High Output et SenSura® Mio Post-op. Ces dernières se caractérisent, elles aussi, par la technologie BodyFit®, qui garantit un ajustement sûr et confortable quelle que soit la morphologie de vos patients.

Les caractéristiques de SenSura® Mio

La gamme SenSura® Mio donne à vos patients la confiance dont ils ont besoin pour mener une vie active grâce à trois caractéristiques :

Un protecteur élastique unique



Le protecteur élastique, doté de la technologie BodyFit, constitue la base de tous les protecteurs SenSura® Mio. Il épouse parfaitement les formes et suit tous les mouvements du corps lorsque le patient bouge, se baisse ou s'incline.

Une matière discrète



Avec son voile doux 100 % textile, il ressemble moins à un dispositif médical et plus à un vêtement ou un accessoire. Sa couleur neutre a été spécialement choisie pour rester invisible sous les vêtements, même blancs.

Un filtre fiable



Chaque appareillage est doté d'un préfiltre circulaire spécialement développé pour offrir davantage de protection contre l'obstruction du filtre. Réduction prouvée des ballonnements de 61%.¹

SenSura[®] Mio Post-op & High Output

Appareillages SenSura® Mio Post-op 1 pièce

Tout le monde peut désormais trouver une solution adaptée dans notre vaste gamme SenSura® Mio. Vos patients peuvent bénéficier des avantages de la gamme SenSura® Mio Post-op 1 pièce dès le tout premier jour.



Gamme SenSura® Mio Post-op 1 pièce : les avantages



Une fenêtre facilite l'accès direct à la stomie en cas de besoin.



Drainage efficace des selles par un robinet de vidange souple qui peut être connecté à une poche collectrice si nécessaire.



Une graduation sur la poche transparente offre une indication visuelle du volume d'effluents dans la poche.

Sensura® Mio - Système 1 pièce Post-opératoire

Poche de recueil transparente post-opératoire pourvue d'une fenêtre avec un couvercle fixe, d'une graduation et d'un robinet de vidange élargi adaptable à différents sacs de nuit.



Poche	Diamètre	Réf.	CNK	Emballage
Stérile	10-70mm	18680	3639-861	5
Stérile	10-100mm	18681	3639-879	5
Non-stérile	10-70mm	18690	3639-887	5
Non-stérile	10-100mm	18691	3639-895	5

Appareillages SenSura® Mio High Output 1 pièce

La gamme SenSura® Mio High Output 1 pièce offre une solution idéale pour les patients iléostomisés ou récemment opérés. Grâce à la technologie BodyFit®, vos patients profitent de plus de sécurité et de confort.



Gamme SenSura® Mio High Output 1 pièce : les avantages



Drainage efficace des selles par un robinet de vidange qui peut être connecté à une poche collectrice si nécessaire.



Disponible avec protecteur cutané plat ou convexe, en fonction du besoin du patient.



Disponible avec une découpe maximale de 70 ou 100mm pour les grandes stomies.



Une graduation sur la poche transparente offre une indication visuelle du volume d'effluents dans la poche.

SenSura® Mio - Système 1 pièce High Output

Poche transparente ou avec fenêtre d'inspection, voile textile, robinet de vidange élargi et filtre circulaire. Disponible avec protecteurs cutanés plats ou convexes.



Protecteur	Poche	Diamètre	Réf.	CNK	Emballage
Plat	Fenêtre d'inspection	10-70mm	18660	3639-788	10
Plat	Fenêtre d'inspection	10-100mm	18661	3639-796	10
Plat	Transparente	10-70mm	18665	3639-804	10
Plat	Transparente	10-100mm	18666	3639-812	10
Convexe Soft	Fenêtre d'inspection	10-50mm	18670	3639-820	10
Convexe Soft	Transparente	10-50mm	18671	3639-838	10
Convexe Light	Fenêtre d'inspection	10-43mm	18675	3639-846	10
Convexe Light	Transparente	10-43mm	18676	3639-853	10

Appareillages SenSura[®] Mio High Output 2 pièces

Grâce à la gamme SenSura[®] Mio High Output 2 pièces, vous pouvez toujours proposer une solution idéale aux patients iléostomisés ou récemment opérés. Dotées de la technologie BodyFit[®] unique, ces poches offrent un ajustement sûr et confortable pour toutes les morphologies.



Gamme SenSura[®] Mio High Output 2 pièces : les avantages



Disponible aussi en version Mini pour plus de discrétion ou pour la transition au domicile (uniquement pour la version Click).



Drainage efficace des selles par un robinet de vidange qui peut être connecté à une poche collectrice si nécessaire.



Le choix du couplage Click ou Flex, avec protecteur cutané plat ou convexe, en fonction du choix des patients.



La couleur grise neutre a été spécialement étudiée pour sa discrétion sous les vêtements, même blancs.

SenSura[®] Mio Click - Système 2 pièces High Output

Poche en tissu avec fenêtre d'inspection, robinet de vidange élargi, filtre circulaire et système anti-reflux. Compatible avec protecteurs cutanés Click plats ou convexes.



Poche	Diamètre	Réf.	CNK	Emballage
Maxi	50mm	18601	3639-705	10
Maxi	60mm	18602	3639-713	10
Maxi	70mm	18603	3639-721	10
Mini*	40mm	18620	3639-739	10
Mini*	50mm	18621	3639-747	10
Mini*	60mm	18622	3639-754	10

* Sans système anti-reflux

SenSura® Mio Flex - Système 2 pièces High Output

Poche en tissu avec fenêtre d'inspection, robinet de vidange élargi, filtre circulaire et système anti-reflux.
Compatible avec protecteurs cutanés Flex plats ou convexes.



Poche	Diamètre	Réf.	CNK	Emballage
Maxi	50mm	18650	3639-762	10
Maxi	70mm	18651	3639-770	10





À l'hôpital... des débuts simples pour le patient

Il n'est pas facile de s'habituer à une stomie. Grâce à Sensura[®] Mio, vos patients pourront utiliser la même gamme de produits à l'hôpital et au domicile, ce qui leur laisse davantage de temps et d'énergie pour faire face aux autres adaptations à apporter à leur mode de vie. Utiliser la même gamme vous permettra de gagner du temps pour l'apprentissage de la manipulation du matériel.

Gammes SenSura[®] Mio Post-op et High Output

Post-op

pour applications
stériles et non stériles

Stérile - transparent



Non stérile - transparent



High Output 1 pièce

disponible avec
protecteur plat ou
convexe

Avec fenêtre de contrôle



Transparent



High Output 2 pièces

disponible avec
système de couplage
Click ou Flex – poches
Click disponibles en
deux tailles

Click avec fenêtre de contrôle



Flex avec fenêtre de contrôle



À la maison... *l'esprit tranquille*

La gamme SenSura® Mio était déjà l'une des gammes les plus étendues en matière de soins de stomie. Avec l'ajout des familles High Output et Post-op, la gamme SenSura® Mio est aujourd'hui parfaitement complète. En tant que professionnel de la santé, vous pouvez ainsi toujours proposer une solution sûre et sur mesure à tous vos patients, à toutes les étapes de leur nouvelle vie avec une stomie.

Gamme SenSura® Mio

1 pièce

SenSura® Mio avec protecteur plat



SenSura® Mio avec protecteur convexe



2 pièces Click

SenSura® Mio avec protecteur plat



SenSura® Mio avec protecteur convexe



2 pièces Flex

SenSura® Mio avec protecteur plat



SenSura® Mio avec protecteur convexe





SenSura® Mio
Une *gamme complète*
pour vos patients



Systeme de soins pour fistules et plaies abdominales

Systeme de Soins pour *Fistules et Plaies Abdominales*

Plus de confort pour le patient et gain de temps pour le personnel infirmier.

Le grand défi du soin des fistules

Le soin des fistules constitue l'un des principaux défis dans le secteur de la santé. Coloplast s'est entretenu personnellement avec des infirmiers et infirmières spécialisés concernant les défis actuels. La demande d'innovation en matière de soin des fistules était particulièrement grande.

Offrir le confort aux patients

Le Systeme Coloplast de Soins pour Fistules et Plaies Abdominales possède une plaque adhésive flexible. Le système s'adapte au contour abdominal du patient et adhère bien à la peau.

Le protecteur cutané 'laminé' est constitué de deux couches. La première couche qui est en contact avec la peau, est très flexible et épouse parfaitement les reliefs de la peau. La deuxième couche résistante à l'érosion garantit la protection de la peau contre les fuites.

Le mode d'emploi disponible dans les boîtes décrit étape par étape comment installer le système Coloplast de soins pour fistules et plaies abdominales.



Pompe de gonflage de l'anneau

Protecteur cutané durable

Le protecteur cutané à deux couches adhère bien à la peau et protège contre les fuites.

Anneau gonflable

L'anneau gonflable se trouve directement sous la fenêtre. Il empêche ainsi les fuites via la fenêtre, celle-ci est également plus facile à placer.

Cible de découpe

La cible de découpe est conçue pour découper avec plus de précision la forme qui correspond à la fistule ou à la plaie.

Accès drain

L'accès drain peut être placé facilement sur la fenêtre flexible pour y introduire un drain (Charrière du drain 18-30).

Fenêtre flexible

La fenêtre flexible est simple à placer et à retirer. Elle permet aux infirmiers (ères) d'accéder à la plaie afin de la soigner.



Canaux d'évacuation

Les canaux d'évacuation sont pourvus d'un petit robinet permettant de drainer facilement la fistule/plaie. La valve anti-reflux évite tout reflux.

Poche de drainage pour le lit

Cette poche de drainage (2000 ml) peut recueillir un grand volume de liquide et se combine facilement au système de soins pour fistules et plaies abdominales.



Assortiment

	Description	Dimensions	Référence	CNK	Emballage
	Système de Soins pour Fistules et Plaies Abdominales Mini comprend: 1 accès drain 1 fenêtre flexible 1 cible de découpe & film protecteur	Découpable 104 - 159 mm	14055	2442-689	6 pièces/boîte 2 boîtes/carton
	Système de Soins pour Fistules et Plaies Abdominales Midi comprend: 1 accès drain 1 fenêtre flexible 1 cible de découpe & film protecteur 1 clamp	Découpable 156 - 228 mm	14065	2442-697	3 pièces/boîte 2 boîtes/carton
	Système de Soins pour Fistules et Plaies Abdominales Maxi comprend: 1 accès drain 1 fenêtre flexible 1 cible de découpe & film protecteur 1 clamp	Découpable 208 - 297 mm	14075	2442-705	3 pièces/boîte 2 boîtes/carton
	Fenêtre flexible, Mini, avec filtre	Compatible avec le Système de Soins pour Fistules et Plaies Abdominales Mini	14020	2442-713	10 pièces/boîte 10 boîtes/carton
	Fenêtre flexible, Midi, avec filtre	Compatible avec le Système de Soins pour Fistules et Plaies Abdominales Midi	14030	2442-721	10 pièces/boîte 10 boîtes/carton
	Fenêtre flexible, Maxi, avec filtre	Compatible avec le Système de Soins pour Fistules et Plaies Abdominales Maxi	14040	2442-739	10 pièces/boîte 10 boîtes/carton
	Poche de drainage pour le lit	Contenu 2000 ml Tube 1,5 m Intérieur ø 14 mm	14010	2442-747	10 pièces/boîte 2 boîtes/carton
	Accès drain		14015	2442-754	12 pièces/boîte 10 boîtes/carton

Poches de drainage

Poches de drainage

Poche vidable stérile avec protecteur cutané hydrocolloïde, pour le recueil des liquides de drainage post-opératoires et les fistules.

Adhérence et étanchéité optimales

- Adhésivité immédiate même sur des plaies très humides.
- Temps de port prolongé.

Facile à utiliser et sûr

- Cible de prédécoupe centrale et périphérique.
- Découpable suivant la difficulté du site à appareiller.
- Retrait du protecteur sans résidu.




Sécurité d'emploi

- Le protecteur cutané hydrocolloïde garantit souplesse et confort.
- Valve anti-reflux. Les liquides drainés ne "remontent" pas.

Evaluation et contrôle immédiats

- Graduation précise et transparence totale de la poche.
- Visibilité parfaite, sans manipulation.
- Evaluation et contrôle immédiats
 - du niveau
 - des liquides drainés

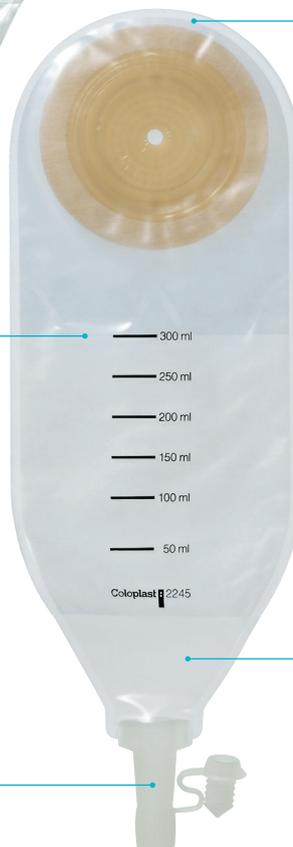

Vidange complète

- Forme longitudinale qui facilite l'évacuation totale des liquides.
- Large diamètre du robinet.
- Pas de liquide résiduel après vidange.

Etanchéité

- Fermeture hermétique.
- Bouchon avec crans de sécurité.
- Connexion universelle.


Poches de drainage

1




Simplicité du découpage grâce à la cible de prédécoupe centrale (a) et périphérique (b).

2

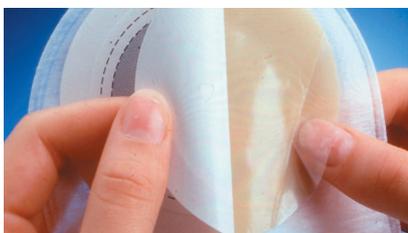

Retrait facile du papier protecteur grâce à l'onglet transparent.

3

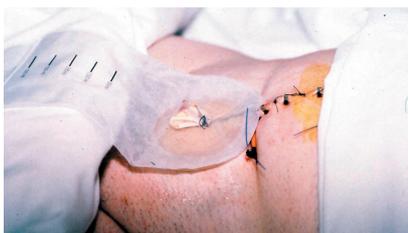

Souplesse et adaptabilité au site difficile à appareiller grâce au protecteur cutané hydrocolloïde.

4



Mesure et contrôle immédiats du niveau et des liquides drainés grâce à l'échelle de graduation et la transparence totale de la poche.

5



La connexion universelle s'adapte parfaitement à tout type de poche de recueil grâce à un robinet constitué d'une matière souple et élastique.

6



Retrait indolore et sans résidu grâce au protecteur hydrocolloïde.

Assortiment



Poche stérile	Version	Réf.	CNK	Emballage
Découpable 5-38mm	100 ml Mini	2210	1203-322	10 pcs
Découpable 5-38mm	300 ml Midi	2215	1203-330	10 pcs
Découpable 5-50mm	500 ml Maxi	2220	1203-348	10 pcs

« Ce qui m'a empêché de dormir juste avant mon opération ? La peur de l'inconnu. Et juste après l'opération, j'ai souvent eu besoin de soutien. Mais peu à peu, j'ai compris que la vie était le plus beau des cadeaux. Je fais donc de mon mieux pour accepter la stomie. »

– Yael, patient stomisé



Coloplast Care
l'accompagnant
au quotidien

Coloplast Care



Un programme de suivi personnalisé

Ce service est destiné à faciliter le retour de votre patient à domicile pendant la première année.

Les avantages du programme

- Des outils d'apprentissage à l'utilisation de l'appareillage
- Des échantillons personnalisés envoyés au domicile de votre patient
- Des magazines sur des sujets de la vie de tous les jours
- Des appels réguliers des conseillers Coloplast Care sur l'utilisation des produits Coloplast

Kit de bienvenue



Kit personnalisé & formulaire d'inscription

Magazines



Des magazines sur des sujets de la vie de tous les jours : alimentation, habillement, intimité, voyages, sports, vie sociale, ...

Suivi personnalisé



Nous sommes joignables tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Inscrivez vos patients gratuitement

sur www.coloplast.to/ProgrammeColoplastCare
ou en renvoyant le formulaire ci-joint.



Un accompagnement personnalisé



Connecter...

Après l'inscription de votre patient au programme, un conseiller Coloplast Care prend contact avec lui / elle afin de répondre aux questions pratiques relatives à l'appareillage d'une stomie.



Aider...

Les conseillers Coloplast Care sont spécialement formés pour aider vos patients à utiliser le matériel Coloplast. En appelant notre numéro gratuit, 0800 - 12 888, vos patients peuvent poser des questions sans tabou.




Répondre...

Ecouter et répondre, c'est notre coeur de métier. L'objectif de nos appels est d'améliorer la qualité de vie de vos patients, en leur apportant un soutien et des réponses sur l'utilisation des produits et en leur redirigeant vers un professionnel de santé si nécessaire.



Encourager...

En complément des appels de nos conseillers, vos patients recevront également des magazines d'information. Ces magazines abordent des sujets variés de la vie quotidienne sous forme de témoignages et de rubriques conseils. Ces informations pratiques peuvent les accompagner dans leur vie de tous les jours.

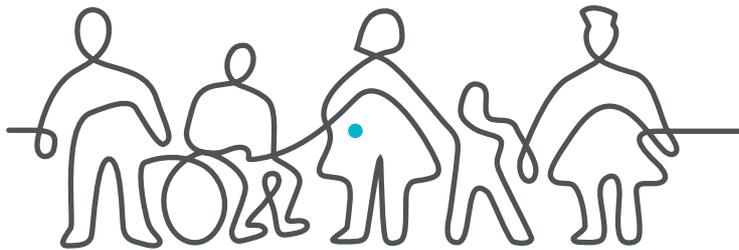

Plus forts ensemble

Aller au supermarché ou faire du sport... les espoirs et les ambitions de nos utilisateurs nous stimulent jour après jour à trouver de nouvelles manières de leur simplifier la vie.

Nous mettons constamment en question tous les aspects relatifs aux soins de santé intimes et tentons de comprendre nos utilisateurs afin d'encore mieux pouvoir anticiper leurs besoins quotidiens.

Depuis la création de Coloplast, en 1957, nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de la santé et les utilisateurs de nos produits. Non seulement pour trouver de nouvelles solutions, mais aussi pour découvrir de nouvelles façons de créer des solutions qui comblent leurs besoins particuliers. Ensemble nous sommes plus forts.