




Veiligheid & comfort van in het ziekenhuis tot thuis

Een gepaste oplossing voor elke stomadrager

Oplossingen vanaf *dag 1* en nadien

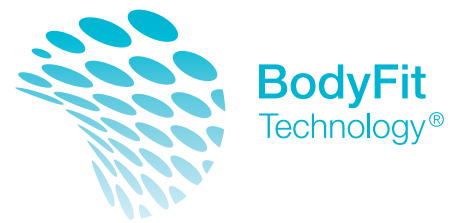

Dankzij de uitbreiding van het SenSura® Mio-assortiment met het SenSura® Mio High Output- en Post-op gamma, kunt u uw patiënten vanaf dag 1 de meest geschikte oplossing aanbieden. Ook deze gamma's kenmerken zich door de BodyFit® Technology die steeds een veilige en comfortabele pasvorm garandeert, ongeacht de lichaamsvorm van uw patiënten.

Kenmerkend voor SenSura® Mio

Er zijn drie redenen waarom het SenSura® Mio-gamma patiënten het vertrouwen geeft om een actief leven te leiden:

Een unieke elastische huidplaat




De elastische huidplaat met BodyFit® Technology vormt de basis voor alle SenSura® Mio huidplaten. Ze zorgt voor een goede pasvorm op het lichaam en volgt alle lichaamsbewegingen, ook bij bukken of buigen.

Discreet materiaal



Dankzij het gladde textiel-materiaal lijkt het zakje meer op een kledingstuk of een accessoire dan op een medisch hulpmiddel. De neutrale kleur is speciaal gekozen omdat ze onzichtbaar is onder kleding in om het even welke kleur – zelfs wit.

Een betrouwbare filter

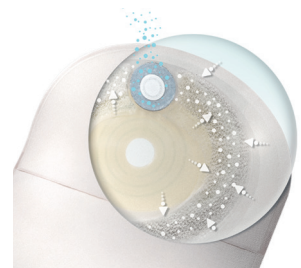

Elk opvangzakje heeft een speciaal ontworpen cirkelvormige pré-filter die beter beschermt tegen het opbollen van het zakje. Het is bewezen dat opbollen met 61% afgenomen is.¹


SenSura[®] Mio Post-op & High Output

SenSura[®] Mio *1-delig Post-op* opvangmateriaal

Voor elke stomadrager kunt u een geschikte oplossing vinden in ons uitgebreid SenSura[®] Mio-gamma. Uw patiënten kunnen reeds vanaf de eerste dag in het ziekenhuis van de voordelen van het SenSura[®] Mio Post-op 1-delig gamma genieten.



SenSura[®] Mio 1-delig Post-op gamma: de voordelen

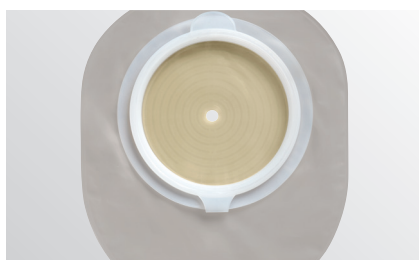

Het venster geeft onmiddellijke toegang voor controle van de stoma.



Vlotte afvoer via de zachte kraan die kan aangesloten worden op een nachtzak indien nodig.



Dankzij de schaalverdeling op de doorschijnende opvangzak kunt u het volume van de output gemakkelijk aflezen.

SenSura[®] Mio - 1-delig Post-op opvangmateriaal

De SenSura[®] Mio doorschijnende post-operatieve opvangzak is voorzien van een venster met een vast deksel, een schaalverdeling en een brede kraan die kan aangesloten worden op verschillende nachtopvangzakken.



Opvangzak	Diameter	Ref.	CNK	Verpakking
Steriel	10-70mm	18680	3639-861	5
Steriel	10-100mm	18681	3639-879	5
Niet-steriel	10-70mm	18690	3639-887	5
Niet-steriel	10-100mm	18691	3639-895	5

SenSura® Mio 1-delig High Output opvangmateriaal

Het SenSura® Mio 1-delig High Output gamma biedt een ideale oplossing, zowel voor ileostomadragers als voor nieuw geopereerden. Dankzij de unieke BodyFit® Technology genieten uw patiënten van nog meer veiligheid en comfort.




SenSura® Mio 1-delig High Output gamma: de voordelen




Vlotte afvoer via de zachte kraan die kan aangesloten worden op een nachtzak indien nodig.



Beschikbaar met een vlakke of convexe huidplaat afhankelijk van het niveau van ondersteuning dat u nodig heeft.

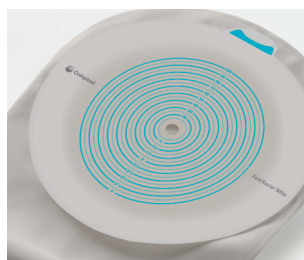

De vlakke versies zijn beschikbaar met een huidplaat die maximaal kan uitgeknipt worden op 70 of 100mm voor grote stoma's.

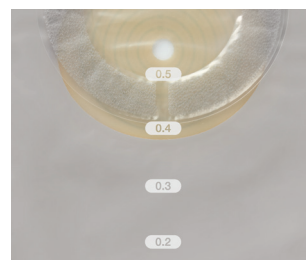

Dankzij de schaalverdeling op de doorschijnende opvangzak kunt u het volume van de output gemakkelijk aflezen.

SenSura® Mio – 1-delig High Output opvangmateriaal

De SenSura® Mio 1-delige High Output opvangzak is beschikbaar in doorschijnend of met een controlevenster en is voorzien van een bekleding in textiel, een brede kraan en een circulaire pré-filter. Deze opvangzak is beschikbaar met vlakke of convexe platen.



Huidplaat	Opvangzak	Diameter	Ref.	CNK	Verpakking
Vlak	Controlevenster	10-70mm	18660	3639-788	10
Vlak	Controlevenster	10-100mm	18661	3639-796	10
Vlak	Doorschijnend	10-70mm	18665	3639-804	10
Vlak	Doorschijnend	10-100mm	18666	3639-812	10
Convex Soft	Controlevenster	10-50mm	18670	3639-820	10
Convex Soft	Doorschijnend	10-50mm	18671	3639-838	10
Convex Light	Controlevenster	10-43mm	18675	3639-846	10
Convex Light	Doorschijnend	10-43mm	18676	3639-853	10

SenSura® Mio 2-delig High Output opvangmateriaal

De opvangmaterialen uit het SenSura® Mio 2-delig High Output gamma bieden een veilige en comfortabele pasvorm op gelijk welke lichaamsvorm dankzij de unieke BodyFit® Technology. Zo kunt u als zorgprofessional steeds een geschikte oplossing bieden, zowel voor net geopereerden als ileostomadragers.



SenSura® Mio 2-delig High Output gamma: de voordelen




Ook verkrijgbaar in een mini versie voor extra discretie in de thuis-situatie (enkel bij Click).



Vlotte afvoer via een kraan die kan aangesloten worden op een nachtzak indien nodig.



Beschikbaar met Click of Flex koppeling. Te gebruiken met vlakke of convexe huidplaat afhankelijk van het niveau van ondersteuning dat u nodig heeft.

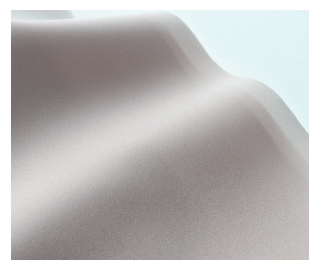

De neutrale grijze kleur van het zakje is speciaal ontworpen voor uiterste discretie onder kleding, zelfs witte kledij.

SenSura® Mio Click - 2-delig High Output opvangmateriaal

De SenSura® Mio 2-delige High Output opvangzak met controlevenster is voorzien van een bekleding in textiel, een brede kraan, een circulaire pré-filter en een anti-reflux systeem. Deze opvangzak is te gebruiken met vlakke of convexe platen.



Opvangzak	Diameter	Ref.	CNK	Verpakking
Maxi	50mm	18601	3639-705	10
Maxi	60mm	18602	3639-713	10
Maxi	70mm	18603	3639-721	10
Mini*	40mm	18620	3639-739	10
Mini*	50mm	18621	3639-747	10
Mini*	60mm	18622	3639-754	10

* Zonder anti-reflux systeem

SenSura® Mio Flex - 2-delig High Output opvangmateriaal

De SenSura® Mio 2-delige High Output opvangzak met controlevenster is voorzien van een bekleding in textiel, een brede kraan, een circulaire pré-filter en een anti-reflux systeem. Deze opvangzak is te gebruiken met vlakke of convexe platen.



Opvangzak	Diameter	Ref.	CNK	Verpakking
Maxi	50mm	18650	3639-762	10
Maxi	70mm	18651	3639-770	10





In het ziekenhuis...

een eenvoudige start voor de patiënt

Wanneer aan een stoma is niet gemakkelijk. Dankzij het uitgebreide Sensura® Mio-gamma hoeven patiënten maar één systeem aan te leren, zodat ze meer tijd en energie overhouden voor andere aanpassingen in hun leven. Bovendien betekent één assortiment van in het ziekenhuis tot thuis voor u als zorgprofessional ook een besparing in tijd om het systeem aan te leren aan uw patiënten.

Sensura® Mio Post-op en High Output gamma

Post-op

voor steriele en niet-steriele toepassingen

Steriel - doorschijnend




Niet-steriel - doorschijnend



1-delig High Output

verkrijgbaar met vlakke of convexe huidplaat

Met controlevenster

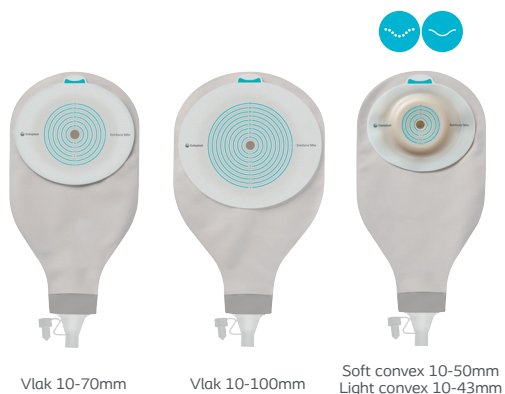


Doorschijnend



2-delig High Output

verkrijgbaar met Click of Flex koppeling – Click zakjes beschikbaar in twee maten

Click met controlevenster

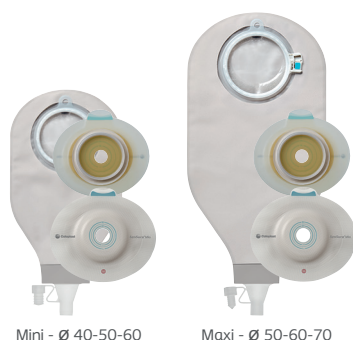

Flex met controlevenster



Thuis... zorgen voor *gemoedsrust*

Het uitgebreide SenSura® Mio-gamma was reeds één van de meest uitgebreide gamma's voor stomazorg, maar door de toevoeging van het High Output en Post-op gamma is SenSura® Mio nu een compleet assortiment. Zo kunt u als zorgprofessional steeds op maat gemaakte, veilige oplossingen bieden voor al uw patiënten in elk stadium van hun nieuwe leven met een stoma.

SenSura® Mio gamma

1-delig

SenSura® Mio met vlakke huidplaat



SenSura® Mio met convexe huidplaat



2-delig Click

SenSura® Mio met vlakke huidplaat



SenSura® Mio met convexe huidplaat



2-delig Flex

SenSura® Mio met vlakke huidplaat




SenSura® Mio met convexe huidplaat





SenSura® Mio
Een **compleet gamma**
voor uw patiënten

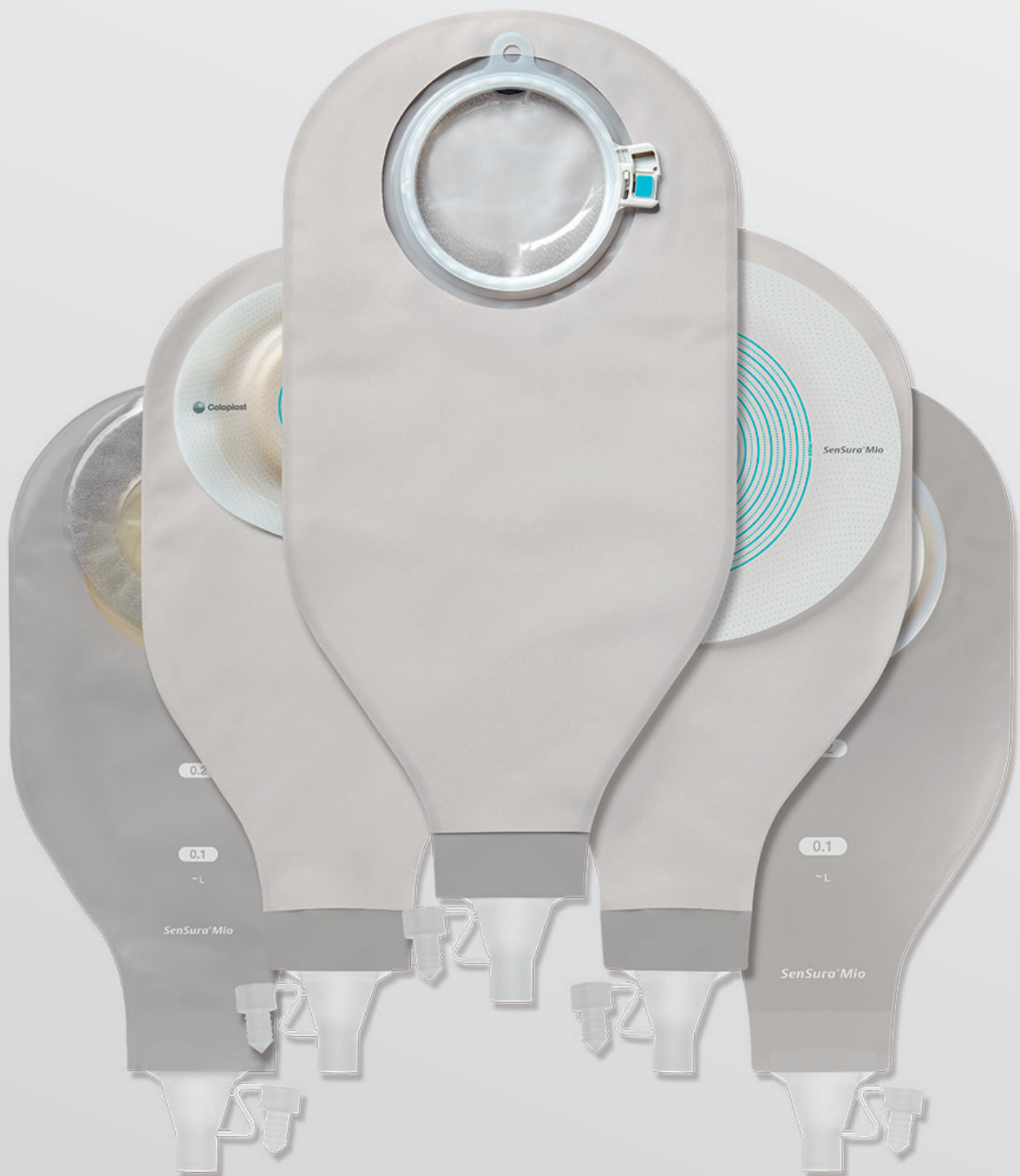

Fistel & Wond Management System

Fistel en Wond Management Systeem

Meer comfort voor de patiënt en tijdbesparend voor de verpleegkundige.

De grote uitdaging bij fistelzorg

De aanpak van fistels is een van de grootste uitdagingen binnen de gezondheidssector. Coloplast sprak persoonlijk met gespecialiseerde verpleegkundigen over de huidige uitdagingen. Steeds weer kwam de vraag naar innovatie voor fistelzorg naar boven.

Patiënten comfort bieden

Het Coloplast Fistel en Wond Management Systeem heeft een flexibele kleefplaat. Het systeem past zich aan de buikcontouren van de patiënt aan en sluit mooi aan op de huid.

De 'gelamineerde' kleefplaat bevat twee lagen. De eerste laag – die de huid raakt – is heel flexibel en vormt een veilige afdichting. De erosie resistente tweede laag verzekert dat de huid beschermd is tegen lekkage.

In de gebruiksaanwijzing van het Coloplast Fistel en Wond Management Systeem staat stap voor stap beschreven hoe het Coloplast Fistel en Wond Management Systeem kan aangebracht worden. Deze gebruiksaanwijzing bevindt zich in elke doos.



Pomp

De opblaasbare ring kan worden opgeblazen met de bijgevoegde pomp.

Duurzame kleefplaat

De flexibele tweelagige kleefplaat sluit mooi aan op de huid en beschermt deze tegen lekkage.

Opblaasbare ring

De opblaasbare ring zit direct onder de venstersluiting. Zo wordt lekkage via het venster voorkomen en kan het flexibel venster ook gemakkelijker aangebracht worden.

Knippatroon


Het knippatroon is ontworpen om het fistel – of wondpatroon nauwkeuriger te kunnen knippen.

Drainpoort

De drainpoort kan gemakkelijk op het flexibel venster worden aangebracht om een drain in te brengen (Charrière van drain 18-30).

Flexibel venster

Het flexibel venster is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen zodat de verpleegkundigen bij de wonde kunnen om deze te verzorgen.

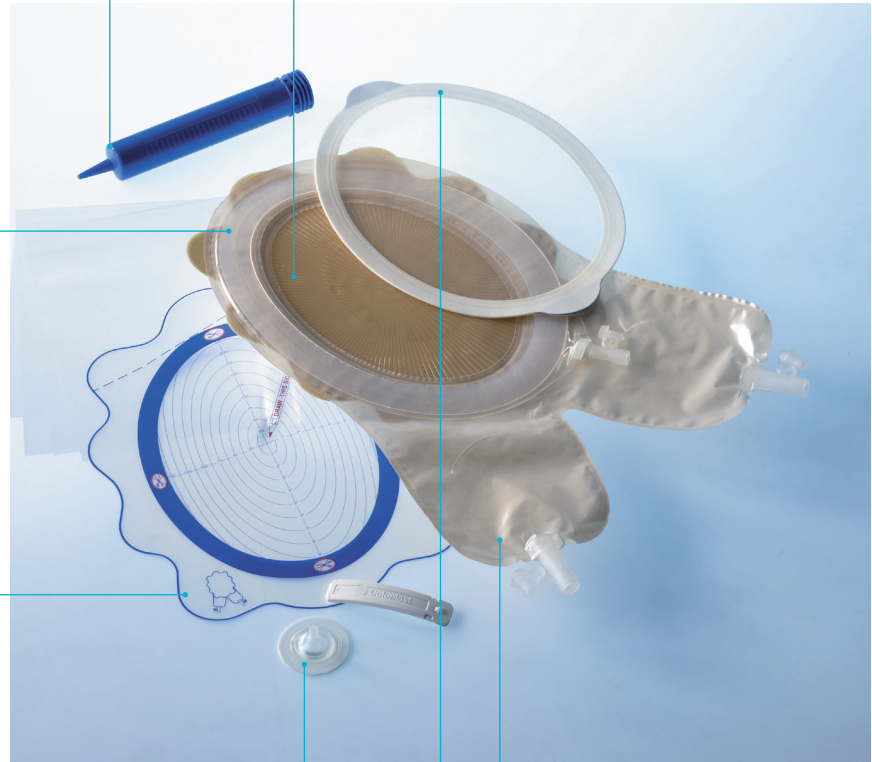

Afvoerkanalen


De afvoerkanalen zijn ontworpen met een kraantje om de fistel/wonde gemakkelijk te kunnen draineren. De anti-refluxklep voorkomt terugvloeiing.

Drainagezak voor aan het bed

Deze drainagezak (2000 ml) kan een groot volume vocht opvangen en is eenvoudig te koppelen aan het Fistel en Wond Management Systeem.



Assortiment

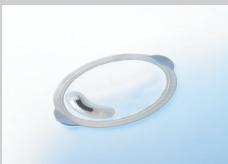	Omschrijving	Afmetingen	Referentie	CNK	Verpakking
	Fistel en Wond Management Systeem Mini bevat: 1-Drainpoort 1-Flexibel venster 1-Knippatroon & beschermfilm	Knipbaar 104 - 159 mm	14055	2442-689	6 stuks/doos 2 dozen/karton
	Fistel en Wond Management Systeem Midi bevat: 1-Drainpoort 1-Flexibel venster 1-Knippatroon & beschermfilm 1-Klem	Knipbaar 156 - 228 mm	14065	2442-697	3 stuks/doos 2 dozen/karton
	Fistel en Wond Management Systeem Maxi bevat: 1-Drainpoort 1-Flexibel venster 1-Knippatroon & beschermfilm 1-Klem	Knipbaar 208 - 297 mm	14075	2442-705	3 stuks/doos 2 dozen/karton
	Flexibel venster, Mini, met filter	Geschikt voor het Mini Fistel en Wond Management Systeem	14020	2442-713	10 stuks/doos 10 dozen/karton
	Flexibel venster, Midi, met filter	Geschikt voor het Midi Fistel en Wond Management Systeem	14030	2442-721	10 stuks/doos 10 dozen/karton
	Flexibel venster, Maxi, met filter	Geschikt voor het Maxi Fistel en Wond Management Systeem	14040	2442-739	10 stuks/doos 10 dozen/karton
	Drainagezak voor aan bed	Inhoud 2000 ml Tube 1,5 m Binnen ø 14 mm	14010	2442-747	10 stuks/doos 2 dozen/karton
	Drainpoort		14015	2442-754	12 stuks/doos 10 dozen/karton

Drainagezakjes

Drainagezakjes

Steriel ledigbaar zakje met hydrocolloïde huidbeschermers voor het opvangen van post-operatief wondvocht en het verzorgen van fistels.

Optimale kleefkracht en vochtabSORPTIE

- Kleeft onmiddellijk, zelfs bij zeer vochtige wonden.
- Lange draagtijd.

Eenvoudig in gebruik

- Kan makkelijk worden uitgeknipt langs de centrale opening en aangepast via de afknipbare rand.
- Makkelijk aan te passen aan moeilijk bereikbare plaatsen.
- Geen kleefresten.

Veilig in gebruik

- De hydrocolloïde huidbeschermers staat borg voor meer soepelheid en verhoogd draagcomfort.
- De anti-refluxklep verhindert het terugvloeien van het wondvocht.

Eenvoudige observatie

- Nauwkeurige schaalverdeling en totale helderheid van de plastic van het zakje.
- Volledige zichtbaarheid zonder manipulaties.
- Ogenblikkelijke controle, observatie en opmeting van het wondseksudaat en van het vloeistofniveau.

Volledige vloeistofafvoer

- De konische vorm verzekert een totale afvoer van de vloeistof.
- Grote opening van de afvoerbuys.
- Geen vloeistofresidu na het ledigen.


Lekvrij

- Afvoer kan hermetisch gesloten worden.
- Afsluitdop heeft veiligheidsinkepingen.
- De verbindingsmogelijkheden zijn veelzijdig.




Voordelen van drainagezakjes

1

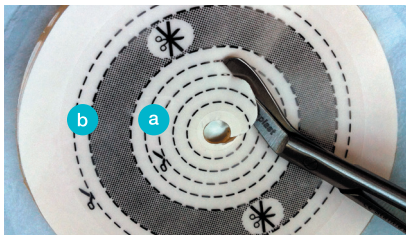


Gemakkelijk uitknipbaar via de centrale opening (a) en aanpasbaar via de afknipbare rand (b).

2

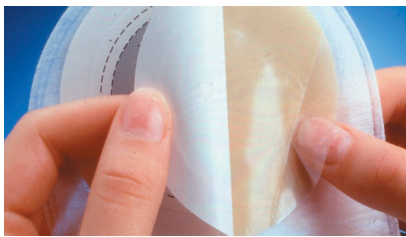


Gemakkelijk verwijderen van het beschermepapier dankzij het doorschijnende lipje op de kleefplaat.

3

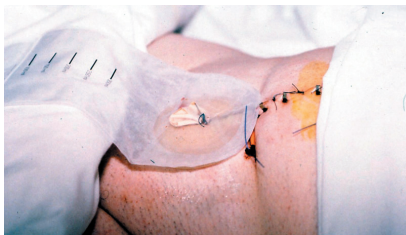

Grote soepelheid en hanteerbaarheid van de kleefplaat, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de hydrocolloïde kleefplaat.

4

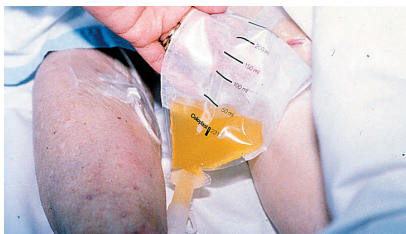

Ogenblikkelijke controle, observatie en meten van het wondexsudaat en het vloeistof-niveau dankzij de duidelijke schaalverdeling.

5



Het kraantje is aansluitbaar op alle soorten opvangzakken, dankzij het zeer soepele materiaal van het kraantje.

6



Pijnloos verwijderen van de huidbeschermmer en dit zonder kleefresten dankzij de hydrocolloïde kleefplaat.

Assortiment



Steriel zakje	Versie	Ref.	CNK	Verpakking
Uitknipbaar 5-38 mm	100 ml Mini	2210	1203-322	10 stuks
Uitknipbaar 5-38 mm	300 ml Midi	2215	1203-330	10 stuks
Uitknipbaar 5-50 mm	500 ml Maxi	2220	1203-348	10 stuks

“Wat hield mij wakker vlak voor mijn operatie? Angst voor het onbekende. En net na de operatie had ik vaak steun nodig. Maar gaandeweg realiseerde ik me dat leven het mooiste geschenk is, dus doe ik mijn best om de stoma te aanvaarden.”

– Yael, stomadrager



Coloplast Care
Begeleiding voor elke dag

Coloplast Care

Een gepersonaliseerd begeleidingsprogramma



Deze dienst werd ontwikkeld om uw patiënt in het eerste jaar na de operatie te begeleiden en zijn of haar terugkeer naar huis te vergemakkelijken.

De voordelen van het programma

- Hulpmiddelen bij het gebruik van het opvangmateriaal
- Gratis stalen op maat opgestuurd naar het thuisadres van uw patiënt
- Nieuwsbrieven die uw patiënt begeleiden in zijn of haar dagelijkse stomaverzorging
- Regelmatig telefonische contacten met onze Coloplast Care medewerkers

Startkit



Gepersonaliseerde kit en inschrijvingsfolder

Magazines



Magazines over verschillende onderwerpen: voeding, kledij, intimiteit, reizen, sporten, sociaal leven, ...

Persoonlijke opvolging



Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Schrijf uw patiënten nu gratis in op

www.coloplast.to/ColoplastCareProgramma of door het formulier in bijlage terug te sturen.



Een gepersonaliseerd begeleidingsprogramma



Contact opnemen...

Na inschrijving voor ons programma zal een Coloplast Care medewerker contact met uw patiënt opnemen om praktische vragen over het stoma-opvangmateriaal te beantwoorden.



Hulp bieden...

De Coloplast Care medewerkers zijn speciaal opgeleid om uw patiënt te helpen bij het gebruik van zijn of haar materiaal. Wanneer uw patiënt ons gratis nummer 0800-12888 draait, kan hij of zij bij ons terecht voor al zijn of haar vragen in alle discretie.




Vragen beantwoorden...

Luisteren en oplossingen bieden is de hoofdtaak van Coloplast. Onze doelstelling is de levenskwaliteit van uw patiënten te verbeteren door hen te steunen en een antwoord te geven op al hun vragen over dagelijkse stomaverzorging. Voor specifieke vragen kunnen wij uw patiënt doorverwijzen naar de juiste professionele zorgverlener.



Uw patiënt steunen...

Naast oproepen van onze Coloplast Care medewerkers zenden wij uw patiënt eveneens de Coloplast Care magazines. Deze bevatten artikels en verhalen uit het alledaagse leven en staan boordevol praktische tips om het leven van uw patiënten makkelijker te maken.

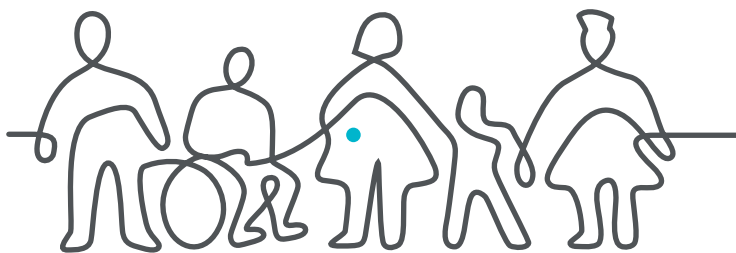

Samen sterker

Naar de supermarkt gaan of aan sport doen... de hoop en de ambities van onze gebruikers dagen ons uit om steeds weer nieuwe manieren te vinden om hun leven eenvoudiger te maken.

We stellen constant elk aspect van intieme gezondheidszorg ter discussie en proberen onze gebruikers te begrijpen, om nog beter te kunnen anticiperen op hun dagelijkse behoeften.

Sinds de oprichting van Coloplast in 1957 hebben we nauw samengewerkt met zorgprofessionals en gebruikers van onze producten. Niet enkel om nieuwe oplossingen te vinden, maar ook om nieuwe manieren te vinden om oplossingen te creëren die voldoen aan hun speciale behoeften. Samen zijn we sterker.