



SenSura[®] Mio Concave

Une solution pour les ventres ronds

SenSura[®] Mio Concave



*« L'ajustement de
Sensura Mio
Concave s'adapte
si bien que je ne
dois jamais penser
à ma stomie »*

SenSura[®] Mio Concave



SenSura[®] Mio Concave avec protecteur cutané innovant en forme d'étoile

Le système concave est conçu pour les zones péristomiales bombées. Il convient aux personnes stomisées qui présentent des zones bombées telles qu'en cas de :

- › Gros ventres ou ventres ronds
- › Obésité
- › Plis du ventre
- › Eventrations

Les trois critères décisifs

Pour les personnes stomisées qui présentent des zones bombées, l'appareillage doit répondre à trois exigences essentielles afin de garantir une adhésion sûre et fiable. La gamme SenSura[®] Mio Concave offre des solutions adaptées à ces besoins.

Défis



Pas de formation de plis

Les appareillages plats ne peuvent pas être appliqués sur des surfaces courbes. Les plis qui en résultent ne sont pas totalement étanches et peuvent provoquer des fuites.



Soutien de la stomie

La stomie et la zone péristomiale changent selon que la personne bouge, soit debout, assis(e) ou allongé(e).



Adhésion sûre

La zone péristomiale bombée suit les mouvements du corps et nécessite par conséquent une adaptation très sûre.



Solutions



Protecteur cutané en forme d'étoile avec pétales

Comme une étoile, les pétales de la plaque entourent les courbures sans former de plis.



Anneau et zone de stabilité

Ils offrent la stabilité et la flexibilité nécessaires lorsque la forme de la stomie change selon les mouvements effectués.



Zones flexibles et protecteur cutané élastique

Ils permettent une adaptation parfaite à la forme bombée du corps lorsque la personne bouge.

Le protecteur cutané en forme d'étoile




Le protecteur cutané en forme d'étoile doté de la technologie BodyFit® augmente la surface de contact entre le protecteur cutané et la peau péristomiale pour une adhérence optimale de l'appareillage aux zones de stomie bombées.

Pétales

Ils entourent les protubérances sans former de plis.

Anneau de stabilité

Il renforce la zone interne autour de la stomie et sert d'orientation lors de l'application de l'appareillage.

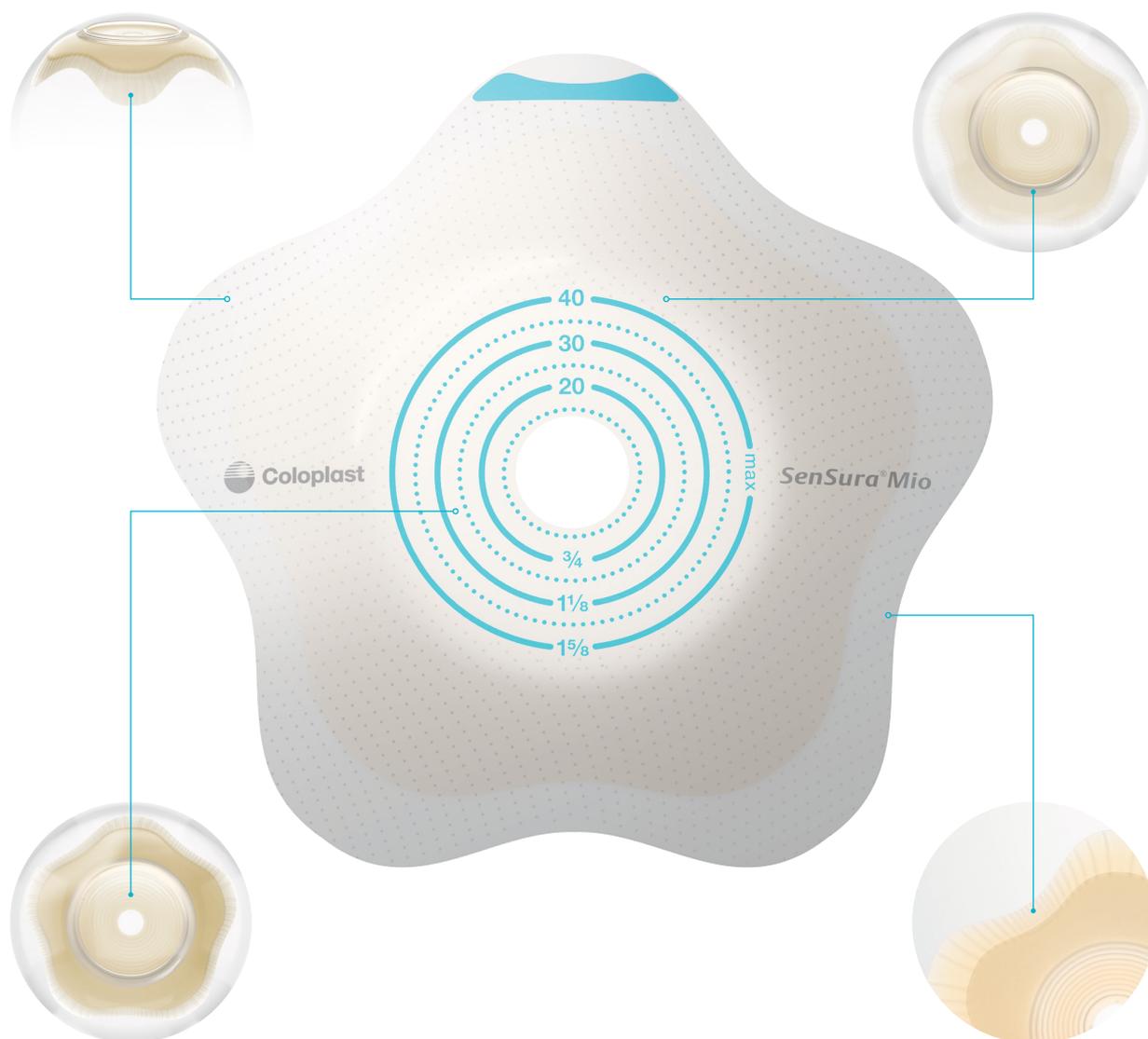

Zone de stabilité

Les estampages assurent un ajustement sûr et offrent la flexibilité nécessaire sans compromettre la stabilité.

Zones flexibles

Elles augmentent l'élasticité et la capacité d'adaptation de l'appareillage à chaque mouvement.


Systeme Flip-in-Form



SenSura® Mio Concave



Placer la partie intérieure

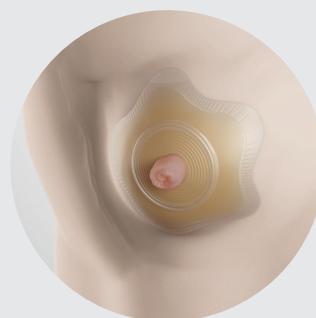

Repliez les pétales.
C'est en place!

Grâce au système Flip-in-Form, le protecteur cutané peut être appliqué facilement et en toute sécurité, puis fixé en pliant simplement les pétales.

SenSura® Mio Concave – pour tous les types de stomies

Convient à tous les types de stomies nécessitant un appareillage concave :
Colo - Iléo - Uro. Disponible en version 1 ou 2 pièces.

Appareillage
de colostomie



Appareillage
d'iléostomie



Appareillage
d'urostomie



Technologie BodyFit® – garantir un bon ajustement

La technologie BodyFit® est une propriété exclusive des protecteurs cutanés, développée pour suivre les mouvements du corps.

L'adhésif élastique de la technologie BodyFit® fait partie intégrante de tous les protecteurs cutanés SenSura® Mio. Il garantit un bon ajustement au corps.

Réceptif et élastique

- Suit les mouvements du corps pour maintenir un ajustement parfaitement stable.
- Bouge avec la peau – même en plein étirement.
- Reprend sa taille et sa forme originales.

Souple et flexible

- S'adapte aux contours de chaque corps. Garantit un ajustement sûr, y compris en cas d'éventration, de cicatrices et de plis cutanés.
- Épouse les contours du corps, même en position accroupie ou courbée.

SenSura® Mio – adapté à toutes les morphologies

Pour les morphologies planes, creuses ou bombées, SenSura® Mio est un appareillage innovant conçu pour s'adapter à tous les types de zones péristomiales ou d'abdomen :



Zones planes
(env. 50 % des porteurs)¹



Zones creuses
(env. 15 % des porteurs)¹




Zones bombées
(env. 35 % des porteurs)¹



SenSura® Mio Plat



SenSura® Mio Convexe

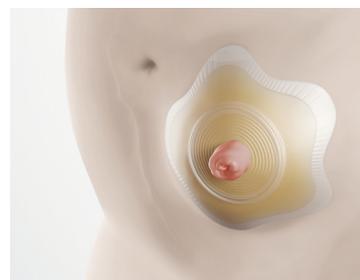

SenSura® Mio Concave

Résultat : un ajustement sûr pour toutes les morphologies



Le protecteur cutané SenSura[®] Mio

L'adhésif à deux gommes
garantit une double protection.

1. La gomme supérieure
épouse les formes de chacun et
assure une bonne adhésion.


2. La gomme inférieure
protège la peau, assure une
bonne étanchéité et contribue à
maintenir le pH de la peau.

Ensemble, les deux gommes
n'en forment plus qu'une – **le
protecteur cutané SenSura Mio.**

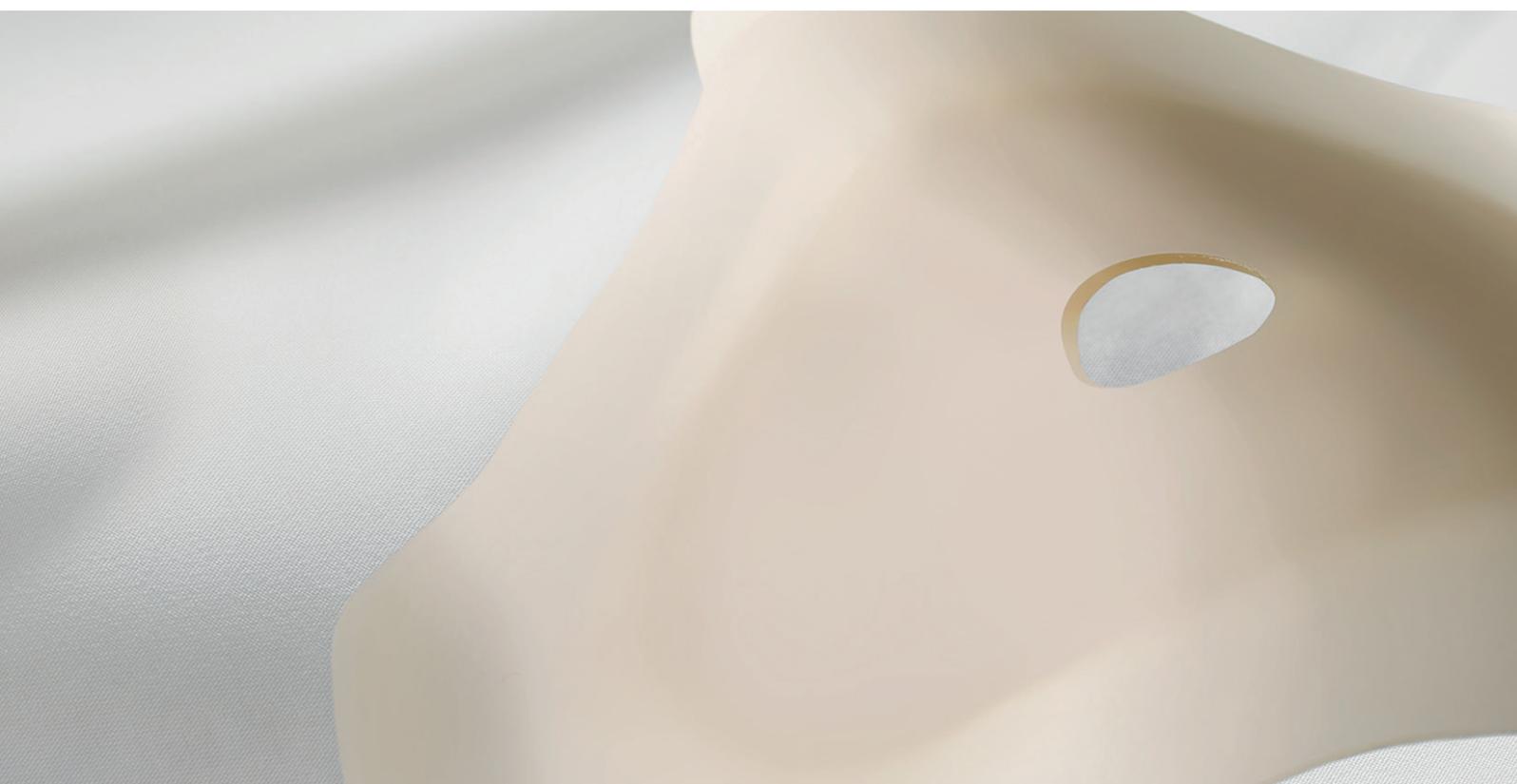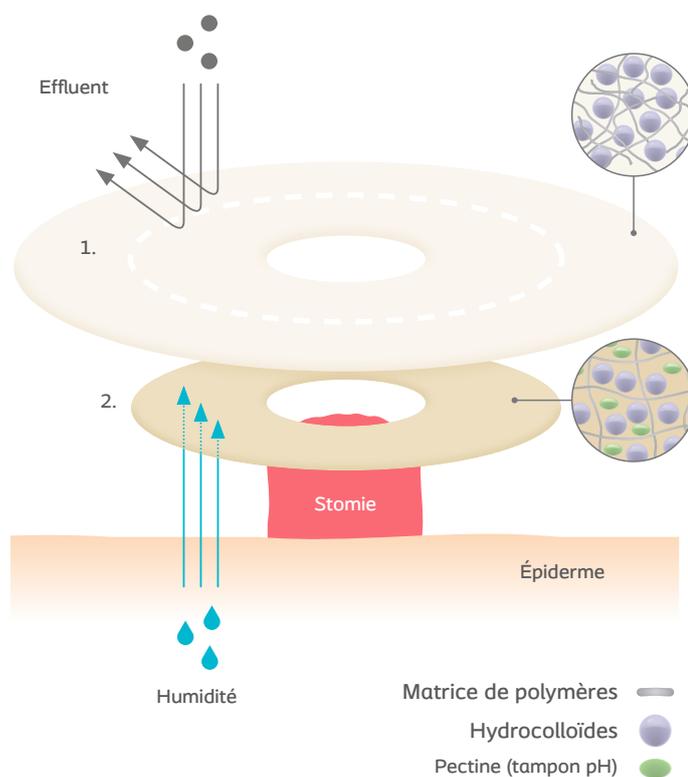

Des propriétés bien pensées pour des utilisateurs satisfaits

SenSura® Mio Concave offre une meilleure qualité de vie grâce à sa forme unique et à ses propriétés bien pensées.

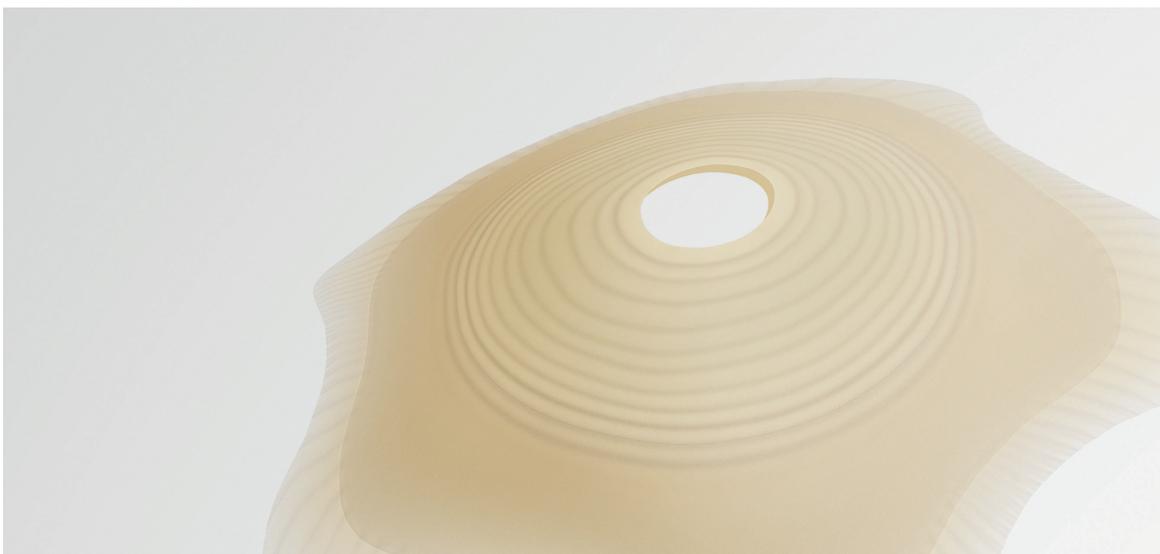

Tissu gris clair

Le tissu gris clair est agréable à porter et pratiquement invisible même sous des vêtements blancs.



Filtre circulaire efficace

Le préfiltre circulaire intégré réduit le ballonnement de la poche.



Couplage clic flexible

Un clic audible confère au porteur un plus grand sentiment de sécurité.





*« Cela me procure
une tranquillité
intérieure. La poche
fait son travail
et moi le mien. »*

Une taille adaptée à chacun

Les protecteurs cutanés de SenSura® Mio Concave sont disponibles en plusieurs tailles afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.



Le choix de la taille adaptée est basé sur le diamètre de la stomie.

Note : Si deux tailles sont nécessaires, sélectionnez d'abord la plus petite.



Assortiment SenSura[®] Mio Concave

SenSura[®] Mio Concave (système 1-pièce)

Poche fermée avec fenêtre de contrôle, *transparente



Référence	Taille/volume de la poche	Taille de la plaque	Taille de la stomie ø en mm	Nombre d'unités / boîte	Code CNK
18151	midi (327 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-814
18152	maxi (455 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-822
18160	midi (327 ml)	M	10 – 50 mm	10	4421-830
18170	maxi (455 ml)	M	10 – 50 mm	10	4421-848
18180	maxi (455 ml)	L	10 – 60 mm	10	4421-855
18185*	maxi (455 ml)	L	10 – 60 mm	10	4421-863

Poche vidangeable avec fermeture Hide-away[®] et fenêtre de contrôle, *transparente



Référence	Taille/volume de la poche	Taille de la plaque	Taille de la stomie ø en mm	Nombre d'unités / boîte	Code CNK
18251	midi (342 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-871
18252	maxi (470 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-889
18260	midi (342 ml)	M	10 – 50 mm	10	4421-897
18270	maxi (470 ml)	M	10 – 50 mm	10	4421-905
18280	maxi (470 ml)	L	10 – 60 mm	10	4421-913
18285*	maxi (470 ml)	L	10 – 60 mm	10	4421-921

Poche multi-compartiments Uro, opaque, *transparente



Référence	Taille/volume de la poche	Taille de la plaque	Taille de la stomie ø en mm	Nombre d'unités / boîte	Code CNK
18401	maxi (381 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-939
18405*	maxi (381 ml)	S	10 – 40 mm	10	4421-947

Protecteur cutané avec oeillets de fixation pour ceinture SenSura[®] Mio Concave Click (système 2-pièces) (peut être combiné avec les poches SenSura Mio 2-pièces existantes)



Référence	Taille/volume de la poche	Taille de la plaque	Taille de la stomie ø en mm	Nombre d'unités / boîte	Code CNK
18500	40 mm	S	10 – 35 mm	5	4421-954
18510	50 mm	M	10 – 45 mm	5	4421-962
18520	60 mm	L	10 – 55 mm	5	4421-970
18530	70 mm	XL	10 – 65 mm	5	4421-988

Coloplast développe des produits et des services qui simplifient la vie des hommes et des femmes qui ont des problèmes médicaux très personnels et privés. En étroite collaboration avec les utilisateurs de nos produits, nous créons des solutions adaptées à leurs besoins particuliers. C'est ce que nous appelons les soins médicaux intimes.

Nos activités couvrent les soins de stomies, les soins de continence, les soins de plaies et les soins cutanés, ainsi que les soins urologiques. Nous sommes présents dans le monde entier et employons plus de 10 000 personnes.