

A middle-aged man with short, grey hair and glasses is smiling warmly at the camera. He is wearing a light blue polo shirt and a silver watch on his left wrist. He is holding a black tennis racket with a white and red string pattern in his right hand and a bright yellow-green tennis ball in his left hand. He is standing behind a tennis net, which is visible in the foreground. The background is a blurred green landscape, suggesting an outdoor tennis court setting.

Anneau Protecteur Brava®

Choisissez plus de  
*confiance*

**Brava®**

*Brava<sup>®</sup> Protective Seal*



**Brava**  
Protective  
Seal  
Feel Secure

**Coloplast**

last

# Les utilisateurs le confirment: ***l'Anneau Protecteur Brava fait une réelle différence.***

135 personnes originaires de quatre pays (Danemark, Allemagne, Japon et États-Unis) ont évalué le nouvel Anneau Protecteur Brava®. Les résultats<sup>1</sup> ont été concluants. En effet, plus de la moitié d'entre eux préfèrent le nouvel Anneau Protecteur Brava, et 80 % affirment ne pas avoir, ou avoir peu de résidus sur la peau après utilisation.

## Autres constats

93%

affirment que l'Anneau Protecteur Brava se détache d'une seule pièce

85%

apprécient la flexibilité de l'anneau

86%

trouvent l'anneau facile à appliquer

80%

craignent moins ou ne craignent pas les fuites grâce à l'anneau

<sup>1</sup> Ensemble des données numériques issues de l'évaluation de l'Anneau Protecteur Brava 2015. Données sur le fichier.

# Double protection. *Facile à manipuler.*

L'Anneau Protecteur Brava est doté d'une nouvelle formulation en polymère\* conçue pour protéger contre les fuites et protéger la peau. Il est également facile à façonner, à appliquer et à retirer.

## Double protection



### L'Anneau Protecteur Brava est conçu pour prévenir les fuites

L'anneau assure une étanchéité optimale entre la stomie et le protecteur cutané. Une nouvelle formulation de polymère le rend résistant aux effluents agressifs. L'anneau n'est ainsi pas altéré et ne se détériore pas au contact des effluents de la stomie.

### L'Anneau Protecteur Brava est conçu pour protéger la peau.

La nouvelle formulation de polymère contribue également à garder une peau saine de deux manières distinctes. Tout d'abord, il absorbe l'humidité de la surface de la peau. Ensuite, une fois enlevé, il laisse un minimum de résidus. La zone cutanée est ainsi plus facile à nettoyer.

## Facile à manipuler




### S'adapte aux plis

L'Anneau Protecteur Brava est facile à modeler. Il s'adapte parfaitement à la zone péristomiale et peut être appliqué sur une peau irrégulière présentant des plis.

### Reste en place

L'anneau reste parfaitement en place. Il se retire proprement et facilement.

# Quand utiliser ces anneaux?

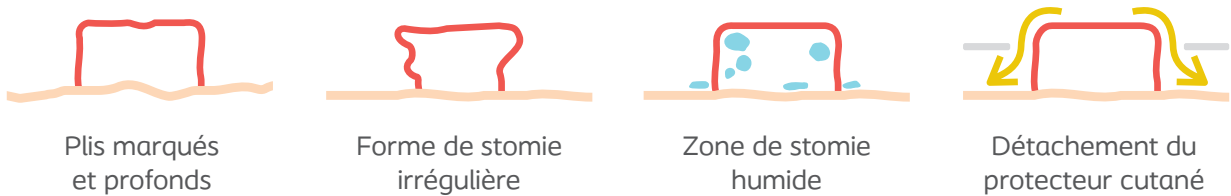

Les personnes stomisées ne rencontrent pas toutes les mêmes problèmes. Comme le montre l'illustration ci-dessus, le bon fonctionnement du matériel de stomie peut être affecté par la forme de la stomie ou par d'autres problèmes spécifiques.

L'Anneau Protecteur Brava est une première barrière contre les fuites grâce à sa fonction protectrice et sa facilité d'emploi.



# Une sécurité renforcée




Trouver le bon ajustement est le facteur clé pour prévenir les fuites et, par conséquent, assurer la santé de la peau. Les anneaux aident les utilisateurs à trouver cet ajustement. Ils sont conçus pour combler les creux et les plis de la peau autour de la stomie afin d'assurer une meilleure étanchéité entre la peau et le protecteur cutané, protégeant ainsi la peau des fuites.

Une méthode d'essai bien définie et validée<sup>2</sup> démontre que l'Anneau Protecteur Brava réduit considérablement les fuites par rapport aux produits concurrents.

## Comment avons-nous testé l'Anneau Protecteur Brava®?

L'anneau protecteur Brava® a été comparé à 3 concurrents pour évaluer sa capacité à résister à de réels effluents sous le protecteur cutané.

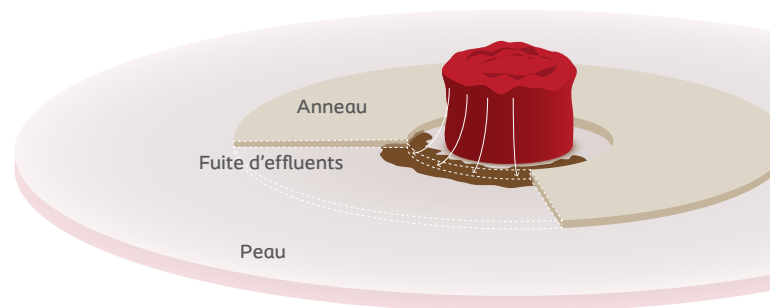

### Étape 1

Les anneaux ont été testés en laboratoire à l'aide d'un modèle de peau validé. Pour garantir l'uniformité, tous les produits ont été coupés et pressés à la même taille avec une épaisseur de 2,0 mm. La qualité de la peau a été vérifiée en mesurant la perte d'eau transépidermique.

### Étape 2

Au total, 10 répliques de 2 lots différents de chaque produit ont été appliquées sur la surface de la peau. De véritables effluents d'iléostomie ont été appliqués. Les produits ont été incubés à 32°C et agités à 80 tr/min.


### Étape 3

Après 24 heures, les produits ont été détachés de la surface de la peau et la zone de fuite sous l'anneau a été mesurée.

# Nettement *moins* de fuites.

## Zone de fuite sous l'anneau


Zone de l'anneau contaminée par des fuites après 24 heures d'incubation avec de réels effluents\*.

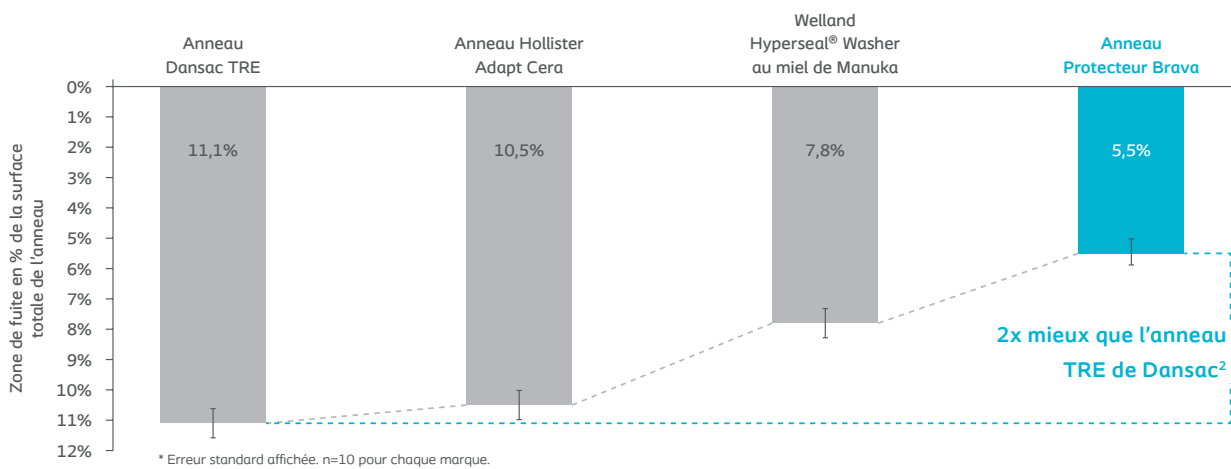

L'Anneau Protecteur Brava réduit considérablement les fuites par rapport à tous les autres anneaux testés, lors de tests utilisant de réels effluents. L'Anneau Protecteur Brava s'est avéré plus de deux fois plus efficace que l'anneau TRE de Dansac.<sup>2</sup>

Comment mesurons-nous les fuites ?

La zone de fuite a été mesurée en pourcentage de la surface totale de l'anneau.

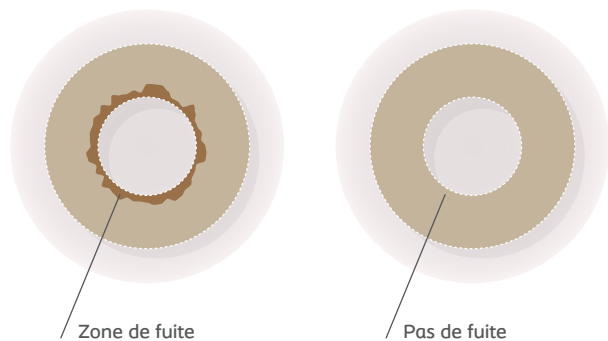

## Capacité tampon pH éprouvée

Lors du même test, il a été constaté que les capacités tampons de pH de l'Anneau Protecteur Brava correspondent à celles des autres anneaux testés, ce qui préserve la santé de la peau.<sup>2</sup>



“Je me sens confiante. Je ne m’attendais pas à un si grand effet pour un si petit produit.”

Louise, personne iléostomisée depuis 2016



*Brava® Protective Seal Convex*



# Soutien supplémentaire pour certaines stomies

Pour les personnes stomisées, un appareillage de stomie non étanche peut être une source d'inquiétudes constantes et les limiter considérablement dans leur vie quotidienne. De plus, ces fuites peuvent provoquer des irritations cutanées. L'Anneau Protecteur Brava® est conçu pour compenser les irrégularités autour de la stomie et assurer une meilleure adhérence du protecteur cutané. Il diminue considérablement les fuites comparé à d'autres anneaux sur le marché.

Dans la mesure où certaines stomies nécessitent un soutien individuel supplémentaire, nous avons développé l'Anneau Protecteur Convexe Brava®. Il est adapté aux personnes ayant une stomie à ras de la peau ou en dessous. Il protège la peau et aide à prévenir les fuites - pour une vie active et saine.

## Anneau Protecteur Convexe Brava®

### Surface adhésive de l'Anneau Protecteur


- Adhère en toute sécurité et compense les irrégularités
- Doux pour la peau

### Conçu pour une adaptation parfaite

- Bords fortement descendants pour assurer la convexité dans la zone péristomiale
- Les bords extérieurs fins s'adaptent parfaitement à la zone péristomiale

### Facile à modeler

- Facile à modeler pour s'adapter à la forme de la stomie, d'une stomie ovale à une stomie en canon de fusil
- Conserve ensuite sa forme

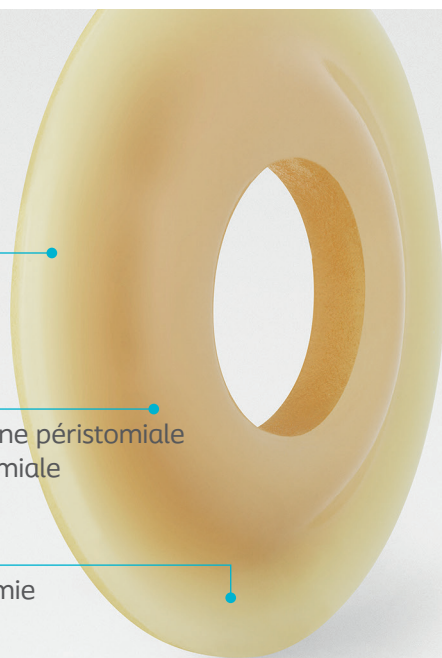


**81%**

des utilisateurs préfèrent l'Anneau Protecteur Convexe Brava® à leur ancien produit de protection cutanée.<sup>2</sup>

# Convexité individuelle pour *plus de protection*

L'Anneau Protecteur Convexe Brava® offre une convexité individuelle aux personnes ayant une stomie à ras de la peau ou en dessous. Les bords fortement descendants sont conçus pour assurer la convexité dans la zone péristomiale. L'Anneau Protecteur Convexe Brava® est doté d'une double couche adhésive, douce pour la peau du côté de la peau et résistante à l'érosion du côté de la stomie.

## Fonctionnement de l'Anneau Protecteur Convexe Brava®

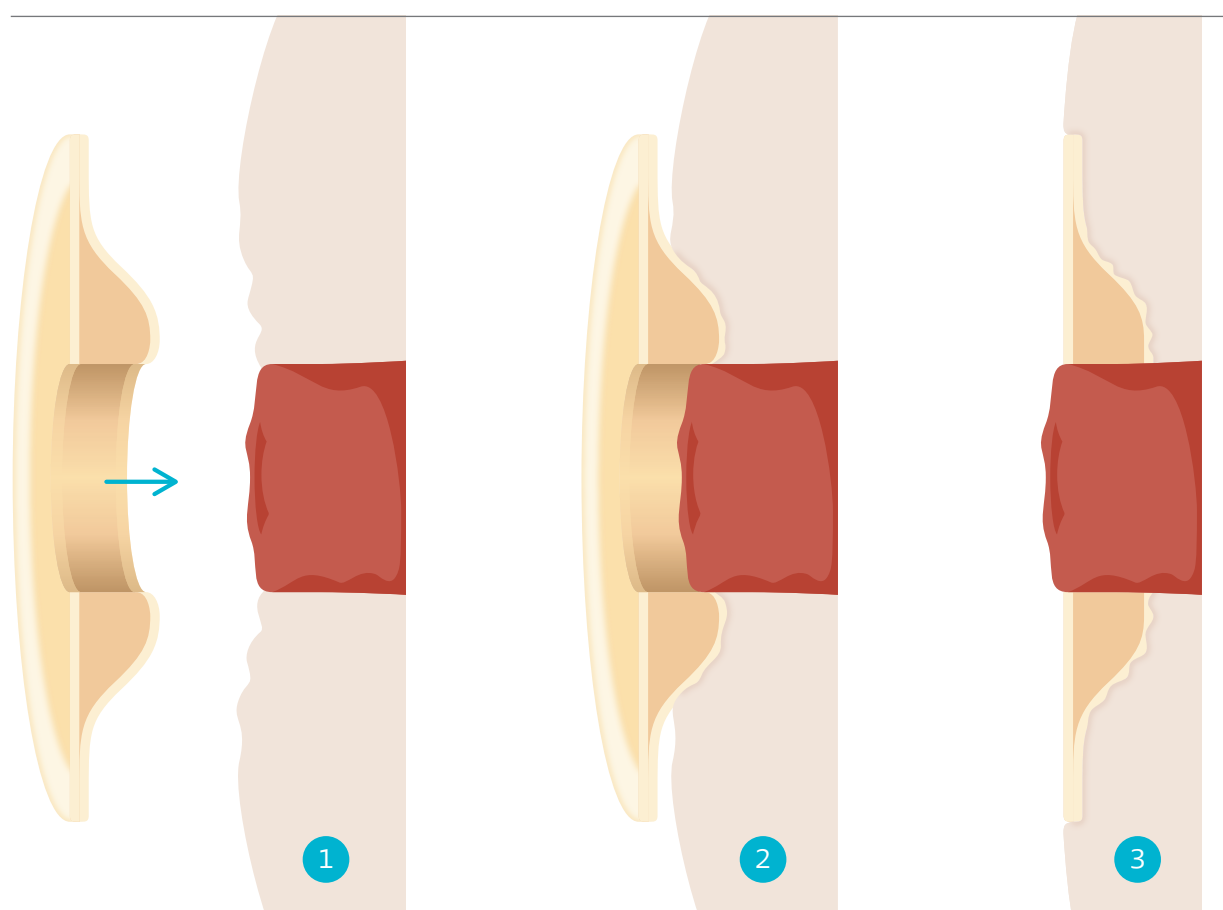

1 L'Anneau Protecteur Convexe Brava® est placé autour de la stomie.

2 Les doubles couches adhésives adhèrent à la peau en toute sécurité.

3 La forme est conçue pour assurer la convexité dans la zone péristomiale.

# La solution idéale pour les ventres ronds

Combien de personnes stomisées bénéficient de cette solution combinée ?

**35%**<sup>2</sup>

des personnes stomisées présentent une morphologie bombée.

**16%**<sup>2</sup>

d'entre elles ont une stomie à ras de la peau ou en dessous.

Ensemble, l'Anneau Protecteur Convexe Brava® et SenSura® Mio Concave créent un contact cutané de **99 %** \*

1

#### SenSura Mio Concave

SenSura® Mio Concave a été spécialement conçu pour épouser les courbes du corps. Par rapport aux plaques planes, SenSura® Mio Concave offre un meilleur contact cutané et réduit le risque de fuites sur les formes péristomiales bombées.

2


#### Anneau Protecteur Convexe Brava®

L'Anneau Protecteur Convexe Brava a été spécialement conçu pour assurer la convexité dans la zone péristomiale et offrir une protection supplémentaire contre les fuites grâce à ses doubles couches adhésives.

3

**Double protection pour les stomies à ras de la peau ou en dessous.** Ensemble, l'Anneau Protecteur Convexe Brava® et SenSura® Mio Concave créent une adhérence sûre et étanche de la plaque sur la peau.



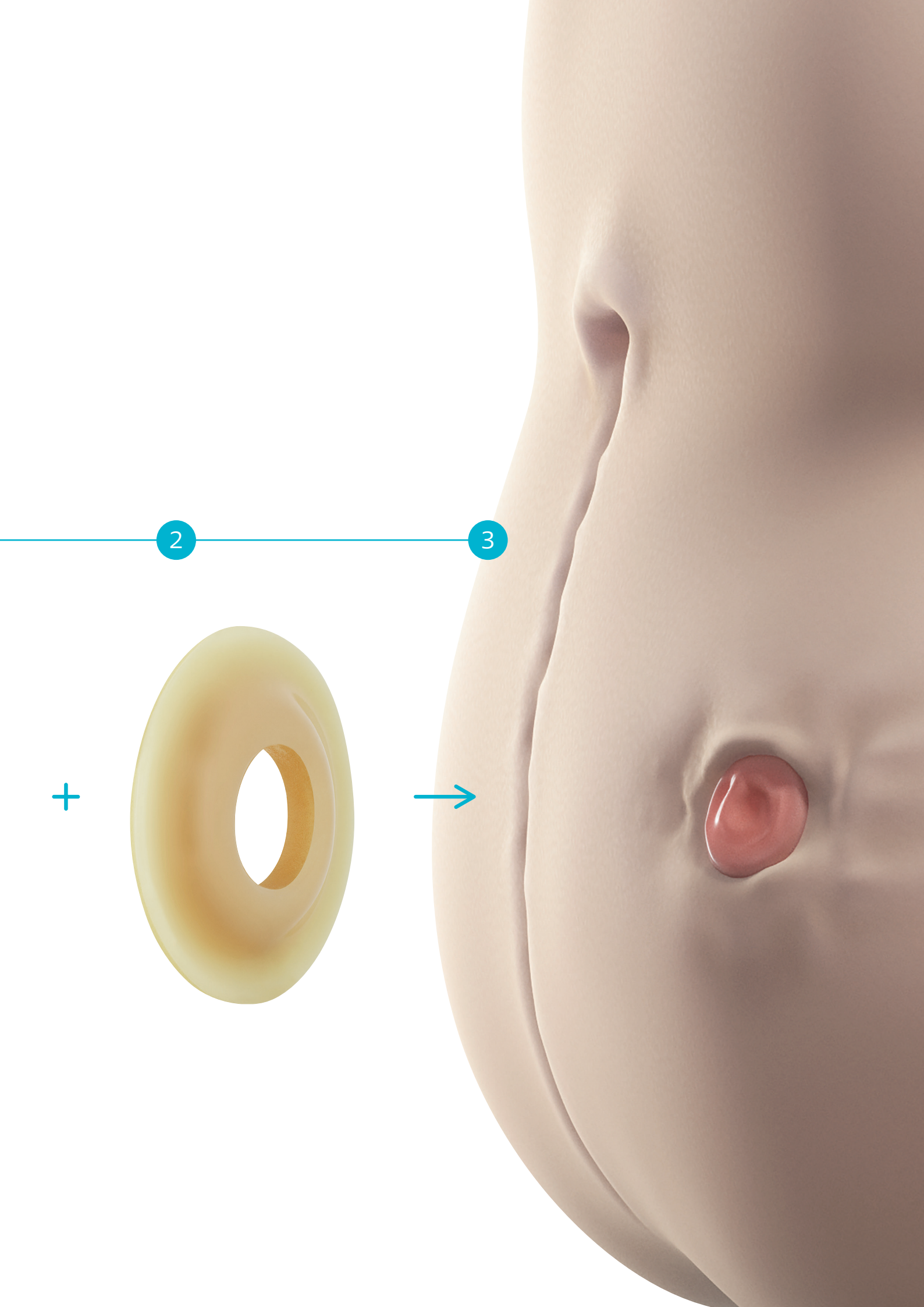

# Comment utiliser l'Anneau Protecteur Brava®

Avant d'appliquer l'Anneau Protecteur Brava, s'assurer que la peau péristomiale est propre et sèche.

Préparer

1



Retirer l'anneau de l'emballage.



Retirer les feuillets protecteurs des deux côtés en tenant les languettes de retrait.

Étirer

2



Modeler pour définir la forme.



Étirer l'anneau pour obtenir la forme souhaitée.

Appliquer

3



Appliquer l'Anneau Protecteur Brava sur la peau autour de la stomie.



Adaptez la forme si nécessaire. Modelez l'anneau avec les doigts de sorte que le bord soit bien lisse sur la peau.



L'anneau peut également être appliqué sur le protecteur cutané avant d'être posé sur la peau.

# Conçu pour *empêcher les fuites et protéger la peau*

Double protection. Facile à manipuler.

Description	Diamètre (intérieur-extérieur)	Epaisseur	Emballage	Réf.
Anneau Protecteur Brava	18 / 48 mm	2,5 mm	10 pcs.	12035
	27 / 57 mm	2,5 mm	10 pcs.	12037
	34 / 64 mm	2,5 mm	10 pcs.	12039
Anneau Protecteur Convexe Brava	20 / 60 mm	8,2 mm	10 pcs.	12090
	30 / 70 mm	8,2 mm	10 pcs.	12092
	40 / 80 mm	8,2 mm	10 pcs.	12094



Coloplast développe des produits et des services qui simplifient la vie des hommes et des femmes qui ont des problèmes médicaux très personnels et privés. En étroite collaboration avec les utilisateurs de nos produits, nous créons des solutions adaptées à leurs besoins particuliers. C'est ce que nous appelons les soins médicaux intimes.

Nos activités couvrent les soins de stomies, les soins de continence, les soins de plaies et les soins cutanés, ainsi que les soins urologiques. Nous sommes présents dans le monde entier et employons plus de 12 000 personnes.