

SenSura[®] Mio

voor elke lichaamsvorm

Tien jaar ontwikkeling

Coloplast ontwikkelt al meer dan 60 jaar producten en diensten die het leven van mensen met specifieke medische aandoeningen vergemakkelijken. De lancering van het SenSura[®] Mio-assortiment was een belangrijke mijlpaal om onze missie waar te maken. De producten van Coloplast kunnen nu meer mensen helpen een actief en leefbaar leven te leiden.

SenSura[®] Mio voor elke lichaamsvorm

Elke patiënt is uniek. Daarom is het SenSura[®] Mio-assortiment ontwikkeld


voor verschillende lichaamsvormen en past het zich aan de lichaamsvormen en veranderingen aan die in het ziekenhuis en thuis kunnen optreden. Uit de verhalen van gebruikers weten we dat het aantal mensen wiens leven wij positief kunnen beïnvloeden, een maatstaf voor ons succes is.




Een teamprestatie

Coloplast wil iedereen bedanken die met zijn tijd, kennis en creativiteit heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het SenSura[®] Mio-assortiment, met

name de gebruikers en stomaverpleegkundigen die hun ervaringen en feedback zo royaal met ons hebben gedeeld.

Na een decennium van ontwikkeling zijn we verheugd om dit uitgebreide productassortiment te kunnen voorstellen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijke innovatie is in de stomazorg van de afgelopen tien jaar.

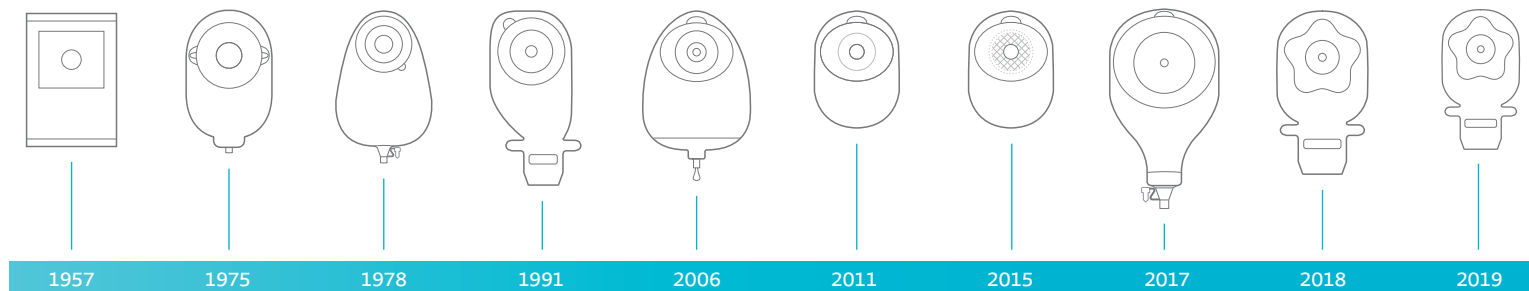

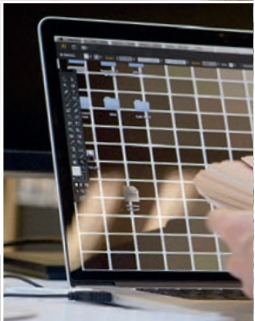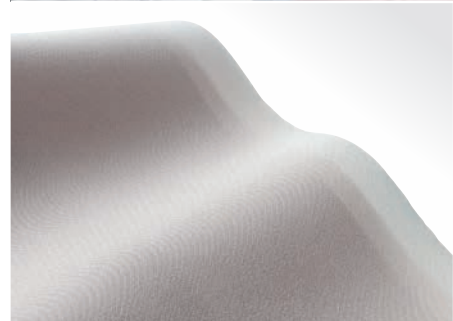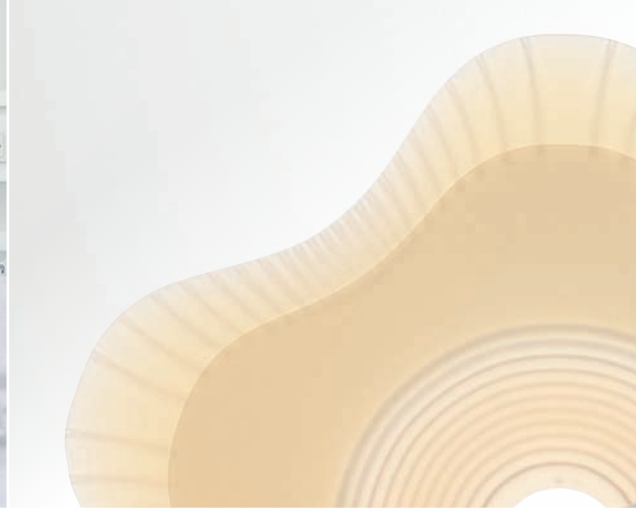

Er zijn drie verschillende lichaamsvormen ¹



50%
Egaal


Mensen met een stoma hebben verschillende lichaamsvormen. Het gebied rond de stoma is naar binnen of naar buiten gericht of is egaal. Het ontwikkelen van stomaproducten die het leven van onze gebruikers verbeteren, vereist een grondig begrip van deze lichaamsvormen en hun specifieke uitdagingen. We luisteren naar gebruikers en zorgverleners



15%
In kuil

om ons inzicht in de individuele lichaamsvormen te verbeteren.

We bestuderen ook de bewegingen en fysieke veranderingen in verband met herstel, lichaamsbeweging, slaap en gewichtsveranderingen. Deze bevindingen vormen de basis voor elk SenSura[®] Mio stomamateriaal.

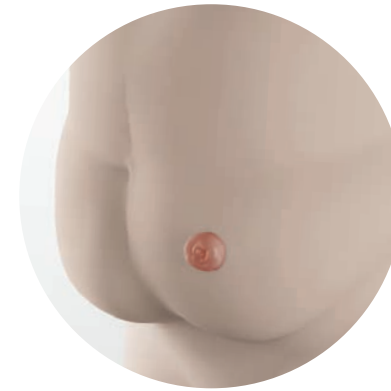

35%
Bolvormig

«De meeste patiënten vinden het moeilijk om hun situatie te aanvaarden, vooral de verandering van hun uiterlijk.»

Majken Vesterhauge Eriksen, therapeut Coloplast Care

Lekkage is de grootste uitdaging

Wereldwijd leven 2,5 miljoen² mensen met een stoma en 93% van hen is bang voor lekkage. Dat is een uitdaging. We willen patiënten helpen een actiever, aangener en zorgelozer leven te leiden. Ons belangrijkste doel is het verminderen van lekkage en de gebruikers meer vertrouwen geven in hun stomamateriaal.

93 %

is bang voor lekkage¹

De hieronder vermelde gegevens zijn afkomstig van onderzoeken die niet door Coloplast zijn gepubliceerd.

1. Coloplast, Marktonderzoek, Ostomy Life Study, 2016 (VV-0193510), <https://www.coloplast.com/products/ostomy/ostomy-life-study/2017/>
2. Beoordeling van Coloplast



Sashiko heeft
een stoma

Ons antwoord **BodyFit Technologie®**



De BodyFit Technologie® is ons innovatieplatform voor stomamateriaal. Elk lichaam is uniek. Dit is een feit dat onze manier van denken bepaalt en ons motiveert bij de ontwikkeling van onze stomaproducten. Zo ontwikkelen we producten die zich veilig en comfortabel aan elke lichaamsvorm aanpassen. Wij noemen dit mensgerichte innovatie. De BodyFit technologie® in SenSura®

Mio heeft een positief effect op het leven van de gebruiker. Het SenSura® Mio stomamateriaal is op verschillende plaatsen uitgerust met de BodyFit Technologie®.

Om een voorbeeld te geven: de elastische huidplaat van SenSura® Mio bestaat uit een speciale mix van

hydrocolloïden en polymeren die samen met een speciale toplaag twee keer zo rekbaar is als standaard stomamateriaal. Hij neemt de vorm aan van de individuele lichaamsvormen en volgt de bewegingen van het lichaam.



Scan de QR-code en kom meer te weten over de BodyFit Technologie:





Ons onderzoek en onze ontwikkeling van BodyFit Technologie® is gericht op de ontwikkeling van producten die het leven van mensen echt gemakkelijker maken.

SenSura[®] Mio voor elke lichaamsvorm

Op de volgende pagina's stellen we u het SenSura[®] Mio-assortiment voor –huidplaat, stomazakjes, koppelsystemen en de belangrijkste kenmerken van de BodyFit Technologie[®]



«Elk van deze componenten vertoont een enorme verbetering. Samen vormen ze onze grootste innovatie tot nu toe.»

Jakob Weldingh, Project Manager, Coloplast Research & Development



Oplossingen voor alle lichaamsvormen



Vlak



Convex



Concave

Elk lichaam is anders. Ons doel is om een comfortabele en veilige pasvorm voor elk lichaam te bieden. Het SenSura[®] Mio-assortiment bestaat uit drie categorieën huidplaten: Vlak, Convex en Concave. Om stomaverpleegkundigen te helpen bij het bepalen van het juiste product voor individuele patiënten, hebben we de online BodyCheck-tool ontwikkeld met productaanbevelingen voor elk lichaamstype.

Scan de
QR-code
en doe de
BodyCheck!





*«Elke stoma kan een
positieve ervaring worden.
Het gaat er alleen om het
juiste product te vinden.»*

Neil, SenSura® Mio Convex-gebruiker

Vlak stomamateriaal dat de bewegingen van het lichaam volgt

In 2014 werd SenSura® Mio voor het eerst geïntroduceerd voor een egale lichaamsvorm.

De uitdaging was om stomamateriaal te ontwikkelen dat goed blijft zitten, zelfs als de gebruiker intensief beweegt.

De oplossing was een zeer elastische huidplaat die met de bewegingen van het lichaam meebuigt en uitrekt zonder dat de kleefkracht op de huid verloren zou gaan. Hij is twee keer zo rekbaar als traditioneel stomamateriaal.

Hoe dit kan? Hij bestaat uit een speciale mix van hydrocolloïden, polymeren en kleefmiddelen die uitsluitend voor het SenSura® Mio-stomamateriaal worden gebruikt.

«Ik kan doen wat ik wil. Een stoma is geen obstakel meer.»

Mike, SenSura® Mio-gebruiker





Scan de QR-code voor de
gebruiksaanwijzingen van
SenSura® Mio Vlak op pag. 37




BodyFit
Technology®



De elastische huidplaat volgt de
contouren als u zich buigt.



Hij rekt met de huid mee
wanneer men zich uitrekt.

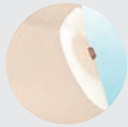

Hij keert bij een normale
lichaamshouding terug naar zijn
oorspronkelijke vorm.



Bewezen veiligheid voor stoma's in een kuil

Traditionele convexe huidplaten zijn vaak stijf en oncomfortabel.

SenSura® Mio Convex heeft ingebouwde flexlijnen die ervoor zorgen dat de huidplaat rond de stoma buigt en niet in het midden. Dankzij de BodyFit-technologie® biedt SenSura® Mio Convex de nodige flexibiliteit om comfortabel te buigen zonder aan stabiliteit in te boeten.

86% vond het draagcomfort van de huidplaat goed of zeer goed.³


«SenSura® Mio Convex
geeft me het vertrouwen
om naar buiten te gaan.»

Deirdre, SenSura® Mio Convex-gebruiker






Scan de QR-code voor de
gebruiksaanwijzingen van
SenSura® Mio Convex op pag. 37

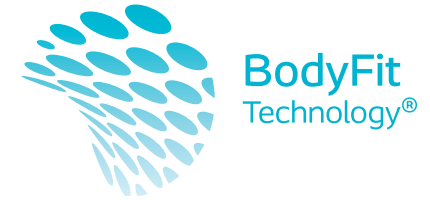

SenSura® Mio Convex is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: Convex Soft, Convex Light en Convex Deep.

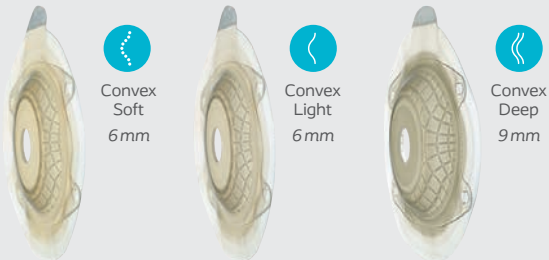

91 %

zegt dat SenSura® Mio
Convex een gevoel van
veiligheid geeft.³




«Het buigt en rekt mee. Ik voel
me weer veilig.»

Neil, SenSura® Mio Convex-gebruiker

3. Coloplast, Productbeoordeling, SenSura® Mio Convex, 2015, gegevens in bestand (VV-0197318)

Een oplossing voor ronde buiken

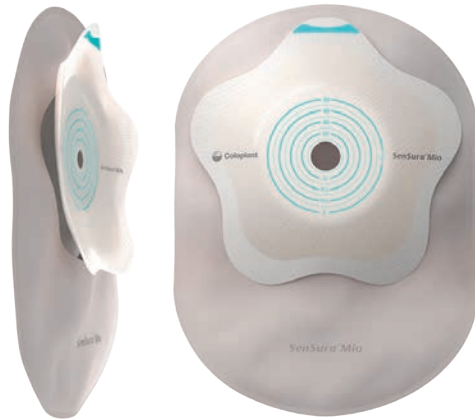

«De pasvorm van SenSura® Mio Concave past zo goed bij mij dat ik nooit aan mijn stoma hoeft te denken.»

Walton, SenSura® Mio Concave-gebruiker

Bollingen zijn ingewikkeld: ronde buiken, uitstulpingen en hernia's staan voor vele uitdagingen.

SenSura® Mio Concave is het eerste stomamateriaal dat speciaal ontwikkeld is om de uitdagingen van deze naar buiten gerichte lichaamsvormen aan te pakken. Een- en tweedelige systemen voldoen aan verschillende eisen en bieden oplossingen voor verschillende uitstulpingen. De huidplaat is verkrijgbaar in verschillende maten, van klein tot extra groot.





Scan de QR-code voor de
gebruiksaanwijzingen van
SenSura® Mio Concave op pag. 36



De BodyFit Technologie® verbetert het contact tussen de huidplaat en de omliggende huid.

1



De uiteinden **van de stervormige huidplaat** passen zich aan de rondingen aan zonder te rimpelen.

2



Flexzones in het midden en aan de rand van de huidplaat verhogen de elasticiteit en het aanpassingsvermogen van het product bij elke beweging.

3



De **stabiliteitsring** versterkt de binnenzone rond de stoma en dient als geleider bij het bevestigen van de huidplaat.



De speciale oplossing voor (premature) baby's

SenSura® Mio Baby is 2-delig stomamateriaal dat speciaal ontwikkeld werd voor (premature) baby's. SenSura® Mio Baby houdt rekening met de specifieke behoeften van pasgeborenen en maakt een eenvoudige en tijdbesparende verzorging mogelijk.

Een speciaal kenmerk van het SenSura® Mio Baby zakje is **het refeedingsysteem**. Het bestaat uit een kraantje dat geschikt is voor enterale spuiten en een venster voor eenvoudige toegang tot de stoma voor refeeding.


«Voor premature baby's is zoveel mogelijk rust cruciaal. Een verzorging die de handelingen minimaliseert, zou een mijlpaal zijn in stomazorg.»

June, pediatriesch stomaverpleegkundige





Scan de QR-code voor de
gebruiksaanwijzing van
SenSura® Mio Baby op pag. 36

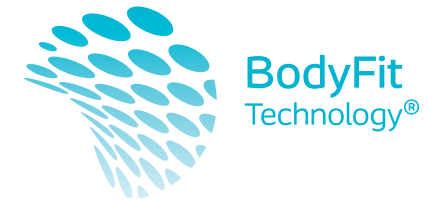

Flexibele 2-delige kleefkoppeling



Eenvoudig aan te brengen

- › Met zachte schuimring.
- › Handige koppeling om het zakje op de huidplaat te bevestigen zonder veel druk uit te oefenen op het abdomen.
- › Smal zakje voor kleine buikjes. Kan in of buiten de luier worden gedragen.

Zachte sluiting



Materiaal dat zacht is voor de gevoelige babyhuid

- › De uitlaat maakt het gebruik van enterale spuiten mogelijk om de inhoud van het zakje te verwijderen.

Venster voor 'refeeding'



Maakt eenvoudige refeeding mogelijk

- › Biedt gemakkelijke toegang tot de stoma.
- › Voor het eenvoudig ontsnappen van gassen.

Zodat kinderen vrij kunnen bewegen

SenSura® Mio Kids is uitgerust met de bewezen voordelen van de SenSura® Mio-productfamilie, die geoptimaliseerd zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen. SenSura® Mio Kids biedt een hoge mate van aanpasbaarheid aan de lichaamsvormen en bewegingen van kinderen.

SenSura® Mio is nu verkrijgbaar voor kleine gebruikers tussen 6 maanden en 4 jaar en bestaat uit een assortiment van 1-delige en 2-delige producten. SenSura® Mio Kids is ontwikkeld met het oog op de specifieke behoeften van kinderen om vrij te kunnen bewegen.

«Een zakje dat zo goed zit, dat mijn zoon kan doen wat hij wil—dat betekent alles voor mij.»

Mark, vader van Henry



Scan de QR-code voor de gebruiksaanwijzing van SenSura® Mio Kids op pag. 36



Baby- en Kids- assortiment

Eigenschappen en voordelen

Stervormige huidplaat



Flexzones



BodyFit Technologie®



Lichtgrijs textiel



Unieke cirkelfilter



Flexibele kleefkoppeling



1-delig

SenSura® Mio Kids



Ledigbaar

Uro

2-delig, Flex

SenSura® Mio Baby



Ledigbaar

SenSura® Mio Kids



Ledigbaar

Uro



SenSura® Mio


De discrete oplossing

„We wilden een authentiek zakje dat staat voor wat het is. Omdat de kleur van onze vorige zakjes slechts bij één huidskleur paste, hebben we de huidskleur van veel verschillende mensen bekeken. We wilden dat dit zakje er bij iedereen goed zou uitzien“, zegt ontwerper Jakob Bendix. »Met zijn warme grijstint is hij ook onder dunne stoffen discreet.«

Het SenSura® Mio-zakje is gemaakt van een textielmateriaal dat eerder de look heeft van een kledingstuk dan van een medisch hulpmiddel. Het materiaal voelt zacht en comfortabel aan op de huid. Door de unieke grijze tint is het zakje zelfs onzichtbaar onder witte kleding.

«Met zijn warme grijstint is hij ook onder dunne stoffen discreet.»

Jacob Bendix, ontwerper bij Coloplast

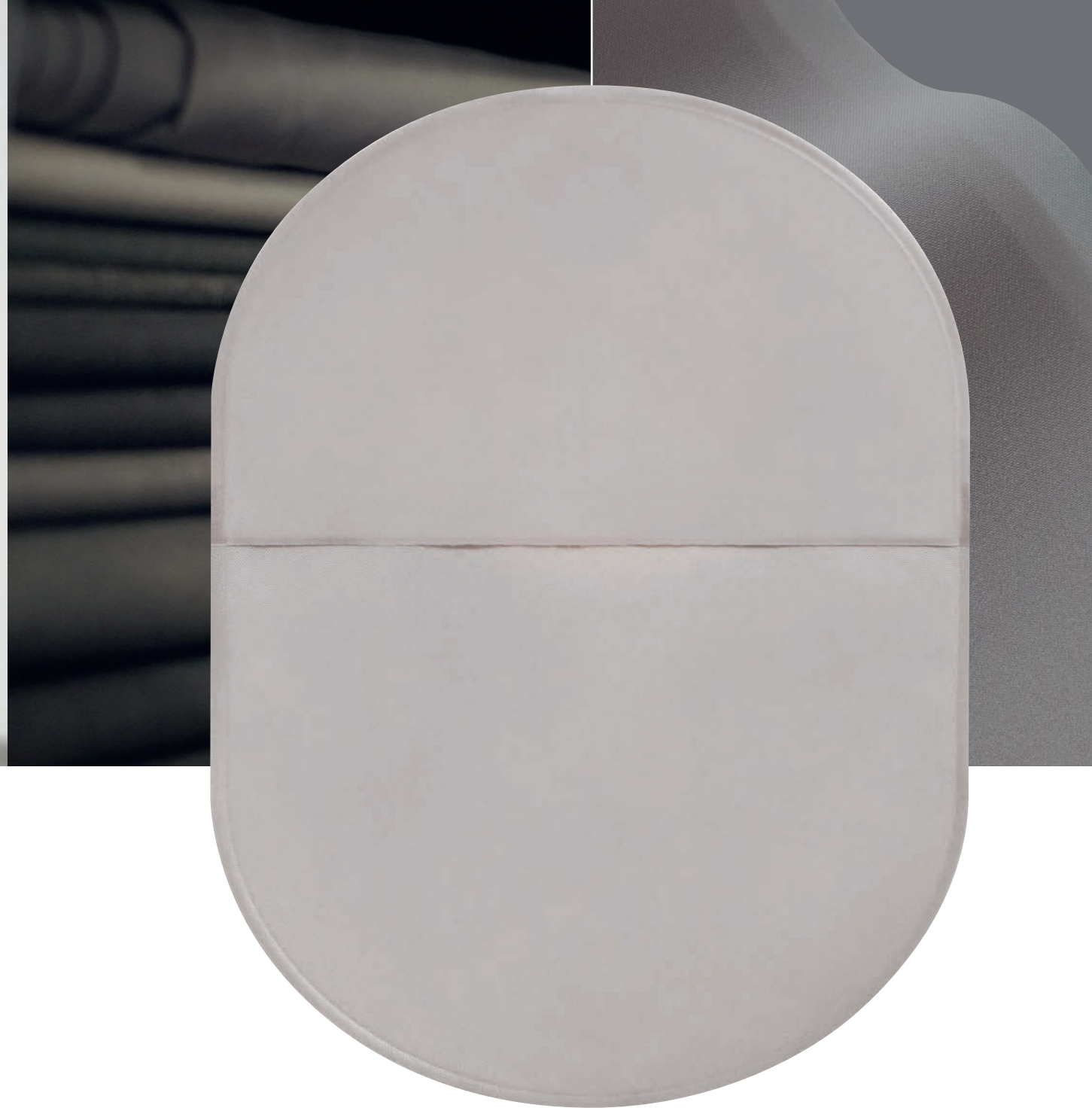


*De lichtgrijze kleur is
absoluut discreet-ook
onder witte kleding!*

Minder ballooning overdag en 's nachts

„Onze uitdaging was om een pre-filter te ontwerpen die de koolstoffilter en het membraan beschermt, omdat deze twee onderdelen gemakkelijk verstopt raken met output. Uiteindelijk moesten we van nul beginnen en de componenten van onze filter opnieuw ontwikkelen: het membraan, de koolstoffilter en ten slotte de pre-filter. Met de cirkelvormige pre-filter kunnen we de verstopping van de filter zo lang vertragen dat onze gebruikers het zakje om hygiënische redenen vervangen en niet omdat het opblaast“, zegt Lasse Albrechtsen, verantwoordelijke van het filterproject bij Coloplast.

Albrechtsen en zijn team waren succesvol. Het is aangetoond dat de SenSura® Mio-filter ervoor zorgt dat de zakjes 61% minder opblazen bij mensen met een ileostoma en 52% minder bij mensen met een colostoma.⁴

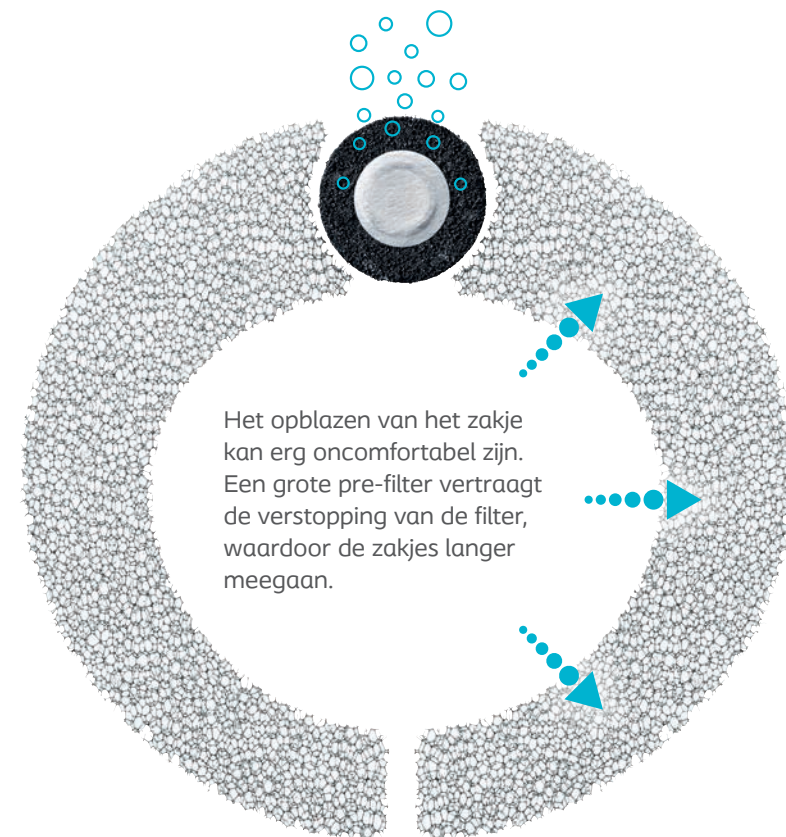

4. Coloplast, klinisch onderzoek, 2010, gegevens in bestand (VV-0009690)

«Ik kan de eerste
keer in tien jaar
doorslapen.»

Morten heeft sinds 2008 een ileostoma



Verschillende koppelingen, dezelfde veiligheid


De klikkoppeling geeft de gebruiker een gevoel van veiligheid. Een hoorbare klik geeft aan dat de huidplaat en het zakje stevig op elkaar zijn aangesloten. De vergrendelring is zo aangebracht dat onbedoeld openen door stoten of aanraken wordt voorkomen.

De flexibele kleefkoppeling past zich mooi aan de lichaamsvorm aan en biedt een aangenaam draagcomfort. Het profiel is bijna net zo vlak als bij een 1-delig stomazakje.

Beide SenSura® Mio-koppelingen zijn bestand tegen een belasting van 10 kg.

73 %

van de gebruikers van
SenSura® Mio voelt zich veilig⁵

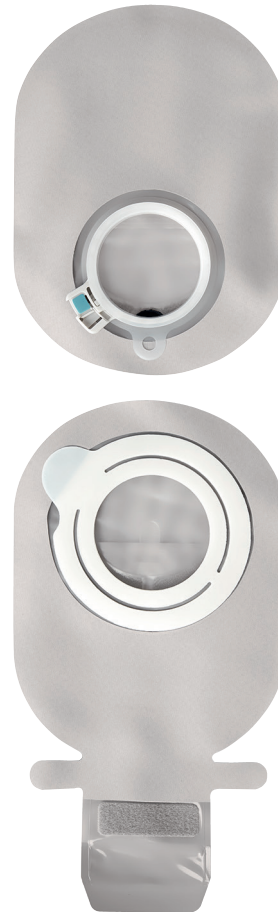

Flex Kleefkoppeling

Gebruiksgemak

Met eenvoudige wrijfbewegingen is het zakje aan de huidplaat bevestigd.

Comfort

Comfortabel om dragen en beperkt de bewegingsvrijheid niet.

Discretie

De vlakke koppeling is niet dikker dan het 1-delig opvangmateriaal.

Gevoeligheid

Voor nieuwe patiënten, gevoelige zones en zachte buiken.



5. Coloplast, Productbeoordeling, SenSura® Mio, 2014, gegevens in bestand (VV-0197319)




Click Mechanische koppeling

Voor extra veiligheid

Geen twijfel mogelijk: Een klikgeluid geeft aan dat de huidplaat en het zakje op elkaar zijn aangesloten.

Comfortabel

Dankzij de mechanische koppeling kan het zakje in de gewenste positie gedraaid worden.

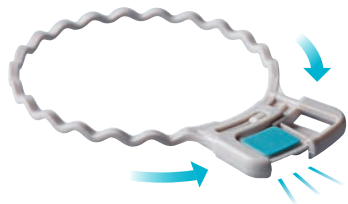

kg



Carsten, gebruiker
SenSura® Mio 2-delig

Post-op en High Output gamma

1-delig High Output

- › Verkrijgbaar met vlakke of convexe SenSura® Mio-huidplaat


2-delig High Output

- › Te gebruiken met vlakke, convexe of concave SenSura® Mio-huidplaten
- › Verkrijgbaar met Click of Flex koppeling
- › Click zakjes beschikbaar in twee maten


Post-op

- › Voor steriele en niet-steriele toepassingen met praktische verpakking

Met controlevenster

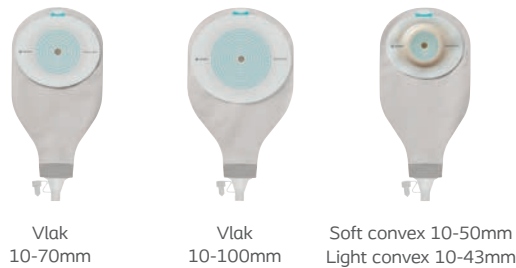


Click, met controlevenster

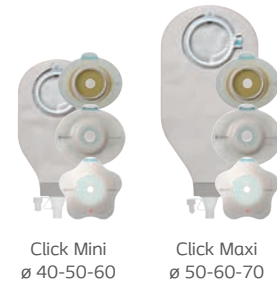

Steriel - doorschijnend



Doorschijnend, met schaalverdeling

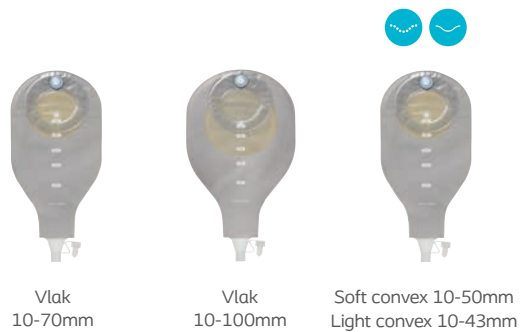

Flex, met controlevenster



Niet-steriel - doorschijnend





Standaard gamma

1-delig

SenSura® Mio met vlakke huidplaat



SenSura® Mio met convexe huidplaat



SenSura® Mio met concave huidplaat



2-delig Click

SenSura® Mio met vlakke huidplaat



SenSura® Mio met convexe huidplaat



SenSura® Mio met concave huidplaat



2-delig Flex

SenSura® Mio met vlakke huidplaat



SenSura® Mio met convexe huidplaat






Brava®

Brava® Toebehoren

De producten van Brava® zijn ontworpen om de zorg nog meer te personaliseren en de huid te beschermen.

Meer dan **90%**
van de mensen met een stoma
gebruikt toebehoren.⁶



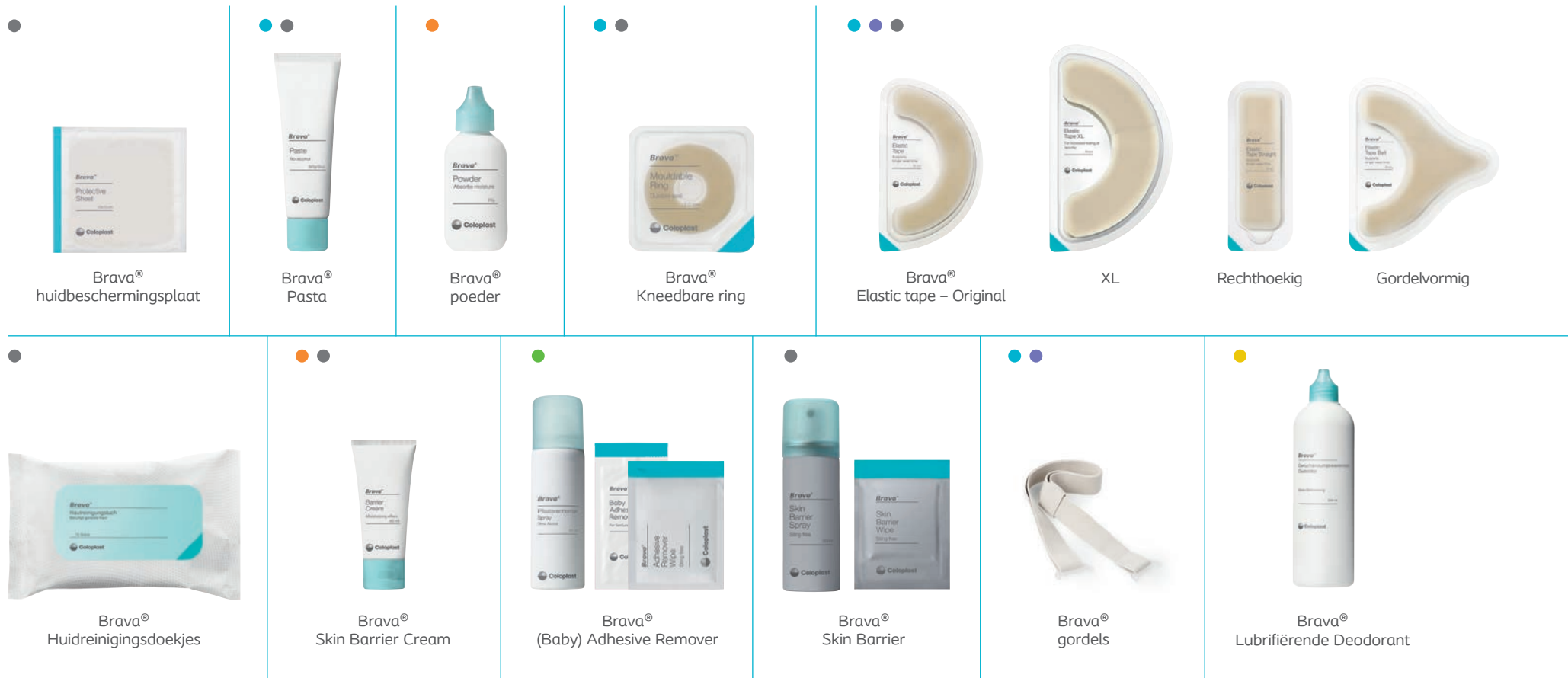

Aanbevolen product voor:

- Lekkages
- Huidirritatie
- Verwijderen
- Lichaamsbeweging
- Discretie
- Huidbescherming



Scan de QR-code voor de gebruiksaanwijzing van de Brava producten op pag. 36

Coloplast Care programma

Een gratis gepersonaliseerd begeleidingsprogramma voor stomadragers. Deze dienst werd ontwikkeld om uw patiënt in het eerste jaar na hun operatie te begeleiden en hun terugkeer naar huis te vergemakkelijken.

De patiënt ontvangt:

- Hulpmiddelen bij het gebruik van het opvangmateriaal
- Gratis stalen op maat opgestuurd naar hun thuisadres
- Nieuwsbrieven die hen begeleiden in hun dagelijkse stomaverzorging
- Regelmatig telefonische contacten met onze Coloplast Care medewerkers

Gratis inschrijving via
onze website:

www.coloplast.to/ColoplastCareProgramma



De Coloplast Care hulpmiddelen

Startkit



Gepersonaliseerde kit
+
Inschrijvingsfolder

Magazines



Magazines over verschillende
onderwerpen: voeding, kledij, intimiteit,
reizen, sporten, sociaal leven, ...

Persoonlijke opvolging



Ons Coloplast Service team is elke
werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en
van 13u tot 16u op het gratis nummer
0800-12888

A close-up photograph of a man with a joyful expression, wearing a light-colored bucket hat and a white jacket. He is outdoors, with a blurred background of trees and a fishing rod visible in the foreground. The text is overlaid on the right side of the image.

«De mensen van het Coloplast Care-team hebben mijn verwachtingen telkens weer overtroffen en zijn echte professionals! De continue ondersteuning is van onschatbare waarde.»

Bruce, urostomadrager

Gebruiksaanwijzingen

Scan de QR-code voor de gebruiksaanwijzing van:

SenSura® Mio Concave
1-delig



SenSura® Mio Concave
2-delig Click



SenSura® Mio
Baby



SenSura® Mio
Kids



Brava®
Toebehoren



Gebruiksaanwijzingen

Scan de QR-code voor de gebruiksaanwijzing van:

SenSura® Mio Vlak
1-delig



SenSura® Mio Vlak
2-delig Flex



SenSura® Mio Vlak
2-delig Click



SenSura® Mio Convex
1-delig



SenSura® Mio Convex
2-delig Flex



SenSura® Mio Convex
2-delig Click



Coloplast ontwikkelt producten en diensten die het leven van mensen met zeer persoonlijke medische aandoeningen vergemakkelijken. Door nauw samen te werken met de mensen die onze producten gebruiken, ontwikkelen we oplossingen die op hun bijzondere behoeften afgestemd zijn. Dit noemen we intieme gezondheidszorg.

We bieden oplossingen voor stomazorg, continenzorg, wond- en huidzorg en urologiezorg. We zijn wereldwijd actief en tellen meer dan 12.000 werknemers.

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast Belgium NV/SA, G. Gezellestraat 121, 1654 Huizingen. V.U.: E. Binnemans. PM-23150
www.coloplast.be Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2022-09.
Alle rechten voorbehouden. 340N1HCP2N



Coloplast Belgium NV/SA
G. Gezellestraat 121
1654 Huizingen
Tel. +32 2 334 35 35
be@coloplast.com