

Toepassingsgids


Biatain® Silicone Non-Border

Waarom siliconen?

Siliconen kleeflagen hebben de voorkeur omdat ze minder snel trauma aan de huid en wonde veroorzaken dan andere, meer agressieve kleeflagen. De zachte siliconen kleeflaag minimaliseert pijn en schade aan de wondranden en de huid rondom de wonde bij verwijdering.

Hoe werkt siliconen?

Siliconen bieden een zachte hechting, maar dankzij de vormbare eigenschappen kunnen oneffenheden in de huid worden opgevuld, waardoor een groter oppervlak voor hechting ontstaat. Begrijpen hoe siliconen werkt, kan het hechtingspotentieel helpen maximaliseren!

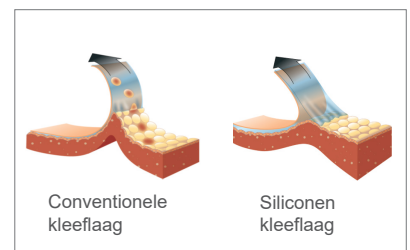

Overweeg deze tips bij het aanbrengen van Biatain® Silicone Non-Border

- 1** Zorg ervoor dat de huid schoon en **droog** is.
- 2** **Hou er rekening mee** dat het gebruik van crèmes, lotions, zalven of huidpreparatieproducten het vermogen van siliconen om aan de huid te hechten kan verminderen. Als een dergelijk product wordt gebruikt, laat dan de huid rondom de wonde drogen voordat u het product aanbrengt.
- 3** Wanneer u klaar bent om Biatain Silicone Non-Border aan te brengen, verwijdert u eerst de middelste beschermende film en brengt u het verband aan op het wondgebied. Raak de kleefzijde van het schuimverband niet aan. Wrijf vervolgens het verband langs de huid glad, terwijl u de resterende beschermstroken verwijdert. Indien nodig kan het verband geknipt worden, zodat het ook voor moeilijk te verbinden zone's kan gebruikt worden.
- 4** Breng **fixatie** aan volgens het protocol van uw instelling, en gebruik compressietherapie indien klinisch geïndiceerd.
- 5** **Laat** het verband op zijn plaats om de omgeving voor wondgenezing niet te verstoren. Overweeg om de wonde na 3-4 dagen te controleren, of volgens het protocol van uw instelling.
- 6** **Vervang** het verband wanneer zichtbare tekenen van exsudaat de rand van het schuimverband naderen (zie achterkant).



Wanneer moet het Biatain[®] Silicone Non-Border verband vervangen worden ?

Biatain Silicone Non-Border kan tot 7 dagen op zijn plaats blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat, de wondcondities en het type wond. Het verband moet worden vervangen als er 1 cm tussen het exsudaat en de rand van het schuimverband zit:



Deze informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn en mag het klinische oordeel niet vervangen

Biatain Silicone Non-Border



Vormt zich naar het wondbed
om de vorming van een holte en exsudaatophoping te verminderen



Absorbeert verticaal
om de huid rondom de wonde te beschermen tegen maceratie



Houdt exsudaat vast
onder compressie om het risico op lekkage te verminderen

Ontworpen voor hoge absorptie en retentie onder compressie om het risico op maceratie en beschadiging van de huid rondom de wonde te verminderen.



Scan voor toepassingsvideo

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology

Coloplast Belgium NV/SA, G. Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, België. V.U.: E. Binnemans
www.coloplast.be Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2021-06
Alle rechten voorbehouden. PM-17451

340N30013N

