

Biatain® Contact

Wunden, die mit Biatain Contact behandelt werden können



Biatain Contact ist eine Silikon-Kontaktauflage für die Behandlung von Wunden und chronischen oder akuten Läsionen unterschiedlicher Exsudationsstärken, die mit einem sekundären absorbierenden Wundverband, wie Biatain Non-Adhesive, verwendet wird.

Sie kann nach entsprechender Fixierung mit einem geeigneten Verband auch als Schutzschicht auf nicht nässenden Wunden oder auf empfindlicher Haut verwendet werden.

Bei bestimmten medizinischen Indikationen kann sie auch mit Kompressionsverbänden verwendet werden.

Schürfwunden



Gering
Exsudation



Mäßige Granulation



Chronische Wunden



Stark
Exsudation


Verbesserter Kontakt für eine ungestörte Wundheilung

- Verbesserte Perforation für besseren Exsudattransport und Schutz vor Mazerationen
- Transparentes Material ermöglicht die Wundbeurteilung ohne Entfernung des Verbandes
- Dünne und leicht anzubringende Folie mit einseitig aufgebrachtter Silikonhaftschrift


Anwendung

Einfache Anwendung und Anbringung von Biatain Contact


Bereiten Sie die Wunde vor und wählen Sie Biatain Contact in der Größe aus, die eine ausreichende Abdeckung der schutzbedürftigen Wunde und der wundumgebenden Haut gewährleistet. Bei Bedarf kann Biatain Contact mit einer sterilen Schere auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.

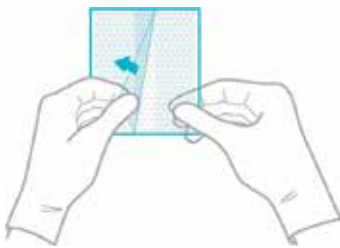

1. Ziehen Sie zunächst die erste türkisfarbene Schutzfolie von der Silikonhaftschrift ab.

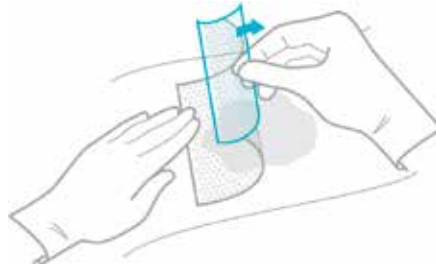

2. Bringen Sie den Verband mit der Silikonhaftschrift nach unten auf die Wunde auf und entfernen Sie dann die zweite Schutzfolie.

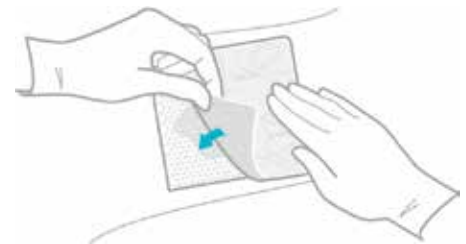

3. Bringen Sie je nach Exsudationsstärke ggf. einen Sekundärverband, wie zum Beispiel einen Biatain Schaumverband, auf.

Wie häufig ein Verbandswechsel erforderlich ist, hängt vom Zustand der Wunde ab und richtet sich nach den jeweils aktuellen Grundsätzen der guten klinischen Praxis. Beobachten Sie die Wunde. Im Falle von Komplikationen oder Infektionen ist eine ärztliche Fachperson hinzuzuziehen.

Biatain Contact



Artikelnr.	Nationale Nummer	Größe	Stk.
33560	593 0438	5 x 7,5 cm	5
33561	593 0441	7,5 x 10 cm	5
33562	593 0519	10 x 18 cm	5