

Biatain[®] Contact

Plaies qui peuvent être traitées avec
Biatain Contact



Biatain Contact est une couche de contact en silicone, indiquée pour le traitement des ulcères et des lésions chroniques ou aiguës, à différents niveaux d'exsudation, à traiter avec une application concomitante d'un pansement absorbant secondaire, tel que Biatain Non-Adhesive.

Il peut également être utilisé comme couche protectrice, après fixation appropriée avec un pansement adéquat, sur des plaies non exsudatives ou sur une peau fragile.

Pour des indications médicales spécifiques, il peut également être utilisé avec des bandages de compression.

Dermabrasions



Granulation modérée



Plaies chroniques



Peu
Niveau de l'exsudat



Elevé
Niveau de l'exsudat


Contact amélioré pour une guérison continue des plaies

- Perforation améliorée pour une meilleure évaporation de l'exsudat et la prévention de la macération
- Transparent pour contrôler l'évolution de la plaie sans retirer le pansement
- Film unilatéral avec un adhésif siliconé, mince et facile à appliquer


Application

Application et ajustement faciles avec Biatain Contact


Préparez la plaie et sélectionnez la taille de Biatain Contact qui couvrira la peau et la peau périlésionnelle à protéger. Si nécessaire, Biatain Contact peut être coupé à la taille souhaitée à l'aide de ciseaux stériles.

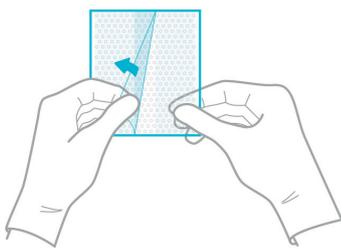

1. Enlever le premier film turquoise pour exposer le silicone

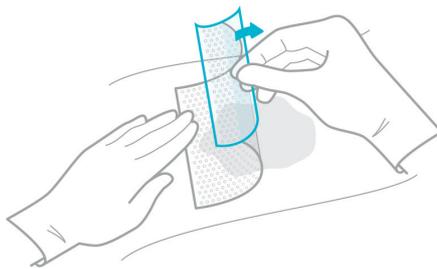

2. Appliquer le côté en silicone face à la plaie tout en enlevant le deuxième film de protection

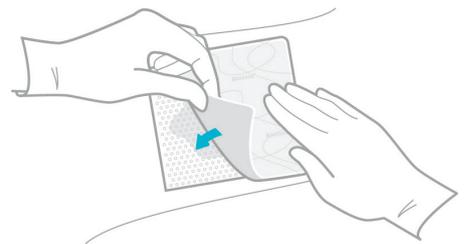

3. En fonction du niveau d'exsudat, appliquez un pansement secondaire, tel que le pansement mousse Biatain

La fréquence de changement de pansement dépend de l'état de la plaie et est conformément aux bonnes pratiques cliniques actuelles. Surveillez la plaie. En cas de complications ou d'infections, demandez un avis médical.

Biatain Contact



Référence	Code national	Dimensions	Unités/boîte
33560	593 0438	5 x 7.5 cm	5
33561	593 0441	7.5 x 10 cm	5
33562	593 0519	10 x 18 cm	5