

# Purilon®

## Hydrogel doux

Pour une cicatrisation plus rapide grâce à un débridement efficace et doux



Purilon est un hydrogel doux composé d'ingrédients naturels sans aucun additif. Il est utilisé pour les plaies nécessitant un débridement efficace et doux des tissus nécrotiques, ouvrant ainsi la voie à une cicatrisation plus rapide.

Une combinaison de propriétés hydratantes et absorbantes<sup>1</sup> favorise le débridement autolytique naturel et une cicatrisation en milieu humide.<sup>2</sup>

Facile à appliquer et à enlever.

Risque de fuite et de macération minimisé.

# Purilon®

Le gel Purilon® offre une large gamme de fonctionnalités pour les plaies nécessitant un débridement des tissus nécrotiques

## Usage

Le gel Purilon est indiqué pour les plaies nécrosées sèches et avec croûtes ainsi que sur les plaies ayant une combinaison de tissus nécrosés et granulés, telles que les ulcères de jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique non infectés, et pour les brûlures du 1er et du 2e degrés. Le gel peut être utilisé durant tout le processus de cicatrisation pour assurer un environnement de cicatrisation humide.

Le gel Purilon devrait être utilisé avec un pansement secondaire.

## Composition

Le gel Purilon est composé de plus de 90% d'eau purifiée, de carboxyméthylcellulose sodique et d'**alginate de calcium**. Purilon est un produit très doux puisque le gel est composé d'ingrédients naturels sans aucun additif.

## Mode d'action

Le gel Purilon hydrate les tissus nécrotiques et absorbe l'excès d'exsudat et les débris de la plaie.

La texture visqueuse du gel le rend cohésif et il reste en place, ce qui permet de minimiser les risques de fuite et de macération.

## Application



Portez des gants  
Retirez complètement  
l'étiquette



Tordez la partie  
supérieure pour dévisser  
complètement le  
capuchon



Pressez pour faire sortir  
une quantité appropriée  
de produit  
Ne touchez pas la plaie  
avec l'embout



Texture visqueuse du gel  
le rend cohésif et il reste  
en place

	Référence	Code APB	Emballage
Purilon 8 gr	3906	1570-647	10 unités/boîte
Purilon 15 gr	3900	1359-983	10 unités/boîte
Purilon 15 gr	3900.2	1359-975	5 unités/boîte
Purilon 25 gr	3903	1359-991	10 unités/boîte

### Références

1. Thomas S et al. [www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004](http://www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004).
2. Gottrup F et al. Cost effectiveness of hydrogel treatment in diabetic foot ulcers. EWMA 2002.

[Ostomy Care](#) | [Continance Care](#) | [Wound and Skin Care](#) | [Interventional Urology](#) | [Voice and Respiratory Care](#)

Coloplast Belgium NV/SA, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, Belgique  
E.R.: E. Binnemans - [www.coloplast.be](http://www.coloplast.be)

Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. © 2023-08.  
Tous droits réservés Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danemark. PM-26033

340N30025F

