

Purilon®

Zachte gel op waterbasis

Voor een snellere wondgenezing
dankzij een doeltreffend en
voorzichtig debridement



Purilon® is een zachte gel op waterbasis die bestaat uit natuurlijke bestanddelen zonder additieven. Hij wordt gebruikt bij wonden waarvoor doeltreffend en voorzichtig debridement van necrotisch weefsel nodig is, zodat snellere wondgenezing wordt verkregen.

De combinatie van hydraterende en absorberende eigenschappen¹ ondersteunt natuurlijk autolytisch debridement en vochtige wondgenezing.²

Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen.
Lekkage en verweking tot een minimum beperkt.

Purilon®

Purilon® biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor wonden waarbij debridement van necrotisch weefsel vereist is

Gebruik

Purilon gel is aangewezen voor droge en korstige necrotische wonden en voor wonden met een mix van necrotisch en granulatieweefsel zoals beenulcera, doorligwonden, niet-geïnficeerde diabetische voetulcera, en kan worden gebruikt bij 1e en 2e graads brandwonden. De gel kan worden gebruikt tijdens het gehele genezingsproces om een vochtig genezingsmilieu te verzekeren.

Purilon gel moet worden gebruikt in combinatie met een secundair verband.

Samenstelling

Purilon gel bestaat voor meer dan 90% uit gezuiverd water, natriumcarboxymethylcellulose en **calciumalginaat**. Purilon heeft een zachte werking, omdat de gel bestaat uit natuurlijke bestanddelen zonder toevoegingen.

Werkingsmechanisme

Purilon gel hydrateert necrotisch weefsel en absorbeert overtollig exsudaat, dood weefsel en debris uit de wonde. De stroperige textuur van de gel zorgt ervoor dat deze samenhangend is en op zijn plaats blijft, waardoor het risico op lekkage en maceratie wordt geminimaliseerd.

Toepassing




Draag handschoenen
Verwijder het etiket volledig



Draai de bovenkant om de dop volledig los te draaien



Knijp om een geschikte hoeveelheid product vrij te geven
Raak de wonde niet aan met de punt

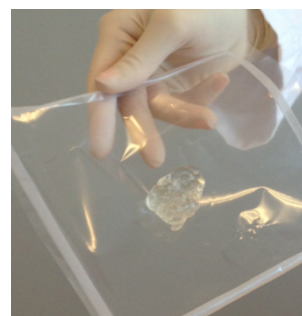

De stroperige textuur van de gel zorgt ervoor dat deze samenhangend is en op zijn plaats blijft

	Referentie	APB code	Verpakking
Purilon 8 gr	3906	1570-647	10 stuks/doos
Purilon 15 gr	3900	1359-983	10 stuks/doos
Purilon 15 gr	3900.2	1359-975	5 stuks/doos
Purilon 25 gr	3903	1359-991	10 stuks/doos

Referenties

1. Thomas S et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.
2. Gottrup F et al. Cost effectiveness of hydrogel treatment in diabetic foot ulcers. EWMA 2002.

[Ostomy Care](#) | [Continance Care](#) | [Wound and Skin Care](#) | [Interventional Urology](#) | [Voice and Respiratory Care](#)

Coloplast Belgium NV/SA, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, België
V.U.: E. Binnemans - www.coloplast.be

Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © 2023-09.
Alle rechten voorbehouden. PM-26032

340N30025N

