

Une petite plaie et aucun professionnel de santé à proximité ?

Pas de problème ! Avec Biatain Silicone Lite, vous pouvez soigner votre plaie vous-même en quelques étapes simples.

Guide d'application de Biatain Silicone Lite

Vous recevez ce guide parce que votre professionnel de santé a estimé que vous êtes en mesure de soigner votre plaie par vous-même.

1|



Lavez-vous les mains, rincez bien la plaie à l'eau tiède et séchez-la délicatement.

2|



Sortez le Biatain Silicone Lite de son emballage.

3|



Optionnel : Si nécessaire, faites des incisions dans le pansement, par exemple pour l'adapter au talon ou au coude.

4|



Retirez le film protecteur supérieur.

5|



Appliquez le pansement sur la plaie sans toucher la surface adhésive.

6|



Retirez les feuillets de protection.

7|



Appuyez délicatement sur les bords du pansement pour assurer une bonne adhésion à la peau.

8|



Votre plaie est désormais protégée, et la cicatrisation peut se faire sans interruption. Laissez le pansement agir !

Plus d'infos sur
Biatrain Silicone Lite



fr.coloplast.be/
BiatrainSiliconeLite

Biatrain Silicone Lite

Questions fréquentes

Le pansement existe-t-il en plusieurs tailles ?

Oui, Biatrain Silicone Lite est un pansement fin et flexible, disponible en différentes tailles pour s'adapter à divers types de plaies.



Puis-je me doucher avec mon pansement ?

Oui, vous pouvez prendre une douche rapide avec Biatrain Silicone Lite sans qu'il ne se décolle. Cependant, plus vous vous douchez fréquemment et longtemps, plus son adhérence peut diminuer.



Combien de temps faut-il pour que ma plaie guérisse ?

La durée de cicatrisation dépend de la taille et du type de plaie, ainsi que de votre état de santé général. En cas de questions ou de doute, consultez un professionnel de santé.



Comment suivre l'évolution de ma plaie ?

Vous pouvez soulever délicatement le pansement pour examiner la plaie, puis le recoller.



À quelle fréquence dois-je changer le pansement ?

Le pansement favorise la cicatrisation sans nécessiter de remplacement quotidien. Selon la quantité d'exsudat, il peut rester en place jusqu'à 7 jours.

