

Een wondje en geen zorgprofessional in de buurt?

Geen nood, met dit verband kan je jouw wonde zelf verzorgen in een paar simpele stappen.

Stappenplan voor het aanbrengen van Biatain Silicone Lite

Je ontvangt deze handleiding omdat jouw zorgprofessional heeft beoordeeld dat je zelf je wonde kunt verzorgen.

1|



Was je handen en spoel de wonde goed onder de kraan met lauw water, dep droog.

2|



Neem de Biatain Silicone Lite uit de verpakking.

3|




Optioneel: Maak inkepingen indien nodig, bijvoorbeeld voor gebruik op de hiel of elleboog.

4|



Verwijder de topfilm.

5|

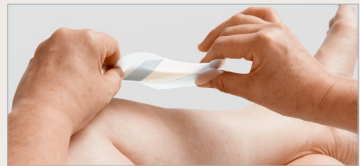

Breng het verband aan op de wonde, zonder de kleefoppervlakte aan te raken.

6|



Verwijder de schutbladen.

7|



Na het aanbrengen, druk zachtjes op de randen van het verband voor een goed contact met de huid.

8|



Je wonde is afgedekt en beschermd, en de genezing verloopt ongestoord onder dit verband. Laat het verband gewoon zijn werk doen!

Biatain Silicone Lite

Veelgestelde vragen

Meer info over
Biatain Silicone Lite



nl.coloplast.be/
BiatainSiliconeLite

Bestaat het verband in verschillende maten?

Biatain Silicone Lite is een dun en flexibel verband dat in verschillende maten verkrijgbaar is voor diverse toepassingen.



Kan ik douchen met mijn verband ?

Met Biatain Silicone Lite kan je kort douchen zonder dat het loskomt. Hoe vaker en langer je doucht, hoe meer de kleefkracht afneemt.



Hoe lang duurt het voordat mijn wonde genezen is?

De genezingsijd hangt af van de grootte en het type van je wonde, evenals je algemene gezondheid. Bij vragen of twijfels, raadpleeg steeds een zorgprofessional.



Hoe weet ik hoe mijn wonde evolueert ?

Je kan de wonde controleren door het verband voorzichtig even op te lichten en daarna weer vast te kleven.



Hoe vaak moet ik het verband vervangen ?

Het verband ondersteunt de heling zonder dat je het dagelijks moet vervangen. Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht kan het tot zeven dagen ter plaatse blijven.

