

Guide de coupe

Développé par des infirmières pour des infirmières



Biatain® Silicone Non-Border

Développé par des infirmières pour des infirmières

Ce guide de coupe a été élaboré pour vous aider à utiliser le pansement Biatain® Silicone Non-Border et à fournir un traitement optimal à vos patients.

Les différents scénarios d'utilisation s'appuient sur l'expérience clinique et pratique d'infirmières spécialisées dans le traitement des plaies qui ont partagé leurs connaissances avec nous.

Ce guide fournit plusieurs exemples de coupe pour traiter les plaies dans des zones où l'application pourrait s'avérer difficile. Tous les exemples présentés sont donnés à titre indicatif.

Dès lors, nous vous recommandons de toujours opter pour une taille de produit et une coupe qui correspondent au patient.


Biatain Silicone Non-Border est un pansement stérile à usage unique conçu en mousse de polyuréthane et doté d'un adhésif doux en silicone. Un pansement secondaire, qui n'est pas illustré dans ce guide, est nécessaire pour la fixation. Le produit peut également être utilisé en combinaison avec une thérapie par compression. Ne recouvrez pas l'ensemble du produit à l'aide d'un pansement secondaire occlusif.

Consultez toujours le document intitulé « Mode d'emploi » livré avec le produit avant toute utilisation et traitez la plaie conformément aux directives locales.

Sommaire

Aperçu du produit	4
Conseils d'application	5
Pieds et jambes	6-15
Mains et bras	16-25
Thorax	26-27
Tête et cou	28-30

Aperçu du produit

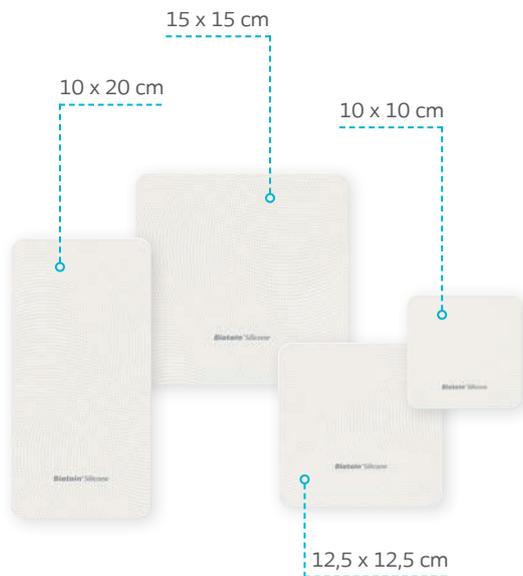

Biatain Silicone Non-Border

Code d'article	Taille en cm	Unités par boîte
39022	10 x 10	10
39023	12,5 x 12,5	10
39024	10 x 20	5
39025	15 x 15	5

Conseils d'application

Avant toute utilisation, veuillez consulter le document « Mode d'emploi » livré avec le produit.

1. Assurez-vous que la peau est propre et **sèche**.
2. **Attention** : l'utilisation de crèmes, lotions, pommades ou produits de préparation cutanés peut réduire la capacité d'adhérence du silicone sur la peau. En cas d'utilisation d'un tel produit, laissez la zone périlésionnelle sécher avant d'appliquer le pansement.
3. Une fois prêt à appliquer le pansement Biatain Silicone Non-Border, ôtez le film protecteur central et appliquez le pansement sur la zone de la plaie. Ne touchez pas le côté adhésif du pansement en mousse. Ensuite, **étalez** le pansement le long de la peau tout en retirant les films protecteurs restants. Le pansement peut, si nécessaire, être coupé pour s'adapter aux zones difficiles à panser.
4. Procédez à la **fixation** selon le protocole de votre établissement, et mettez en place une thérapie de compression si elle est cliniquement indiquée.
5. **Laissez** le pansement en place pour ne pas nuire à l'environnement de cicatrisation de la plaie. Changez de produit lorsqu'un remplacement est cliniquement indiqué ou selon le protocole de votre établissement.
6. **Changez** le pansement lorsque des signes visibles d'exsudat atteignent presque le bord de la mousse.



Gros orteil ou pouce



Pour les plaies au niveau du gros orteil.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 10 cm.

Pliez le produit et découpez une forme triangulaire. Appliquez le pansement entre le gros orteil et le deuxième orteil et repliez-le autour du gros orteil avant de le fixer avec un bandage secondaire approprié. Optez pour une approche similaire sur le pouce.

Méthode de découpe :



Scannez le code
pour visionner la
vidéo explicative

Gros orteil ou pouce



Pour les plaies au niveau du gros orteil.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 10 cm.

Découpez deux coins du pansement et appliquez-le ensuite à partir de la face interne du gros orteil avant de le fixer avec un bandage secondaire approprié. Optez pour une approche similaire sur le pouce.

Méthode de découpe :



Scannez le code
pour visionner la
vidéo explicative

Orteils




Pour les blessures à l'extrémité d'un orteil.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 10 cm.

Coupez le produit en forme de croix. Tenez compte de la taille de l'orteil et des dimensions du produit coupé pour obtenir une forme optimale. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

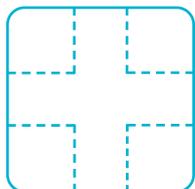

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Entre les orteils




Pour les plaies entre les orteils.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 7,5 x 7,5 cm.

Coupez le produit en forme de croix. Tenez compte de la taille des orteils et des dimensions du produit coupé pour obtenir une forme optimale. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

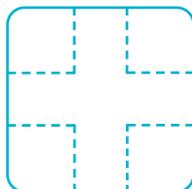

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Entre les orteils



Entre les orteils




Pour les plaies entre les orteils.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 5 x 7,5 cm.

Découpez un croissant de lune des deux côtés du produit.
Arrondissez éventuellement les coins pour un meilleur ajustement.
Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

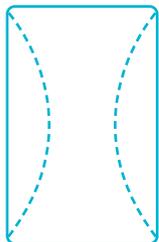


Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Pour les plaies entre les orteils.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 12,5 x 12,5 cm.

Pliez le pansement et pratiquez des entailles ou des trous en fonction du nombre d'orteils à recouvrir. Fixez-le avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

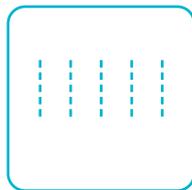

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Entre les orteils



Malléole (pied)



Pour les plaies entre les orteils.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 12,5 x 12,5 cm.

Découpez des trous en fonction du nombre d'orteils à recouvrir et ôtez les restes de produit. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :




Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Pour les plaies autour de la malléole du pied.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 7,5 x 7,5 cm.

Découpez une forme arrondie pour que le pansement s'adapte à la malléole latérale du pied. Peut également être appliqué autour de la malléole médiale. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

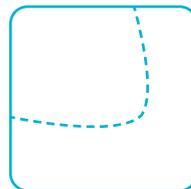

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Talon



Pour les plaies au niveau du talon.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 15 x 15 cm.

Sur le produit, découpez deux triangles d'une taille adéquate pour obtenir une forme adaptée à l'application sur le talon. Appliquez la partie supérieure plus large sur le tendon d'Achille et repliez les parties latérales plus étroites autour du talon avant de fixer le pansement à l'aide d'un bandage secondaire approprié. Vous pouvez également utiliser Biatain® Silicone Heel si vous disposez de ce produit.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Genou



Pour les blessures au genou.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 20 cm.

Découpez deux triangles d'une taille adéquate sur le produit pour obtenir une forme adaptée à l'application sur le genou. Tenez compte de la mobilité du genou et veillez au maintien correct du pansement sur le genou tant en flexion qu'en extension. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Doigts



Entre les doigts



Pour les blessures au bout d'un doigt.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 7,5 x 7,5 cm.

Coupez le produit en forme de croix. Tenez compte de la taille du doigt et des dimensions du produit coupé pour obtenir une forme optimale. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Pour les blessures entre les doigts.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 7,5 x 7,5 cm.

Coupez le produit en forme de croix. Tenez compte de la taille des doigts et des dimensions du produit coupé pour obtenir une forme optimale. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Entre les doigts



Autour du doigt




Pour les blessures entre les doigts.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 5 x 7,5 cm.

Découpez une forme arrondie des deux côtés du produit.
Arrondissez éventuellement les coins pour un meilleur ajustement.
Appliquez le pansement entre les doigts. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

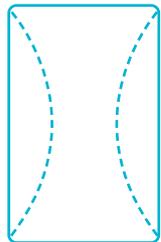


Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Pour les blessures entre les doigts.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 5 x 7,5 cm.

Pliez le produit à environ 1/3 de la longueur sur le côté long et découpez un trou pour faire passer le doigt. Si nécessaire, ajustez les côtés du produit pour qu'il s'insère correctement entre les doigts. Fixez-le avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

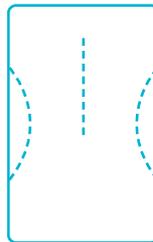

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative


Paume de la main



Pour les plaies au niveau de la paume de la main.
Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 20 cm.

Pliez le produit d'un tiers vers le bas et découpez des trous pour les trois doigts du milieu. Retirez les restes de produit, puis pratiquez une entaille ronde qui s'adapte à la base du pouce. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

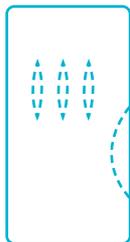

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Paume de la main



Pour les plaies au niveau de la paume de la main.
Taille du produit utilisé dans l'illustration : 12,5 x 12,5 cm.

Découpez un trou d'une taille appropriée pour l'index dans le coin supérieur droit du produit. Coupez ensuite le coin en arrondi comme indiqué sur l'illustration, de manière à ce que le produit s'adapte à la paume de la main et à la base du pouce. Fixez-le avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Dos de la main



Pour les plaies au niveau du dos de la main.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 12,5 x 12,5 cm.

Découpez un trou d'une taille appropriée pour l'index dans le coin supérieur droit du produit. Coupez ensuite le coin en arrondi pour épouser la forme du dos de la main. Fixez le pansement avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Coude



Pour les blessures autour du coude.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 20 cm.

Découpez deux petits triangles d'une taille adéquate sur le produit pour obtenir une forme adaptée à l'application sur le coude. Tenez compte de la mobilité de l'articulation du coude et veillez au maintien du pansement sur le coude tant en flexion qu'en extension. Fixez-le avec un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Épaule




Multiforme



Pour les plaies au niveau de l'épaule ou d'autres zones anguleuses.
Taille du produit utilisé dans l'illustration : 15 x 15 cm.

Pratiquez une entaille de chaque côté du pansement pour qu'il épouse la forme des articulations comme l'épaule ou d'autres zones anatomiques courbes où une telle modification est nécessaire. Fixez-le à l'aide d'une bande ou d'un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

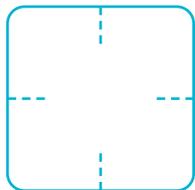


Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Pour les plaies au niveau de l'épaule ou d'autres zones anguleuses.
Taille du produit utilisé dans l'illustration : 15 x 15 cm.

Pratiquez une entaille de chaque côté du pansement pour qu'il obtienne une forme « polyforme » et épouse les articulations comme l'épaule ou d'autres zones anatomiques courbes où une telle modification est nécessaire. Fixez le pansement à l'aide d'une bande ou d'un bandage secondaire approprié. Vous pouvez également utiliser Biatain® Silicone Multishape si vous disposez de ce produit.

Méthode de découpe :

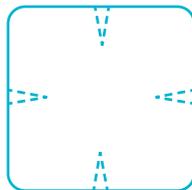

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Aisselles




Pour les plaies autour de l'aisselle.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 15 x 15 cm.

Découpez le coin en arrondi pour que le pansement épouse parfaitement l'aisselle. Fixez-le à l'aide d'une bande ou d'un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

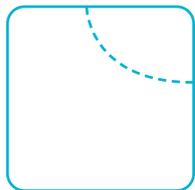

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Sous les seins



Pour les plaies autour des seins ou en dessous des seins, notamment à la suite d'une intervention chirurgicale.

Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 20 cm.

Pratiquez des entailles des deux côtés du pansement pour qu'il puisse s'insérer sous le sein. Ce pansement est notamment indiqué pour les cicatrices postopératoires. Fixez-le à l'aide d'une bande ou d'un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Gorge



Pour les plaies au niveau de la gorge et du cou.
Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 20 cm.

Optez pour un format rectangulaire et pratiquez des entailles sur les deux côtés du pansement pour qu'il épouse la forme de la gorge. Placez le côté avec les deux entailles le long des os de la clavicule, et l'autre côté avec les trois entailles sous l'os de la mâchoire. Fixez le pansement à l'aide d'une bande ou d'un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :



Scannez le code pour visionner la vidéo explicative


Oreille



Pour les blessures autour de l'oreille.
Taille du produit utilisé dans l'illustration : 10 x 10 cm.

Coupez le pansement de manière à ce qu'il épouse la forme de l'oreille. Fixez-le avec une bande ou un bandage secondaire approprié.

Méthode de découpe :

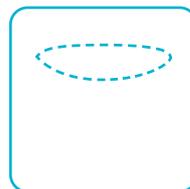

Scannez le code pour visionner la vidéo explicative

Coloplast développe des produits et des services qui facilitent la vie des personnes affectées par des troubles médicaux très personnels et intimes. En étroite collaboration avec les utilisateurs de nos produits, nous développons des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. C'est ce que nous appelons les « soins de santé intimes ».

Nos activités englobent les soins des stomies, des troubles de la continence et des plaies, ainsi que l'urologie interventionnelle et les soins de la voix et des voies respiratoires. Nous sommes présents dans le monde entier et employons plus de 12 500 personnes.

Ostomy Care
Continence Care
Wound and Skin Care
Interventional Urology
Voice and Respiratory Care

Coloplast Belgium NV/SA, Guido Gezellestraat 121, 1654 Huizingen, Belgique E.R. :E. Binnemans
www.coloplast.be Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.

© 2022-10. Tous droits réservés Coloplast A/S. PM-24224

340N30021F

