



# *Verbandwijzer : welk verband kies je voor welke wonde?*

*Jouw wondzorggids voor een optimale  
behandeling van wonden.*

# Infectie bestrijden?

NEE

Ondermijnde  
wonden,  
caviteiten?

Wonde  
en huid  
beschermen?

## Vorbereiding

Verwijder  
necrose en  
fibrine

Reinig volgens het  
huidige protocol.  
Autolytisch debridement  
ondersteunen?

**Purilon**® hydrogel\*\*



## Behandeling

Weinig exsudaat



**Biatain**® Silicone Lite\*  
of  
**Comfeel**® Plus (Transparant)



Matig exsudaat



**Biatain**® Silicone\*  
of  
**Biatain**® Non-Adhesive\*  
of  
**Biatain**® Adhesive\*



Veel exsudaat



**Biatain**® Silicone\*  
of  
**Biatain**® Alginate\*\*




## Bescherming

**Biatain**® Alginate (Filler)\*\*




**Comfeel**® Plus Transparant

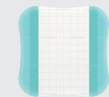

of

**Biatain**® Contact\*\*

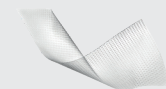

\* Verband vormt zich naar het wondbed tot 2 cm diepte

\*\* Te gebruiken met een secundair verband

# Infectie bestrijden?

JA

Ondermijnde  
wonden,  
caviteiten?

Wonde  
en huid  
beschermen?

## Vorbereitung

Verwijder  
necrose en  
fibrine

Reinig volgens het  
huidige protocol.  
Autolytisch debridement  
ondersteunen?

**Purilon**® hydrogel\*\*



## Behandeling

Weinig exsudaat



**Biatain**® Silicone Ag\*



Matig exsudaat



**Biatain**® Silicone Ag\*  
of  
**Biatain**® Ag Non-Adhesive\*



Veel exsudaat



**Biatain**® Silicone Ag\*  
of  
**Biatain**® Ag Non-Adhesive\*  
of  
**Biatain**® Alginate Ag\*\*



## Bescherming

**Biatain**® Alginate Ag (Filler)\*\*




**Comfeel**® Plus Transparant



of

**Biatain**® Contact\*\*

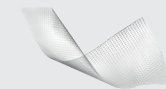

\* Verband vormt zich naar het wondbed tot 2 cm diepte

\*\* Te gebruiken met een secundair verband

# Wondbeoordelingswijzer



Ostomy Care / Contenance Care / Wound & Skin Care / Interventional Urology